



Sereno Chair in セレーノ チェアイン [HK-3800]

OG Wellness
Wellness and Beyond

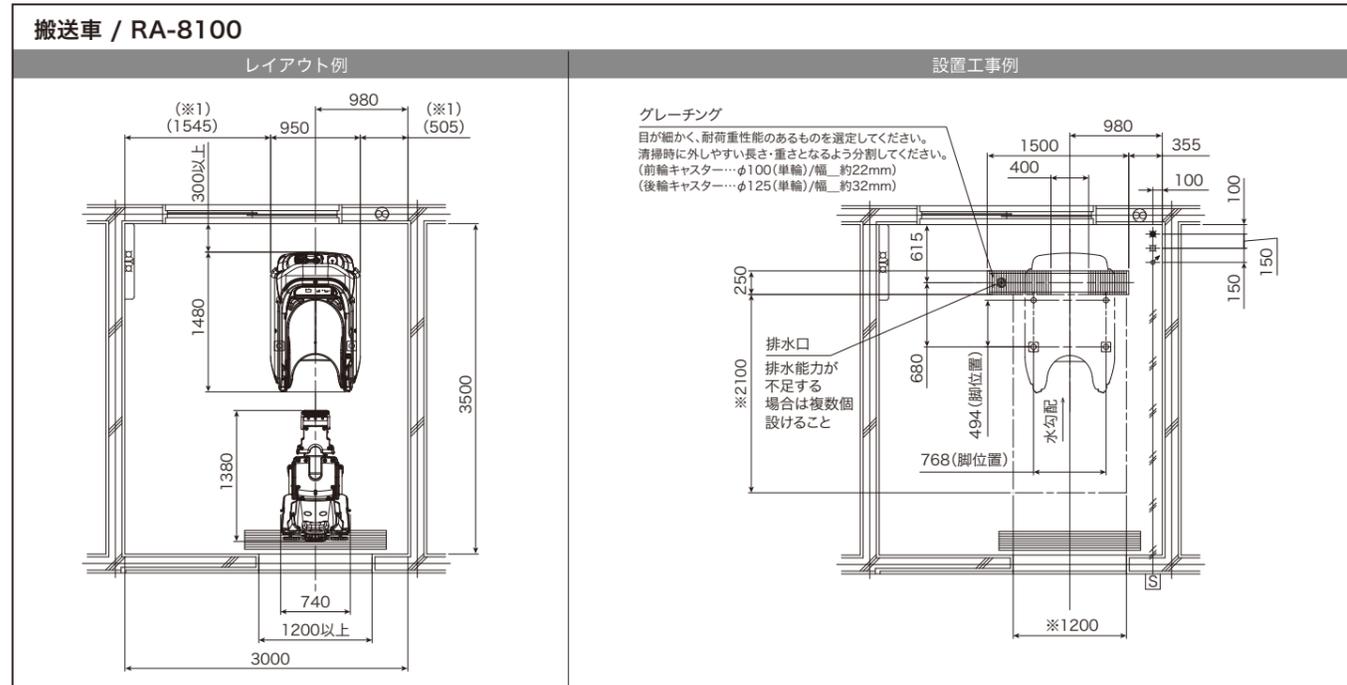

設置条件	
給湯 給水送り 配管	<p>サイズ…20A、止水バルブ止め。床からの立ち上げ代…100mm 給湯・給水圧…150～300kPa(同圧になるようにすること) 給湯・給水圧が300kPaを超える場合は、止水バルブに減圧弁を入れ、150～300kPa程度に減圧すること。 給湯・給水流量…各30L/min以上、給湯温度…60～70℃(末端温度)</p>
PF管	床面より300mm立ち上げ通線し、電線は管端より1000mm以上出す。PF管の端末は防水処理を施すこと。
電源	<p>単相100V、50/60Hz、15A 漏電遮断器…単相100V、15A(感度電流…30mA) (配電盤には単独の漏電遮断器を設けること。) 開閉器…単相100V、15A アース線はD種の規定に準ずること。</p>
電線	電線…単線1.2mmまたは、より線1.25mm ² ×3芯以上 (内線規程、敷設状況に応じて適切に選定すること)
水勾配	[] で示した範囲は、水勾配1/100以下とし、同一勾配とする(※部寸法)
排水	ピット排水(溝の深さは200mm以上)、溝内に排水口を設けること。トラップ等の防臭対策を実施し、排水能力100L/min以上を確保すること。
ボイラー能力	90,000kcal/h(ボイラー号数:60号相当)以上のこと。 指定したボイラー能力以下の場合、給水温によっては貯湯時間とシャワー吐出量に支障が生じる場合があります。 (電気給湯器使用時は入浴回数によって異なる為、別途問い合わせ必要)
その他	(※1)寸法は推奨値400mm以上とする。

■給湯・給水配管(例) ■排水ピット・排水口

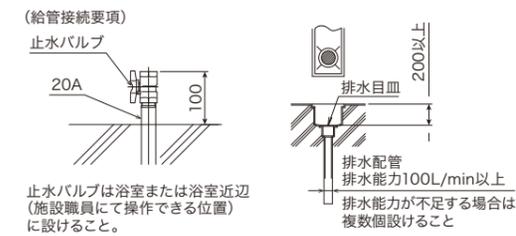

参考：株式会社シバタ ウルトラファインバブル
測定データ 0.2MPa 時平均粒径 約 126nm 約 4400 万個 /cc
計測器：株式会社島津製作所 SALD-7500nano(レーザ回折・散乱法)
※上記データは、株式会社シバタのウルトラファインバブルシステムの数値となります。



物理療法機器・リハビリ機器・介護用入浴機器

OG Wellness オージー・技研株式会社 オージーウエルネス 検索
Wellness and Beyond

[平日受付コールセンター] ☎ **0120-01-7181** 受付時間 / 9:00～17:00
[休日受付コールセンター] ○休日専用/土・日・祝・年末年始 ☎ **0120-33-7181** 受付時間 / 9:00～17:00

- | | | |
|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| 北日本支店(宮城・山形・福島) | 千葉営業所(千葉) | 高松営業所(香川・愛媛・徳島・高知) |
| 札幌営業所(北海道) | 中部支店(愛知・岐阜・三重・静岡・長野) | 九州支店(福岡・大分・熊本・長崎・佐賀・沖縄) |
| 盛岡営業所(岩手・青森・秋田) | 金沢営業所(石川・富山・福井) | 鹿児島営業所(鹿児島・宮崎) |
| 北関東支店(埼玉・群馬・栃木・茨城) | 関西支店(大阪・京都・滋賀・奈良・和歌山) | |
| 新潟営業所(新潟) | 神戸営業所(兵庫) | |
| 南関東支店(東京・山梨) | 中四国支店(岡山・鳥取) | |
| 横浜営業所(神奈川県) | 広島営業所(広島・島根・山口) | |

○表示の価格等は物価変動等により変更する場合があります。また、本カタログの記載価格は消費税抜きであり、消費税非課税物品につきましては、価格の後に「非課税」と記述しています。
○印刷インク等の都合上、記載写真と現品の色が多少異なる場合がありますのでご了承ください。 ○仕様および外観等は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
本カタログの記載内容は2025年4月現在のものです。 S48_2503_845C

[セレーノ チェアイン]

Sereno Chair in


HK-3800

Sereno Chair in

HK-3800【セレーノ チェアイン】

身体の隅々まで洗えて
芯まであたたまる
衛生的で快適なシャワーバス

予洗いから洗い流しまで、
ボタンひとつで洗身最短3分を実現。
介助者の負担を軽減します。

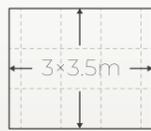

●最小3×3.5mの浴室に設置可能



●清掃しやすいオープン型シャワーバス



●細やかなミストシャワーでしっかりきれい

「セレーノ チェアイン」をお使いの現場の方の声

貯めるタイプの特浴で、平均15分/1人の入浴介助が、10分/1人程度に短縮された。(長崎県)

事前準備(湯張り等)の工数が減り、入浴介助に対する時間的な余裕ができた。(鳥取県)

湯の再利用がないため衛生的。入浴中は保温を兼ねてお湯を出し続けていたことから、湯量削減につながっている。(東京都)



全体イメージ

Operate

移乗がラク・搬送がラク
スーッと押して浴槽にドッキング

入浴方法

STEP 1 腰をかかめずラクに移乗



収納式レッグレストでしっかり足を踏み込め、安全な立ち上がり・移乗をサポートします。

STEP 2 進行方向のまま浴槽にドッキング



後ろ向きではなく、進行方向に搬送するので、入浴者の不安や恥ずかしさを和らげます。

STEP 3 カンタン操作で洗身



ボタンひとつで予洗いから、洗身、洗い流しまで。介助者の負担を軽減します。

FEATURES

Sereno
Chair in
HK-3800

使用湯量 78%^{*1} カットでも
高い洗浄力と保温効果を実現


ボタンひとつで
最短 3分の
カンタン洗身

POINT
01

洗にくい部位の洗浄まで
自動でおこない、
介助者の負担を軽減します。

ミスト状のシャワーがシワや毛穴の奥の老廃物を浮き上げらせ、
全身を優しく包み込むようにあたためます。

1人1回あたりの使用湯量

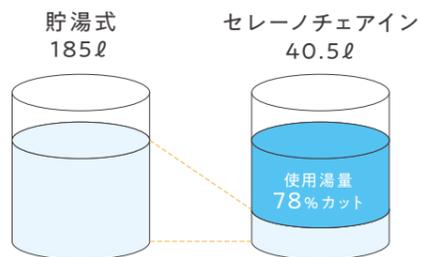

POINT
02

入浴時の湯量を大幅に削減。
ランニングコストの負担を軽減します。

おまかせコース (3分) で入浴した場合の使用湯量は、貯湯タイプの
座位浴槽と比較すると 78% 削減できます。^{*1}

ウルトラファインバブル^{*2}



シャワーにはウルトラファインバブルを採用。洗浄のほか、全身をあたため、肌にうるおいを与える効果が期待できます。

臀部洗浄シャワー



洗にくい部位にも届くようにシャワーを配置しています。

気密性の高い設計で、
身体の芯まであたためます。

浴槽カバーとネックカーテンで浴槽を覆うため、シャワー浴 (ミスト浴) でも十分な保温効果を期待できます。

POINT
03




ネックカーテンで
首まで
あたたかい

身体が
あたたまるのは
なぜ?




サーモグラフィ

〈入浴前〉

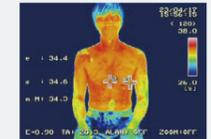

〈入浴後〉

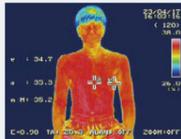

試験条件

- 設定温度 : 40°C
- モード : シャワーコース (5分)

清掃しやすい
上部
オープン型



清掃
しやすいのは
なぜ?



POINT
04

こだわりの
上部オープン型の浴槽は、
清掃しやすく衛生的です。

水気をサッと拭き取れる素材 床下の空間広々



腰をかがめず、磨きにくいところまで、負担なく清掃できます。

操作パネル



浴槽と搬送車の薬液殺菌も

ボタンひとつで薬液を混入したシャワーを吐出。薬液吐出後の洗い流しまで自動でおこない、清掃の負担はもちろん、感染リスクも軽減します。

^{*1} トットティ (HK-8100) と比較※実使用湯量は入浴時間とご利用者の体格により変動します。 ^{*2} ウルトラファインバブル機能は株式会社シバタの商品を使用しています。 ※「ファインバブル」「ウルトラファインバブル」は一般社団法人ファインバブル産業会の登録商標です。

FUNCTION

Sereno
Chair in
HK-3800

「移乗」「入浴」「清掃」まで 介助者の負担を軽減する搬送車

入浴者の安全・安心と、介助者がサポートしやすいよう
細部にまでこだわった設計です。

小柄な方でも
操作しやすい
のはなぜ？



移乗をラクにする
開閉式サイドフェンス



車椅子と搬送車をより近くまで寄せられ、移乗をラクに。

軽い力で傾斜できる
バランスチルト



入浴者の体重に左右されず、小柄な方でも軽い力で操作できます。

搬送車
-13kg
軽量化
※従来品比較



搬送車
RA-8100

立ち上がりをラクにする
収納式レッグレスト



レッグレストはシートの下に完全に収納できるため、安全に立ち上がれます。

取り外し可能な
マット・シート



マットやシートは簡単に着脱でき、清掃時間を短縮します。

搬送車連結型の
コンパクト設計。

入浴介助も効率的におこなえます。

搬送車をドッキングするだけというシンプルな操作で、
小スペースでも効率よく入浴介助ができます。



最小
3×3.5mの
浴室に設置可能

仕様 [HK-3800]



セレーノチェアイン

HK-3800-S ¥6,000,000(税別)

型番	HK-3800
外形寸法	1480(L)×950(W)×1140(H)mm
浴槽内寸法	1410(L)×610(W)×620(D)mm
質量	95kg
電源電圧	単相 AC100V 50/60Hz
消費電力	350W(50/60Hz)
主な材質	外装：FRP、フレーム：スチール
機能・性能	自動洗身機能・自動機器殺菌機能・シャワーのみ吐出機能 ハンドシャワーのみ吐出機能・入浴時間表示/報知機能 ハンドシャワー 1基・報知音・殺菌時報知機能 吐出温度安全制御機能(シャワー) 吐出温度安全制御機能(ハンドシャワー)

HK-3800-Sには搬送車(RA-8100)とボディソープが含まれます。

〈標準付属品〉			
浴槽洗浄剤	SA-1	1本	
安全ラベル(大)		1枚	
入浴事故防止ラベル		1枚	
取扱説明書		1部	

消耗品 [HK-3800]



品名	品番	数量	価格
01 浴槽洗浄剤	SA-1	4本セット	¥12,000(税別)
02 ボトル	HK3100-011	1個	¥9,000(税別)
03 シャワーヘッド	HK255-012	1基	¥7,200(税別)
04 キャップ	HK3800-002	1個	¥3,200(税別)

品名	品番	数量	価格
05 浴槽カバー	HK3800-004	1個	¥98,000(税別)
06 吸盤式シャワーフック	HK3800-005	1個	¥3,500(税別)
07 ネックカーテン	HK3800-001	1枚	¥23,000(税別)
08 OG Wellness Body Soap	BS-4L-OG	1個	¥7,500(税別)

仕様 [RA-8100]



搬送車

RA-8100 ¥2,100,000(税別)

型番	RA-8100
外形寸法	1220(L)×740(W)×1280(H)mm (搬送姿勢) 760(L)×740(W)×1280(H)mm (移乗姿勢) 1380(L)×740(W)×1130(H)mm (入浴姿勢)
質量	47kg
主な材質	バックレスト、シート、レッグレスト、サイドフェンス：ポリプロピレン フレーム、搬送用取っ手：ステンレス
機能・性能	バランスチルト・スライド式ヘッドレスト・ ワンタッチ収納式レッグレスト・開閉式サイドフェンス・ 安全ベルト(腰部、胸部、足部(オプション))

〈標準付属品〉			
マット外し	RA735-001	1個	

消耗品・オプション [RA-8100]



※スポンジマット交換の際には、合わせて、クリップ、クリップボタンの交換もお勧めします。

品名	品番	数量	価格
01 スポンジマット	RA8100-003	1枚	¥28,000(税別)
02 スポンジマット(踵部)	RA8250-005	1枚	¥7,000(税別)
03 安全ベルト(腰部)	RA825-001	1本	¥7,500(税別)
04 安全ベルト(胸部)	RA825-009	1本	¥9,000(税別)
05 パッド	RA355-015	1枚	¥5,700(税別)
06 ヘッドレスト	RA355-014	1個	¥35,000(税別)
07 クリップボタン(10個)	RA355-022	1セット	¥4,000(税別)
08 クリップ(10個)	RA825-010	1セット	¥1,200(税別)
09 マット外し	RA735-001	1個	¥1,900(税別)
10 固定用バックル	IB50SA-BK	1個	¥700(税別)
11 安全ベルト(足部)	RA825-002	1組	¥7,000(税別)

SIAAマークは、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

使用抗菌剤の種類 … 無機抗菌剤加工方法
加工方法 ……………… 練込
加工部位 ……………… マット
登録番号 ……………… JP0123356X0001C