


設置工事図

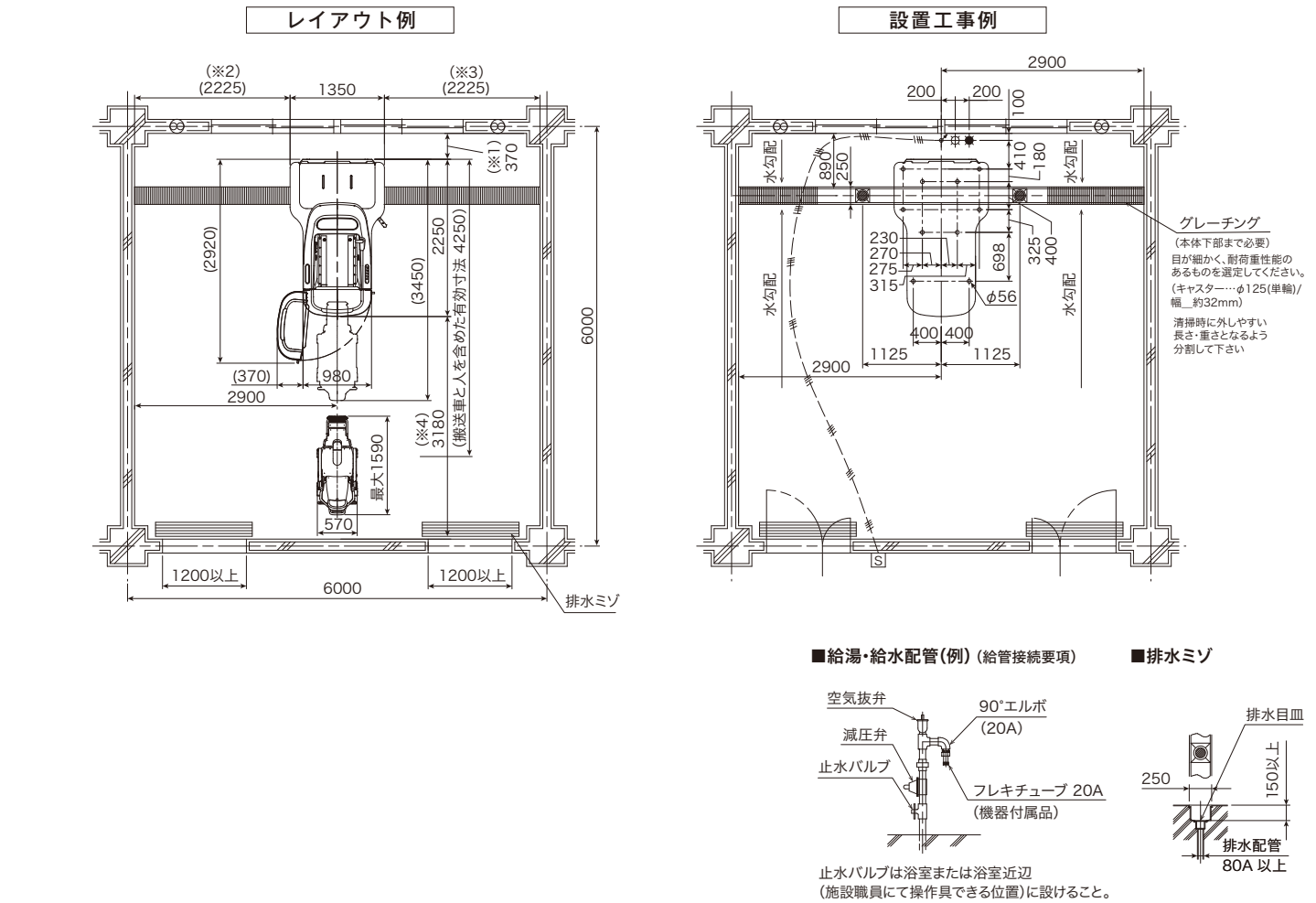

設置条件			
給湯 給水送り 配管	サイズ…20A、ソケットまたはエルボ止め。 止水バルブを浴室または浴室近辺に設けること 給湯・給水圧…150～300kPa(同圧になるようにすること) 給湯・給水圧が300kPaを超える場合は止水バルブに減圧弁を入れ、 200kPa程度に減圧すること。 給湯・給水流量…各30L/min以上、給湯温度…55～80℃(末端温度)	排水	ビット排水(溝の深さは150mm以上)、溝内に排水口を設けること。 トラップ等の防臭対策を実施し、排水能力300L/min以上を確保すること。
		ボイラー 能力	100,000kcal/h(ボイラー号数:67号相当)以上のこと。 指定したボイラー能力以下の場合、給水温によっては貯湯時間と シャワー吐出量に支障が生じる場合があります。 ※電気給湯器使用時は入浴回数によって異なる為、別途問い合わせ必要
		その他	(※1) 寸法は清掃時にタンクカバーを浴槽後部に引っ掛ける場合 推奨値600mm以上とする。ただし、設置条件の問題から、最小200mmと する。(この場合、機器後部からのタンク清掃が出来ない為、ユーザーの了解 が必要である) (※2) 寸法はドア開閉寸法の為、推奨値300mm以上とする。 (200mmより狭くなるとドアの開閉ができなくなる) (※3) 寸法は推奨値400mm以上とする。 (300mmより狭くなると、ユーザーによる過フィルターの洗浄操作や薬液 ボトルの交換操作が出来なくなる。現場での横力バーの固定も出来ないくなる。) (※4) 寸法は推奨値2000mm以上とする。
PF管	床面より300mm立ち上げ通線し、電線は管端より1000mm以上出す。 PF管の端末は防水処理を施すこと。		
電源	三相200V、50/60Hz、20A 漏電遮断器…三相200V、20A(感度電流…30mA) ※配電盤には単独の漏電遮断器を設けること。 開閉器…三相200V、20A アース線はD種の規定に準ずること。		
電線	電線…単線1.6mmまたは、より線2.0mm ² ×4芯以上 (内線規程、敷設状況に応じて適切に選定すること)		
水勾配	水勾配…矢印の方向へ均一1/100以下の勾配とする。		

物理療法機器・リハビリ機器・介護用入浴機器

OG Wellness

オージー・技研株式会社

オージーウエルネス

検索

【平日受付コールセンター】

0120-01-7181

受付時間 / 9:00～17:00

【休日受付コールセンター】

0120-33-7181

受付時間 / 9:00～17:00

北日本支店 (宮城・山形・福島)

札幌営業所 (北海道)

盛岡営業所 (岩手・青森・秋田)

北関東支店 (埼玉・群馬・栃木・茨城)

新潟営業所 (新潟)

南関東支店 (東京・山梨)

横浜営業所 (神奈川県)

千葉営業所 (千葉)

中部支店 (愛知・岐阜・三重・静岡・長野)

金沢営業所 (石川・富山・福井)

関西支店 (大阪・京都・滋賀・奈良・和歌山)

神戸営業所 (兵庫)

中四国支店 (岡山・鳥取)

広島営業所 (広島・島根・山口)

高松営業所 (香川・愛媛・徳島・高知)

九州支店 (福岡・大分・熊本・長崎・佐賀・沖縄)

鹿児島営業所 (鹿児島・宮崎)

岡山本社

〒703-8261 岡山県岡山市中区海吉1835-7

東京本社

〒100-6004 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング4階

取扱店

○表示の価格等は物価変動等により変更する場合があります。 また、本カタログの記載価格は消費税抜きであり、消費税非課税物品につきましては、価格の後に“非課税”と記述しています。

○印刷インク等の都合上、記載写真と現品の色が多少異なる場合がありますのでご了承ください。 ○仕様および外観等は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

本カタログの記載内容は2025年4月現在のものです。

S48_2503_844D

OG Wellness
Wellness and Beyond



1 自然で安心な前向き入浴スタイルで 入浴操作も簡単

搬送車をチルト&リクライニングさせて浴槽にドッキングさせるだけ

介助しやすく、乗り降りもスムーズな設計の搬送車



座位タイプ搬送車RA-8250の場合



移乗 安全で介助しやすい移乗

回転式サイドフェンスや、介助者が足を踏み込みやすい収納式レッグレストで、スムーズな移乗をおこなうことができます。

搬送 前向き of 自然な姿勢で搬送

車椅子のように進行方向を向く「前向き入浴」なので、入浴者は恐怖感や不快感なく、安心して入浴していただけます。

ドッキング 搬送車のままスムーズドッキング


搬送車のままドッキングして、片手で軽く浴槽ドアを押すだけで、自動的にドアロックします。入浴スイッチで給湯を開始。約90秒でお湯が溜まります。

入浴介助 らくらく入浴介助

浴槽の縁の高さは約93cmと低いため、コミュニケーションをとりながら、通常の入浴ケアもラクにおこなえます。

立ち上がり・移乗をラクにする 収納式レッグレスト

[RA-8250]

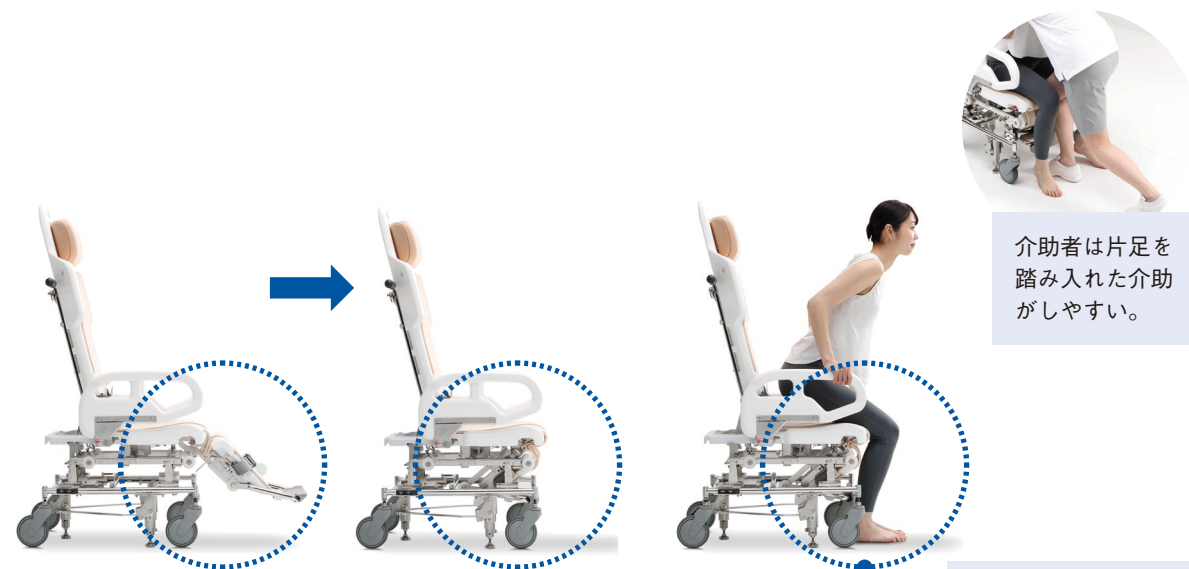

レッグレスト(足受け)は折れ曲がり、シートの下に収納できます。足元にスペースが確保できるので、移乗や立ち上がりがスムーズにおこなえます。

介助者は片足を踏み入れた介助がしやすい。

入浴者は踵を引いて立ち上がる自力動作がしやすい。


回転式サイドフェンス



サイドフェンスは回転式で開くため、横からの移乗が可能です。

※画像はRA-8250です。

座りやすく立ち上がりやすい座面 [RA-8250]

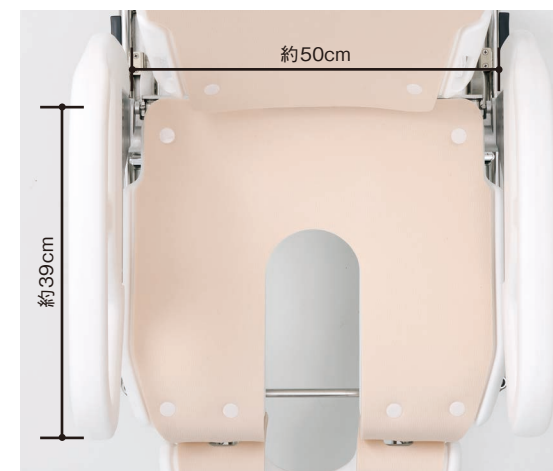

座面の幅は広く奥行きが短いため、奥までしっかり座りやすく、かつ重心の前方移動がしやすく、立ち上がりがスムーズにおこなえます。

2 入浴者の介護度に合わせて、 選べる2種類の搬送車

アダージオは「座位タイプ搬送車」と「長座位タイプ搬送車」がご利用できます。
介護度の低い方から寝たきりの方まで、アダージオ1台で対応が可能です。

浴槽を変えることなく重度化に対応

Select 1

小柄な介助者もラクに操作がおこなえるチルト式搬送車。入浴者の姿勢を安定させ、ずり込みを防止。リクライニングをすることで、リラックスした状態で入浴できます。

搬送車 座位タイプ [RA-8250]

搬送車 座位タイプ RA-8250



Select 2

足受け部分をフラットにした長座位タイプの搬送車。寝たまま介護入浴と同様の姿勢がとれるので、介護度の高い方でも同じ浴槽で入浴ができます。

搬送車 長座位タイプ [RA-827]

搬送車 長座位タイプ RA-827



軽い力で傾斜できるチルト機構 [RA-8250]



背もたれが倒れると同時に座面が上がり、座部にかかる体圧を背中から脚に分散させます。また、ずり込みを防止、安定した姿勢を保てます。介助者の腰痛防止にもつながります。

足がラクになるレッグレスト [RA-8250]



レッグレストは、入浴者の体格に合わせて稼働します。ふくらはぎをサポートしてラクな姿勢を保ちます。

肩までしっかり入浴できるリクライニング



入浴者の状況に合わせ、背もたれの角度を4段階に切り替えることができるので、肩までしっかり温まります。



手元レバーでリクライニングの角度調節が簡単におこなえます。

洗身や洗髪もリラックス



背もたれの角度を寝た状態までリクライニングできるため、リラックスして洗身や洗髪がおこなえます。

一括ブレーキで簡単固定 [RA-8250]



搬送車のキャスターロックを一つひとつかける手間を省ける「一括ブレーキ」を採用。ブレーキペダルを踏むことで搬送車の位置が固定されます。

3 広々した浴槽でゆったり入浴

小柄な方も大柄な方も、つま先から肩まで、のびのびリラックスできる浴槽です。

リラクステアに身を委ねたような感覚の入浴

[RA-8250]



寝たまま介護入浴機器と同様な姿勢の入浴

[RA-827]




快適な入浴のための噴流機能

衛生的で心地よい噴流浴

噴流ノズルを左右に4基搭載。水圧によるジェット噴流で、ワンランク上の快適な入浴が楽しめます。レジオネラ菌が発生しやすい環境となる「気泡盤(気泡浴)」を廃止し、衛生的な噴流装置を装備しました。

足先から温める給湯


お湯は足元から出てきます。心臓付近にいきなりお湯が当たるのではなく、足先から温めていくので、心血管の弱い高齢者も安心です。(給湯スロースタート機能付き)

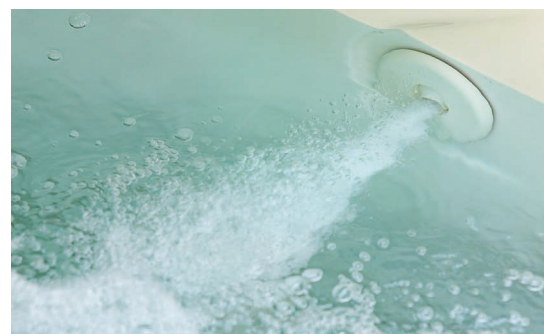

噴流ノズルの角度は調節できます。

操作パネルで安全確認

介助者は動き回らなくてもよく、ゆとりを持って入浴介助がおこなえます。

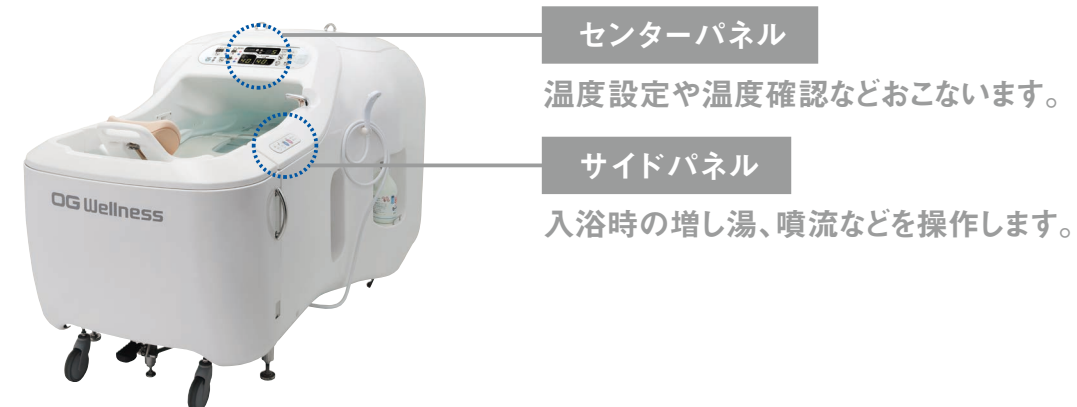

センターパネル

安全な入浴に必要な浴槽・タンクの湯温表示、入浴時間を中央に配置し、サイドは分類別にスイッチ、表示を配置することで操作性・視認性がアップしています。



電動ミキシング方式

ワンタッチで正確な温度の給湯ができ、温度管理が容易におこなえます。
給水圧や給湯温度が影響されず、設定した温度のお湯が出ます。


タンク湯温コントロール機能

タンクの湯温の低下を防止するため、退浴時に温度調節をおこなっています。
1回の退浴動作で、約1度の温度調節をおこなっています。

急速貯湯機能

貯湯時間を通常の約30分から約15分に短縮。
ハンドシャワー未使用時は2つのミキシングで貯湯できるので、貯湯時間を通常の約30分から約15分に短縮します。素早く貯湯したい場合に便利です。

サイドパネル

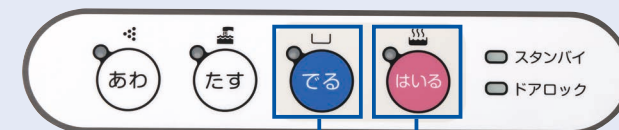

「でるスイッチ」でお湯を浴槽からタンクに約90秒で移送します。

ドッキング後「はいるスイッチ」で給湯を開始。約90秒でお湯がたまります。

清潔なお湯で入浴していただく安心の衛生管理

浴槽の薬液による殺菌機能

殺菌効果の高い塩素殺菌を採用
市販の薬液ボトルを設置するだけです。
タンク貯湯時に薬液を自動投入して殺菌
タンク内のお湯を循環して薬液濃度を一定に
設定濃度は「濃い：2ppm」「薄い：1ppm」から選択できます。

全量ろ過機能

●清潔なお湯をキープ
浴槽から貯湯タンクへお湯が移動するときに、全てのお湯をろ過してゴミ
や毛髪を除去します。
●ろ過フィルター自動洗浄機能
お湯の移動後、ろ過フィルター内のゴミを洗い流しています。洗浄には約
40Lのお湯を使い、洗浄後排水。その後40Lのお湯(薬液入り)を新たに補充
します。

機器の殺菌・洗浄

スイッチひとつで機器や配管内を殺菌・洗浄
機器の殺菌・洗浄を簡単におこなうことができます。



機器殺菌開始スイッチ
機器殺菌(薬液濃度10mg/Lで殺菌)をおこないます。



機器洗浄開始スイッチ
機器洗浄(酸素系漂白剤にて配管内の洗浄/殺菌)をおこないます。

仕様 [浴槽]



6年間保証

〈機能・性能〉	
自動貯湯機能	機器洗浄機能
操作ロック機能	水位検出可変式オーバーフロー
ろ過/薬液殺菌機能	増し湯機能
ろ過フィルター自動洗浄機能	ハンドシャワー(1基)
給湯スロースタート機能	噴流機能
タンク湯温コントロール機能	異常貯湯温度排出機能
薬液濃度切替機能	異常湯温時排出機能
入浴時間表示・報知機能	増し湯高温時報知/停止機能
急速貯湯機能	ハンドシャワー高温時報知/停止機能
機器殺菌機能	

アダージオ

HK-8250L(左扉開閉型)	¥11,000,000 (税別)
HK-8250R(右扉開閉型)	¥11,000,000 (税別)
HK-8250LB(HK-8250L+非常時退浴機能)	¥11,500,000 (税別)
HK-8250RB(HK-8250R+非常時退浴機能)	¥11,500,000 (税別)

電源電圧	三相200V 50/60Hz
消費電力	1.1kW(50Hz)/1.9kW(60Hz)
外形寸法	2250(L)×1350(W)×1280(H)mm
浴槽内寸法	1800(L)×700(W)×630(H)mm
質量	350kg
主な材質	浴槽・外装/FRP、ABS、外観部品/ステンレス、 フレーム/スチール+メッキ

〈標準付属品〉		
浴槽洗浄剤	SA-1	1本
ビューラックス-S 1800ml	PLS-1800	1本
取扱説明書		1部
入浴事故防止ラベル		1枚
安全ラベル(大)		1枚

仕様 [搬送車 座位タイプ]



6年間保証
SIAA 抗菌加工

搬送車 座位タイプ

RA-8250	¥2,400,000 (税別)
外形寸法	1170(L)×575(W)×1340(H)mm(75°)(搬送姿勢) 1590(L)×575(W)×990(H)mm(40°)(入浴姿勢)
質量	42kg
主な材質	フレーム/ステンレス シート、サイドフェンス/ポリプロピレン スポンジマット/ポリエチレン

〈標準付属品〉		
マット外し	RA735-001	1個
取扱説明書		1部

〈機能・性能〉	
安全ベルト	回転式レッグレスト/シート
収納式レッグレスト	サイドフェンス
抗菌パッド	リクライニング機能
抗菌マット	チルト機能
抗菌ヘッドレスト	着脱式ヘッドレスト
レッグレスト角度調節機能	ブレーキペダル

仕様 [搬送車 長座位タイプ]



6年間保証
SIAA 抗菌加工

搬送車 長座位タイプ

RA-827	¥2,850,000 (税別)
外形寸法	1850(L)×575(W)×1070(H)mm(38°)
質量	45kg
主な材質	背部シート/ポリプロピレン 樹脂、下肢シート/FRP フレーム/ステンレス+電解研磨

〈標準付属品〉		
マット外し	RA735-001	1個
取扱説明書		1部

〈機能・性能〉	
安全ベルト	抗菌ヘッドレスト
サイドフェンス	リクライニング機能
抗菌パッド	転倒防止機能
抗菌マット	着脱式ヘッドレスト

アダージオ HK-8250

消耗品



	品 名	品番	数量	価 格	
01	ろ過フィルター	HK775-009	1本	¥18,000(税別)	
02	浴槽洗浄剤	SA-1	4本セット	¥12,000(税別)	
03	シャワーヘッド	HK3100-017	1基	¥7,200(税別)	
04	ピューラックス-S 1800ml	PLS-1800	1本	¥1,450(税別)	(軽減税率対象商品)
	パッキン(フィルターハウジング用)	HK775-012	1個	¥400(税別)	
	パッキン(フィルター用)	HK775-011	1個	¥300(税別)	

オプション



品 名	品番	数量	価 格
後面カバー	HK8250-001	1個	¥90,000(税別)

※オプション商品を追加で取り付けの際は、別途弊社担当者までお問い合わせください。

カラーバリエーション




※ボディカラーは4色をご用意しております。
ホワイト(標準カラー) 以外は受注生産のため別途実費として¥90,000(税別)を申し受けます。

例 HK-8250LCPK
製品番号 カラー

搬送車 座位タイプ RA-8250

消耗品

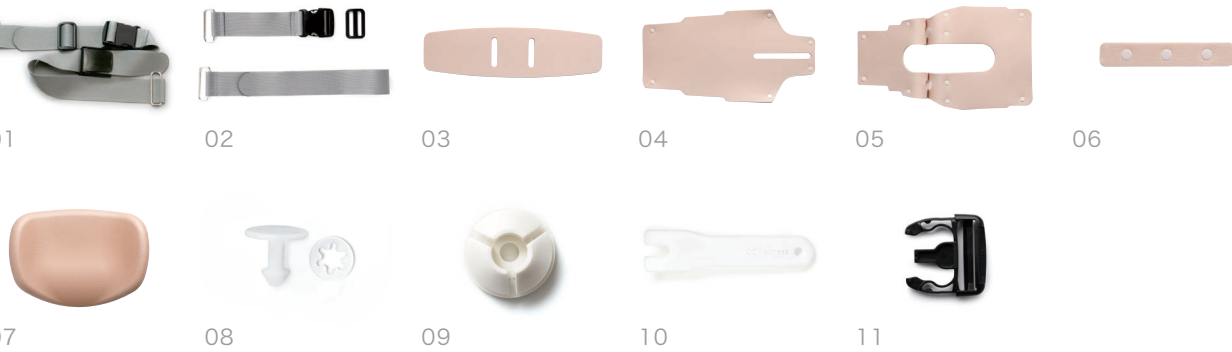

	品 名	品番	数量	価 格
01	安全ベルト(腰部)	RA825-001	1本	¥7,500(税別)
02	安全ベルト(足部)	RA825-002	1組	¥7,000(税別)
03	パッド	RA355-015	1枚	¥5,700(税別)
04	スポンジマット(背部)	RA8250-003	1枚	¥15,000(税別)
05	スポンジマット(臀部)	RA8250-004	1枚	¥15,000(税別)
06	スポンジマット(踵部)	RA8250-005	1枚	¥7,000(税別)
07	ヘッドレスト	RA8250-006	1個	¥35,000(税別)
08	クリップボタン(10個)	RA355-022	1セット	¥4,000(税別)
09	クリップ(10個)	RA825-010	1セット	¥1,200(税別)
10	マット外し	RA735-001	1個	¥1,900(税別)
11	固定用バックル	IB50SA-BK	1個	¥700(税別)

オプション



品 名	品番	数量	価 格
安全ベルト(胸部)	RA825-009	1本	¥9,000(税別)

搬送車 長座位タイプ RA-827

消耗品



	品 名	品番	数量	価 格	
01	安全ベルト(腰部)	RA825-001	1本	¥7,500(税別)	※RA-827では、安全ベルト(足部)としてもご利用いただけます。
02	パッド	RA355-015	1枚	¥5,700(税別)	
03	スポンジマット(背部)	RA8250-003	1枚	¥15,000(税別)	
04	スポンジマット(下肢部)	RA827-004	1枚	¥19,000(税別)	
05	スポンジマット(先端部)	RA827-005	1枚	¥8,000(税別)	
06	ヘッドレスト	RA8250-006	1個	¥35,000(税別)	
07	クリップボタン(10個)	RA355-022	1セット	¥4,000(税別)	
08	クリップ(10個)	RA825-010	1セット	¥1,200(税別)	
09	マット外し	RA735-001	1個	¥1,900(税別)	
10	固定用バックル	IB50SA-BK	1個	¥700(税別)	

※スポンジマット交換の際には、合わせて、クリップ、クリップボタンの交換もお勧めします。

オプション



品 名	品番	数量	価 格
安全ベルト(胸部)	RA825-009	1本	¥9,000(税別)

※スポンジマット交換の際には、合わせて、クリップ、クリップボタンの交換もお勧めします。



SIAAマークは、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

使用抗菌剤の種類	無機抗菌剤
加工方法	練込
加工部位	マット
登録番号	JP0123356X0006H