



Tutti

トゥッティ

HK-8100・HK-8150

物理療法機器・リハビリ機器・介護用入浴機器

OG Wellness オージー技研株式会社 [オージーウエルネス](#) [検索](#)

【平日受付コールセンター】 【休日受付コールセンター】 ○休日専用/土・日・祝・年末年始

0120-01-7181 **0120-33-7181**

受付時間 / 9:00～17:00 受付時間 / 9:00～17:00

北日本支店（宮城・山形・福島） 札幌営業所（北海道） 盛岡営業所（岩手・青森・秋田） 北関東支店（埼玉・群馬・栃木・茨城） 新潟営業所（新潟） 南関東支店（東京・山梨） 横浜営業所（神奈川）	千葉営業所（千葉） 中部支店（愛知・岐阜・三重・静岡・長野） 金沢営業所（石川・富山・福井） 関西支店（大阪・京都・滋賀・奈良・和歌山） 神戸営業所（兵庫） 中四国支店（岡山・鳥取） 広島営業所（広島・島根・山口）	高松営業所（香川・愛媛・徳島・高知） 九州支店（福岡・大分・熊本・長崎・佐賀・沖縄） 鹿児島営業所（鹿児島・宮崎）
---	---	---

○表示の価格等は物価変動等により変更する場合があります。 また、本カタログの記載価格は消費税抜きであり、消費税非課税物品につきましては、価格の後に“非課税”と記述しています。
○印刷インク等の都合上、記載写真と現品の色が多少異なる場合がありますのでご了承ください。 ○仕様および外観等は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

本カタログの記載内容は2025年4月現在のものです。

S48_2503_824R

1 移乗がラク・搬送がラク スーッと押して浴槽にドッキング

HK-8100/8150



※入浴モデルの身長は165cmです。
※製品写真は、HK-8150です。

安全な移乗と立ち上がり

レッグレストは、移乗や立ち上がりのときにシートの下に完全収納できるので、足元に空間が生まれます。介助者が足を踏み入れられるので、動作を安全にスムーズにサポートでき、介護負担を軽減できます。

スムーズな連結

浴槽入り口の幅は610mmと広め設計。浴槽へのドッキングがよりスムーズになりました。

自然な前向き入浴

進行方向に搬送してそのまま入浴できるので、入浴者の不安や恥ずかしさも和らげることができます。

足元のスペースが広いので身長180cmの方も無理のない姿勢で入浴が可能

自然な入浴姿勢にこだわって、足を気持ち良く伸ばせるよう、浴槽形状を見直しました。足元のスペースを従来製品より実質140mm広げました。



※入浴モデルの身長は165cmです。
※製品写真は、HK-8100です。

2 省スペース設計で、3×3.5mの浴室に設置可能

コンパクトサイズ・小規模施設に最適


タンク形状を工夫し、全長が従来製品(全長1830mm)より170mm短くなり、3×3.5mユニット型浴室へ設置が可能になりました。

スムーズ連結・ラクラク介助

搬送車が浴槽の扉を兼ねているのでコンパクトに連結。入れやすい方向から搬送車をアプローチできます。

効率の良い動線

介助者の作業動線にむだがなく、入浴介助をスムーズに始めることができます。

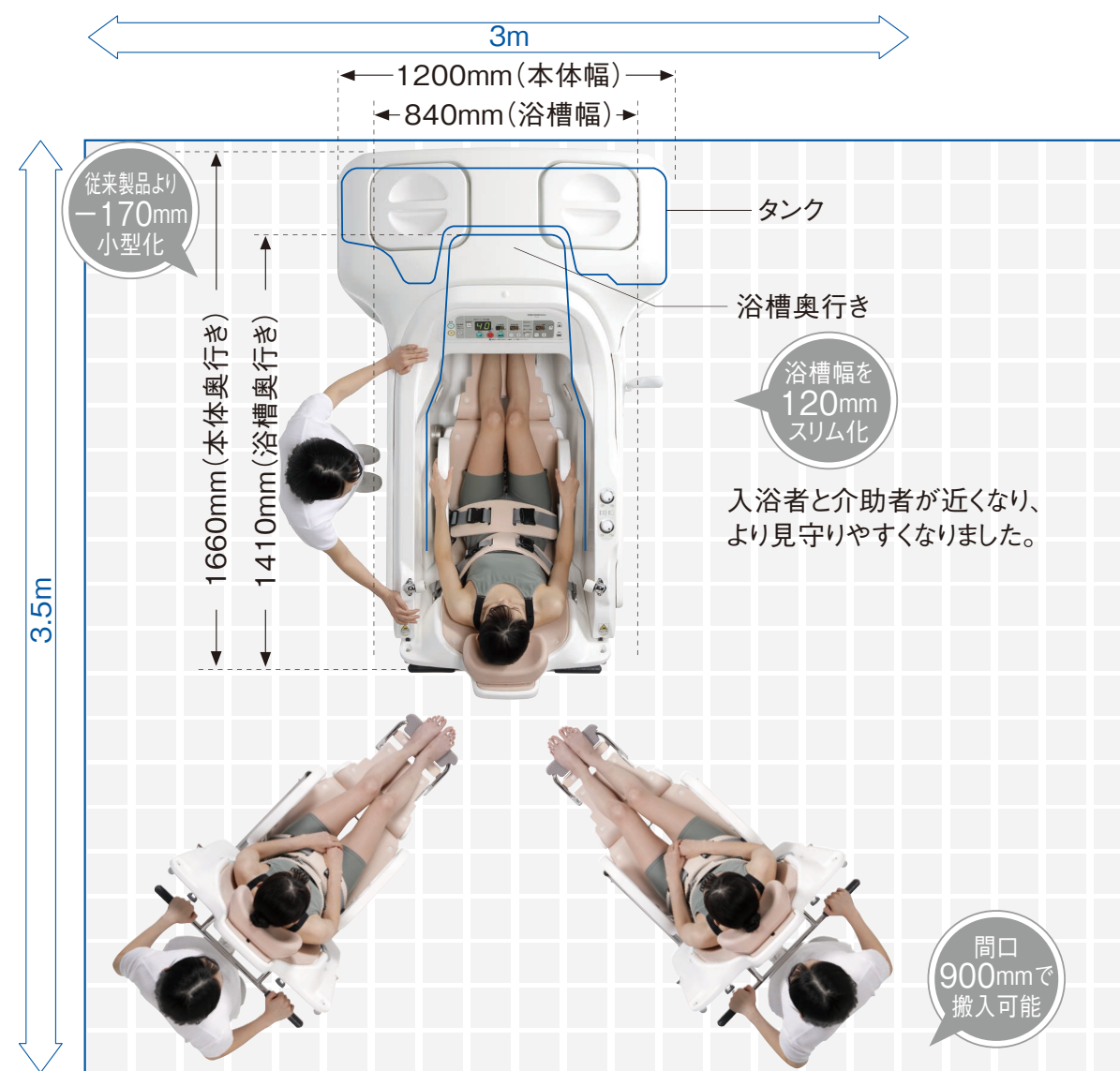

廊下の幅が1500mmあれば、間口900mmの浴室にも搬入と設置が可能です。(タンクと浴槽を分割して搬入をおこないます)

ご要望に応じて機能を選べるラインアップ

新湯式

トゥッティ HK-8100
新しいお湯でいつも安心

一人ひとり新しいお湯で入浴

一人ひとりの入浴ごとにきれいなお湯を入れ替える新湯式を採用。入浴と同時に貯湯を開始するので効率的な入浴介助が可能です。

少ないお湯の量で経済的

ひとり当たりの実使用湯量は約185L。一般家庭用の浴槽と比較しても100L程度少なく、衛生的な入浴が経済的におこなえます。



循環式

トゥッティ HK-8150
循環式で大幅にランニングコストを削減

お湯を循環させるので経済的

入浴後のお湯をスピーディに循環しながらろ過・殺菌をおこない、循環式で光熱費を約80%カットできます。施設にも環境にもやさしい経済的な浴槽です。

スピード給湯(約60秒)・退浴(約70秒)

急速給湯機能により、クラス最短の給湯時間を実現。大型排水管の急速排水機能の採用により、失禁時の排水も約60秒で完了。効率的な入浴がおこなえます。



肩掛けシャワー機能 [HK-8100J-S1/S3, HK-8100-S1/S3]

噴流機能 [HK-8100J]

ジェット噴流を2基搭載。快適な入浴が楽しめます。



肩掛けシャワーは入浴中だけでなく排水中でも使用できるので、湯冷めを防ぐことができます。また、半身浴も可能です。

3 安心・安全をサポートする 細部に工夫のある搬送車

ー13kgの軽量化で、介助者の負担をさらに軽減



搬送車は従来製品より13kg軽減しました。よりスムーズに移乗・搬送操作が可能になり、介助者の作業負担が軽減されました。

女性ひとりでもラクラク操作、人間工学の視点から軽い力で傾斜できるバランスチルト



独自のバランスチルトにより軽い力で傾けられます。「トゥッティ」のバランスチルトは、入浴者の重心を軸に傾けるので、入浴者の体重に左右されず、女性の介助者ひとりでもラクに操作がおこなえます。入浴者も重心移動の少ない姿勢を保つことができるので、不安感がありません。
(特許第5066418号)

移乗がラクな「開閉式サイドフェンス」大型化して膝までガード(ロック機能付き)



車椅子と搬送車をより近くまで寄せられ、移乗がラクになる「開閉式サイドフェンス」を採用。さらに膝上までガードできる大型のサイドフェンスに進化させ、安全性を高めました。

立ち上がり・移乗をサポート「収納式レッグレスト」



レッグレストは、シートの下へ完全に収納することができます。足元に空間が生まれ、動作を安全にサポートできます。

サポート性の高い「安全ベルト」



写真はオプションの足部ベルトです。胸部と腰部のベルトは標準装備となります。

安全ベルトは、腰部と胸部を標準装備しています。オプションで足部も追加できますので、より安全性を高めることができます。

4輪すべて「キャスターロック」

キャスターはバージョンアップし、さらに取り回しがよくなる構造に。全4輪をロックできるようになり、安全性も高めました。

移乗性を向上した「フラットな座面」

移乗性を向上させるために、座面をフラットに近い形状にし、先端部も少し低く改良しました。

きちんと清掃・ラクラク清掃



スライド式枕

隅々まで清掃しやすくなった「スポンジマット」と、取り外し可能な「シート」と「スライド式枕」。



新湯式	搬送車	噴流	停電 対応	肩掛け シャワー
HK-8100J-S1	●	●	●	●
HK-8100J-S2	●	●	●	
HK-8100J-S3	●	●		●
HK-8100J-S4	●	●		
HK-8100-S1	●		●	●
HK-8100-S2	●		●	
HK-8100-S3	●			●
HK-8100-S4	●			

トウッティ(新湯式)

HK-8100J-S1	¥8,700,000 (税別)
HK-8100J-S2	¥8,500,000 (税別)
HK-8100J-S3	¥8,450,000 (税別)
HK-8100J-S4	¥8,250,000 (税別)
HK-8100-S1	¥8,450,000 (税別)
HK-8100-S2	¥8,250,000 (税別)
HK-8100-S3	¥8,200,000 (税別)
HK-8100-S4	¥8,000,000 (税別)

外形寸法	1660(L)×1200(W)×1160(H)mm ※浴槽の幅840mm
浴槽内寸法	1410(L)×610(W)×620(D)mm
質 量	200kg
電 源 電 圧	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	0.7kW(50Hz)、1.1kW(60Hz)
主 な 材 質	浴槽、外装:FRP、タンク:ポリプロピレン、 フレーム:スチール+溶融亜鉛メッキ、その他:ステンレス

※HK-8100J-S1/S2/S3/S4、HK-8100-S1/S2/S3/S4には搬送車(RA-8100)が含まれます。

〈標準付属品〉			
浴槽洗浄剤	SA-1	1本	
ビューラックス-S 600ml	PLS-600	1本	
取扱説明書		1部	
入浴事故防止ラベル		1枚	
安全ラベル(大)		1枚	
〈機能・性能〉			
給湯スロースタート機能	タンク・浴槽湯温表示		
自動貯湯/適正水位停止機能	報知音		
入浴時間表示/報知機能	異常貯湯温度排出機能		
急速貯湯機能	異常貯湯温度停止機能		
急速給湯/排水機能	異常給湯温度停止機能		
ハンドシャワー1基	異常シャワー温度注意・停止機能		

トウッティ HK-8100/8150


消耗品



	品 名	品番	数量	価 格	
01	ろ過フィルター	HK775-009	1個	¥18,000(税別)	※
02	排水栓	HK8100-004	1個	¥15,000(税別)	
03	浴槽洗浄剤	SA-1	4本セット	¥12,000(税別)	
04	シャワーヘッド	HK3100-017	1基	¥7,200(税別)	
05	ビューラックス-S 600ml	PLS-600	1本	¥750(税別)	(軽減税率対象商品)
06	ビューラックス-S 1800ml	PLS-1800	1本	¥1,450(税別)	(軽減税率対象商品)※
	パッキン(フィルター用)	HK775-011	1個	¥300(税別)	※
	パッキン(フィルターハウジング用)	HK775-012	1個	¥400(税別)	※

(※)はHK-8150のみ

オプション

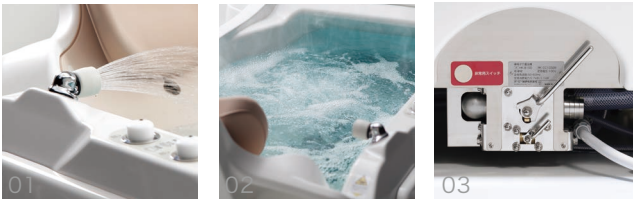

	品 名	品番	数量	価 格
01	肩掛けシャワーセット	HK8100-001	1セット	¥200,000(税別)
02	噴流セット	HK8100-002	1セット	¥250,000(税別)
03	停電時対応セット	HK8100-003	1セット	¥250,000(税別)

※オプション商品を追加で取り付けの際は、別途弊社担当者までお問い合わせください。

カラーバリエーション

				※ボディカラーは4色ご用意しております。 ホワイト(標準カラー)以外は受注生産のため別途実費として¥90,000(税別)を申し受けます。
ホワイト (標準カラー)	ピンク CPK	ブルー CBU	グリーン CGN	例 HK-8100JCPK-S1 製品番号 カラー 付帯機能

周辺機器



イージーグライドM

KZ-A29036 ¥30,000 (税別)

移乗先との間を橋渡しするように設置することで、座位のままお尻を滑らせて移乗できます。

寸 法	330(W)×600(D)mm
-----	-----------------

仕様 [RA-8100]



搬送車

RA-8100 ¥2,100,000(税別)

型番	RA-8100
外形寸法	1220(L)×740(W)×1280(H)mm (搬送姿勢) 760(L)×740(W)×1280(H)mm (移乗姿勢) 1380(L)×740(W)×1130(H)mm (入浴姿勢)
質量	47kg
主な材質	バックレスト、シート、レッグレスト、サイドフェンス：ポリプロピレン フレーム、搬送用取っ手：ステンレス
機能・性能	バランスチルト・スライド式枕・ ワンタッチ収納式レッグレスト・開閉式サイドフェンス・ 安全ベルト(腰部、胸部、足部(オプション))

〈標準付属品〉			
マット外し	RA735-001	1個	

消耗品・オプション [RA-8100]



01 02 03 04 05 06




07 08 09 10 11


※スポンジマット交換の際には、合わせて、クリップ、クリップボタンの交換もお勧めします。

	品名	品番	数量	価格
01	スポンジマット	RA8100-003	1枚	¥28,000(税別)
02	スポンジマット(踵部)	RA8250-005	1枚	¥7,000(税別)
03	安全ベルト(腰部)	RA825-001	1本	¥7,500(税別)
04	安全ベルト(胸部)	RA825-009	1本	¥9,000(税別)
05	パッド	RA355-015	1枚	¥5,700(税別)
06	ヘッドレスト	RA355-014	1個	¥35,000(税別)
07	クリップボタン(10個)	RA355-022	1セット	¥4,000(税別)
08	クリップ(10個)	RA825-010	1セット	¥1,200(税別)
09	マット外し	RA735-001	1個	¥1,900(税別)
10	固定用バックル	IB50SA-BK	1個	¥700(税別)
11	安全ベルト(足部)	RA825-002	1組	¥7,000(税別)

設置工事図

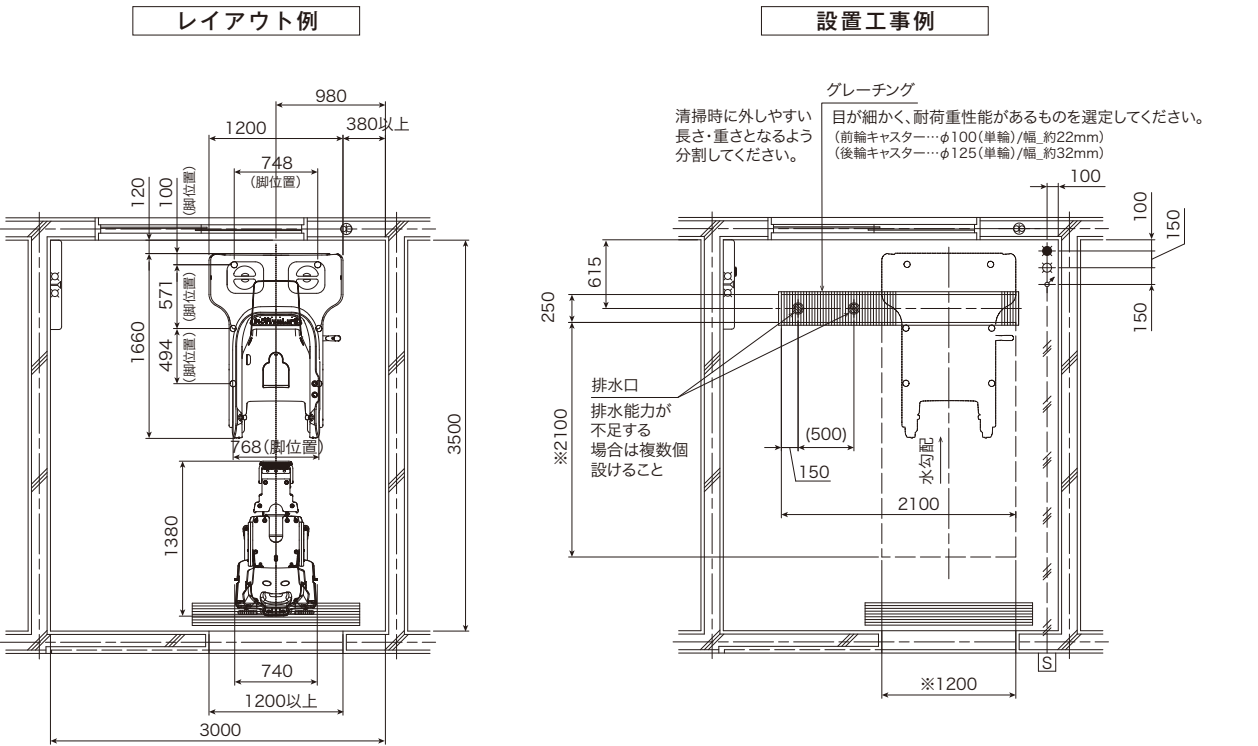

設置条件	
給湯 給水送り 配管	サイズ…20A、止水バルブ止め。床からの立ち上げ代…100mm 150～300kPa(同圧となるようにすること) 給湯・給水圧が300kPaを超える場合は、止水バルブに減圧弁を入れ、 150～300kPaに減圧すること。 給湯・給水流量…各40L/min以上、給湯温度…55～70℃(末端温度)
電源	単相100V、50/60Hz、20A 漏電遮断器…単相100V、20A(感度電流：30mA) (配電盤には単独の漏電遮断器を設けること) 開閉器…単相100V、20A(浴室外のすぐに操作できる位置へ設けること) アース線はD種の規定に準ずること。
電線	電線…単線1.6mmまたは、より線2.0mm ² ×3芯以上 (内線規程、敷設状況に応じて適切に選定すること)
PF管	床面より300mm立ち上げ通線し、電線は管端より1000mm以上出す。 PF管の端末は防水処理を施すこと。
水勾配	[]で示した範囲は、水勾配1/100以下し、 同一勾配とする。(※部寸法)
排水	ピット排水(溝の深さは200mm以上)、溝内に排水口を設けること。 トラップ等の防臭対策を実施し、排水能力300L/min以上確保のこと。
ボイラー能力	100,000kcal/h(ボイラー号数：67号相当)以上のこと。 指定したボイラーの能力以下の場合、給水温によっては、 貯湯時間とシャワー吐出量に支障が生じる場合があります。 (※電気給湯器使用時は入浴回数によって異なる為、別途問い合わせ必要)

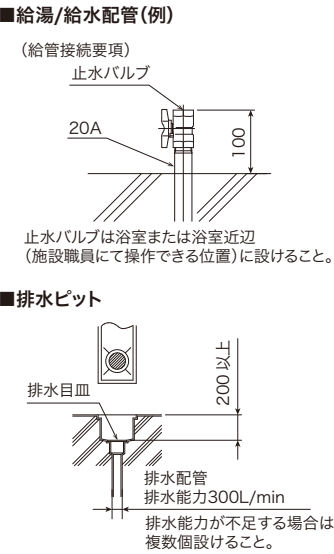

SIAAマークは、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

使用抗菌剤の種類 … 無機抗菌剤
加工方法 …… 練込
加工部位 …… マット
登録番号 …… JP0123356X0001C