

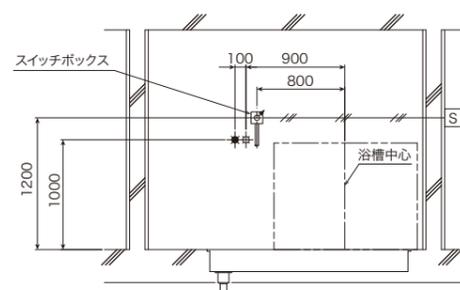


設置工事図



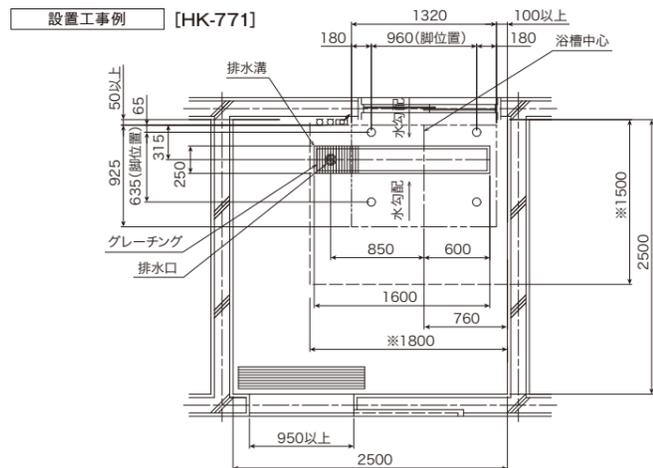


[HK-771/775]

■給湯・給水配管(例)

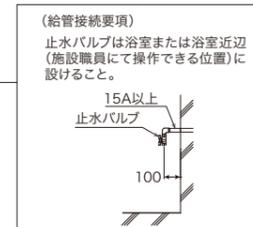

■排水溝

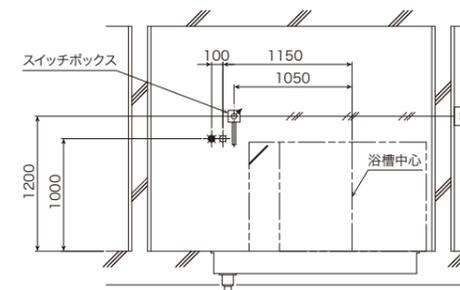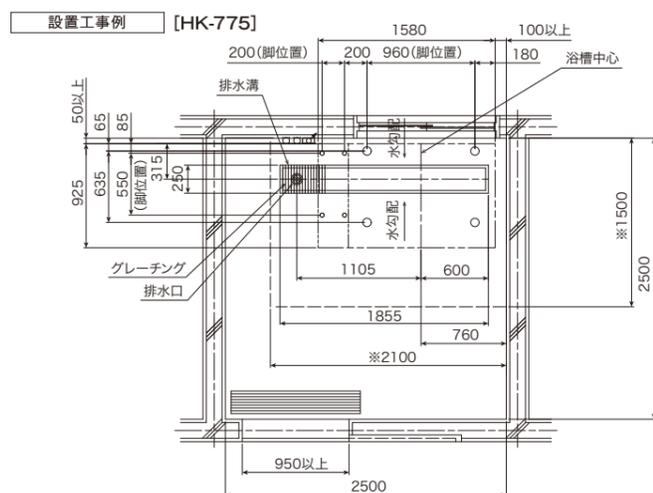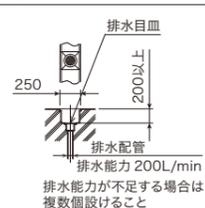

設置条件	
給湯 給水送り 配管	<p>サイズ…15A、止水バルブ止め。 (止水バルブ向きは設置工事図を参照のこと) 壁からの出し代…100mm 給湯・給水圧…150~300kPa(同圧となるようにすること) 給湯・給水圧が300kPaを超える場合は、止水バルブに減圧弁を入れ、 150~300kPaに減圧すること。 給湯・給水流量…各20L/min以上、給湯温度…55~80°C(末端温度)</p>
電源	<p>単相100V、50/60Hz、20A 漏電遮断器…単相100V、20A(感度電流:30mA) (配電盤には単独の漏電遮断器を設けること) 開閉器…単相100V、20A(FL+1500mm以上) (浴室外のすぐに操作できる位置へ設けること) アース線はD種の規定に準ずること。</p>
電線	<p>電線…単線1.6mmまたは、より線2.0mm²×3芯以上 (内線規程、敷設状況に応じて適切に選定すること) 壁面スイッチボックス出しのこと。</p>
水勾配	<p>□で示した範囲は、1/100以下の水勾配とし、 同一勾配とする。(※部寸法)</p>
排水	<p>ピット排水(溝の深さは200mm以上)、溝内に排水口を設けること。 トラップ等の防臭対策を実施し、排水能力200L/min以上確保のこと。</p>
ボイラー能力	<p>90,000kcal/h(ボイラー号数:60号相当)以上のこと。 指定したボイラーの能力以下の場合、給水温によっては、 貯湯時間とシャワー吐出量に支障が生じる場合があります。 (※電気給湯器使用時は入浴回数によって異なる為、別途問い合わせ必要)</p>

物理療法機器・リハビリ機器・介護用入浴器

OG Wellness オージー・技研株式会社 オージーウエルネス 検索
Wellness and Beyond

[平日受付コールセンター]

0120-01-7181

受付時間 / 9:00~17:00

[休日受付コールセンター] ○休日専用/土・日・祝・年末年始

0120-33-7181

受付時間 / 9:00~17:00

北日本支店(宮城・山形・福島)

札幌営業所(北海道)

盛岡営業所(岩手・青森・秋田)

北関東支店(埼玉・群馬・栃木・茨城)

新潟営業所(新潟)

南関東支店(東京・山梨)

横浜営業所(神奈川県)

千葉営業所(千葉)

中部支店(愛知・岐阜・三重・静岡・長野)

金沢営業所(石川・富山・福井)

関西支店(大阪・京都・滋賀・奈良・和歌山)

神戸営業所(兵庫)

中四国支店(岡山・鳥取)

広島営業所(広島・島根・山口)

高松営業所(香川・愛媛・徳島・高知)

九州支店(福岡・大分・熊本・長崎・佐賀・沖縄)

鹿児島営業所(鹿児島・宮崎)

岡山本社

〒703-8261 岡山県岡山市中区海吉1835-7

東京本社

〒100-6004 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング4階

取扱店

OG Wellness
Wellness and Beyond



Volante

ボランテ・ボランテエコ

HK-771・HK-775

○表示の価格等は物価変動等により変更する場合があります。また、本カタログの記載価格は消費税抜きであり、消費税非課税物品につきましては、価格の後に「非課税」と記述しています。
○印刷インク等の都合上、記載写真と現品の色が多少異なる場合がありますのでご了承ください。○仕様および外観等は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

本カタログの記載内容は2025年4月現在のものです。

S48_2503_847B

1 椅子に腰掛ける感覚でスムーズに浴槽へ入浴者も介助者も安全・安心・快適

転倒のリスクを未然に防ぐ昇降式ドア



椅子に腰掛ける感覚で浴槽に移乗。

Step1
浴槽の縁をまたがず椅子感覚で移乗して入浴
浴槽前面の電動ドアが昇降するため、浴槽の縁をまたぐ動作は必要ありません。直接、またはシャワーチェアを利用することで、椅子に腰掛けるように簡単に移乗がおこなえます。



車椅子の高さに近づけているので移乗もラク。

Step2
負担の少ない広い座面
浴槽内の座面部は広く、膝関節に拘縮が見られる方の乗り降り負担を軽くしています。



ドアが上昇してから70秒程度で給湯完了。

Step3
安全でスムーズな入浴・介助をサポート
入浴者と介助者の視線が近く、無理のない視線で安心感のある入浴ができます。ドアの昇降は15秒程度、給湯・排水は70秒程度で、スムーズな入浴がおこなえます。

操作パネル

操作パネルは入浴時間表示機能を搭載。長時間の入浴は、アラームでお知らせするので安心です。また湯温や入浴時間を確認しやすいため、浴槽のセンターに操作パネルを配置しました。



操作パネル
入浴時間表示/報知音

リモコン



リモコンを標準装備。ドア昇降や入退浴操作はリモコンでもおこなえるため、操作しながらの入浴介助が安全におこなえます。

ラクに乗り降り



浴槽内の座面部は1000mm。床から座面までの高さは車いすと同じ位の450mmなので、ラクに移乗。介助者も腰をかがめる必要がなく、負担が軽減できます。

しっかり握れる手すり



跳ね上げ式のスライド手すりを装備。手すりをスライド調整することで、体型や入浴姿勢の違い、移乗時のサポートにも幅広く対応します。


丸みのある背もたれ



浴槽の背もたれ部分を丸みのある形状にカット。入浴姿勢が安定するため、安心して入浴ができます。

2 2×2mの小さなスペースにも設置可能 スマートなデザインのコンパクト設計

小さな浴室に設置可能

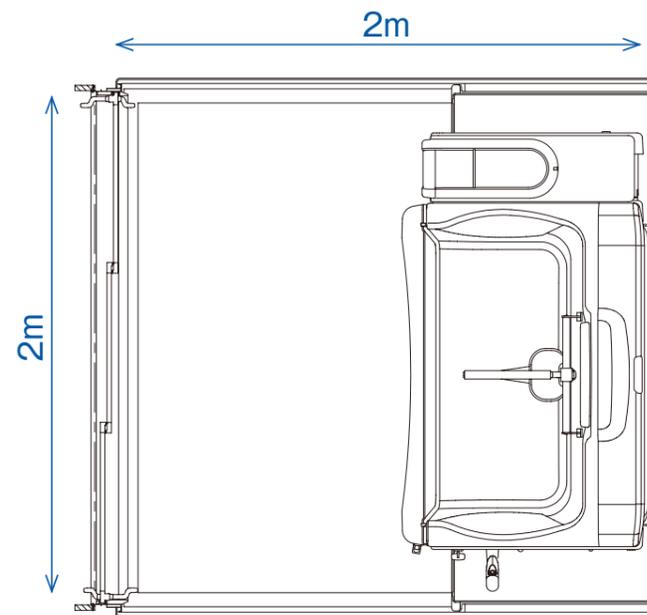

コンパクトな設計で、大きな空間を必要としないため、居住系施設・小規模施設へ簡単に設置可能です。ユニットバスにも設置できるため、防水工事が困難な場合も最適。幅広くさまざまな施設での利用が可能です。



設置例:パナソニックハウジングソリューションズ株式会社
アクアハートa-U シリーズ
※HK-775/771 共通

3 少ない湯量でコストを削減 いつでもきれいなお湯で快適入浴

新湯式



ボランテ HK-771

一人ひとり新しいお湯で入浴 [HK-771のみ]

一人ひとりの入浴ごとにきれいなお湯を入れ替える新湯式を採用。入浴と同時に貯湯を開始するので効率的な入浴補助ローテーションが可能です。

スピード給湯・排水 (約70秒)

急速給湯機能と急速排水機能の採用により、クラス最短の給湯・排水時間を実現。大型排水管の採用により、失禁時の排水も約70秒で完了。効率的な入浴がおこなえます。

少ない湯量で経済的

ひとり当たりの実使用湯量は約170L。一般家庭用の浴槽と比較しても100L程度少なく、衛生的な入浴が経済的におこなえます。

循環式



ボランテエコ HK-775

お湯を循環させるので経済的 [HK-775のみ]

ボランテエコの「エコ」は、「エコロジー」「エコノミー」のエコ。入浴後のお湯をスピーディに循環しながらろ過・殺菌をおこない、新湯を約30L追加するだけで、循環式で光熱費を約80%カットできます。施設にも環境にもやさしい経済的な浴槽です。

仕様



6年保証

〈機能・性能〉	
給湯スロースタート機能	非常時退浴機 (HK-771B)
自動貯湯機能	リモコン
操作ロック機能	ハンドシャワー (1本)
入浴時間表示/報知機能	異常貯湯温度排出機能
急速貯湯機能	異常給湯温度排出機能
急速給湯/排水機能	ドアはさみ込み停止機能
スライド手すり	ドア過負荷停止機能

ボランテ (新湯式)

HK-771 ¥4,250,000 (税別)
 HK-771B (HK-771+非常時退浴機能) ¥4,450,000 (税別)

電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	0.8kVA (50Hz)、1.0kVA (60Hz)
外形寸法	1320(L)×925(W)×1010(H)mm
浴槽内寸法	1220(L)×580(W)×445(H)mm
質量	170kg (入浴時間約70秒)
主な材質	浴槽、外装/FRP、フレーム/スチール+溶融亜鉛メッキ 主要部品/ステンレス

〈標準付属品〉			
吸盤式シャワーフック	HK775-013	1個	
ピューラックス-S 600ml	PLS-600	1本	
浴槽洗浄剤	SA-1	1本	
取扱説明書		1部	
入浴事故防止ラベル		1枚	
安全ラベル(大)		1枚	

ボランテエコ (循環式)

HK-775 ¥5,500,000 (税別)
 HK-775B (HK-775+非常時退浴機能) ¥5,700,000 (税別)

電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	0.8kVA (50Hz) 1.0kVA (60Hz)
外形寸法	1580(L)×925(W)×1010(H)mm
浴槽内寸法	1220(L)×580(W)×445(H)mm
質量	210kg
主な材質	浴槽、外装/FRP、フレーム:スチール+溶融亜鉛メッキ 主要部品/ステンレス

〈標準付属品〉			
吸盤式シャワーフック	HK775-013	1個	
ピューラックス-S 600ml	PLS-600	1本	
浴槽洗浄剤	SA-1	1本	
薬液ボトル	HK775-010	1本	
取扱説明書		1部	
入浴事故防止ラベル		1枚	
安全ラベル(大)		1枚	

※その他の仕様は、HK-771と同じです。

〈機能・性能〉	
給湯スロースタート機能	急速給湯/排水機能
自動貯湯機能	スライド手すり
操作ロック機能	非常時退浴機 (HK-775B)
ろ過フィルター自動洗浄機能	リモコン
ろ過/薬液殺菌機能	ハンドシャワー (1本)
塩素濃度切替機能	異常貯湯温度排出機能
浴槽排水機能	異常給湯温度排出機能
入浴時間表示/報知機能	ドアはさみ込み停止機能
急速貯湯機能	ドア過負荷停止機能

消耗品



品名	品番	数量	価格	
01 ろ過フィルター	HK775-009	1個	¥18,000(税別)	「HK-775」のみ
02 薬液ボトル	HK775-010	1本	¥2,500(税別)	「HK-775」のみ
03 浴槽洗浄剤	SA-1	4本セット	¥12,000(税別)	
04 シャワーヘッド	HK3100-017	1基	¥7,200(税別)	
05 ピューラックス-S 600ml	PLS-600	1本	¥750(税別)	(軽減税率対象商品)
06 吸盤	HK775-006	1個	¥400(税別)	
07 安全ベルト	HK775-008	1本	¥6,000(税別)	
08 パッド	RA355-015	1枚	¥5,700(税別)	
09 吸盤式シャワーフック	HK775-013	1個	¥1,700(税別)	
10 安全ベルトセット	HK775-018	1セット	¥13,000(税別)	
11 移乗シート	HK775-001	1個	¥90,000(税別)	
12 背中クッション(クリップ込み)	HK775-019	1個	¥13,000(税別)	
13 足止めクッション(クリップ込み)	HK775-020	1個	¥12,000(税別)	
パッキン(ハウジング用)	HK775-012	1個	¥400(税別)	「HK-775」のみ
パッキン(フィルター用)	HK775-011	1個	¥300(税別)	「HK-775」のみ

オプション



品名	品番	数量	価格	
01 背中マット	HK775-016	1枚	¥45,000(税別)	※安全ベルトセットはついていません。
02 安全ベルトセット	HK775-018	1セット	¥13,000(税別)	
03 移乗シート	HK775-001	1個	¥90,000(税別)	
04 足止めマット	HK775-017	1枚	¥36,000(税別)	
05 シャワーチェア	UC-1166	1個	¥143,100(税別)	