


車いすの各部名称

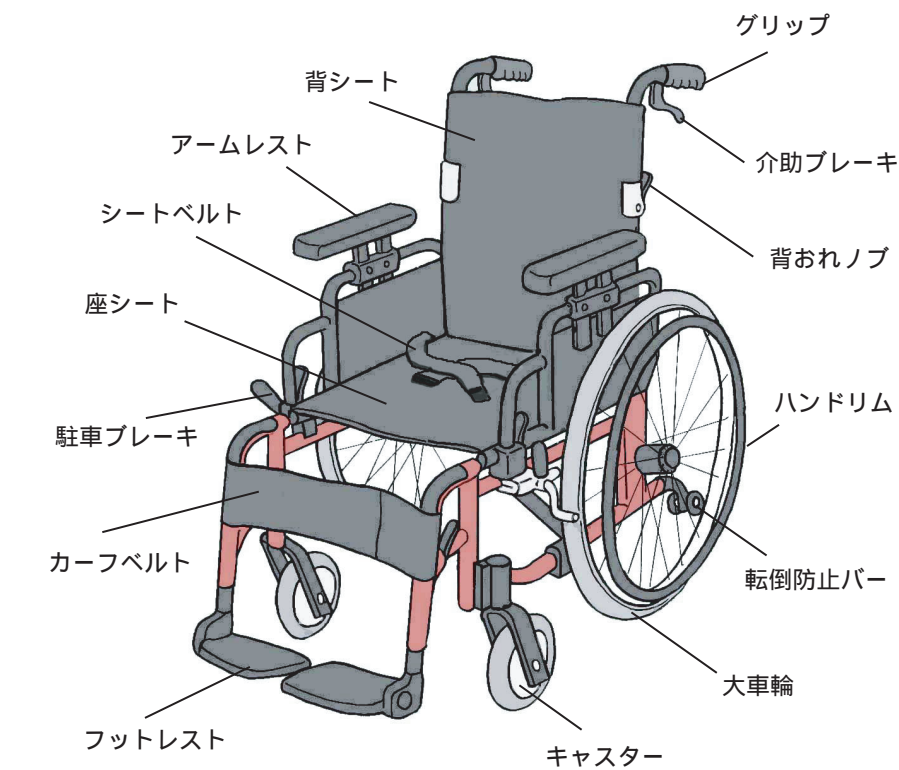

車いす仕様

品名	イーウイング	大車輪	22 " or 16 "エアータイヤ
品番	EW2200	カスター	6 " ソリッドタイヤ
バックレスト	背おれ式	全長×全高×全幅	102×88×61cm
アームレスト	高さ調整・跳ね上げ式	前座高	41・43・45cm
フットレスト	開閉・脱着式	後座高	38・40・42cm
フレーム	アルミ軽合金	座幅×奥行	38・40・42×42cm
シート	ポリエステル	重量	15.8kg・大車輪22 "装着時
付属品	杖ホルダー・転倒防止バー	最大積載量	75kg

11. 大車輪の脱着方法




大車輪の中心にあるクイックリリース・ボタンを指で強く押して下さい。そのまま軽く手前に引くと大車輪が外れます。

元に戻す場合は、再度クイックリリース・ボタンを親指で押しながら、大車輪を車軸穴に入れ奥まで押し込んでボタンを離します。

⚠ 注意 大車輪のアクセル（車軸）は、必ず奥まで押し込み軸受けとの間に隙間がなく大車輪が固定していることを確認して下さい。

⚠ 介助走行の注意点

1 , 車いすに乗ったまま持ち上げるときは、介護者が車いすと平行に立ち、車いすの本体フレーム部分をしっかりと持ち、4～5人で支えながら行って下さい。このとき絶対にアームレストやフットレストは持たないで下さい。可動式ですので外れる危険があります。

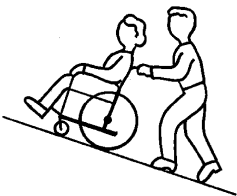

2 , 上り坂では、押し戻されないように体を少し前に倒しゆっくり押します。下り坂では、ブレーキを使いながら後ろ向きに一步步おりて下さい。



3 , 段差のある場所では、転倒防止バーを踏んでカスターを少し浮かして進み後輪を押し上げます。下りるときは逆の方法で後ろ向きに下ります。