


歩行車

品番 **KZ-324100**

取扱説明書

この度は、弊社製品をお買いあげいただきまして、ありがとうございます。
正しく安全にお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書をかならずお読みください。また、読まれたあとは大切に保管してください。
製品に関して不明な点や不都合なことがございましたら、ご購入販売店もしくは弊社お客様相談窓口へご連絡ください。

目次

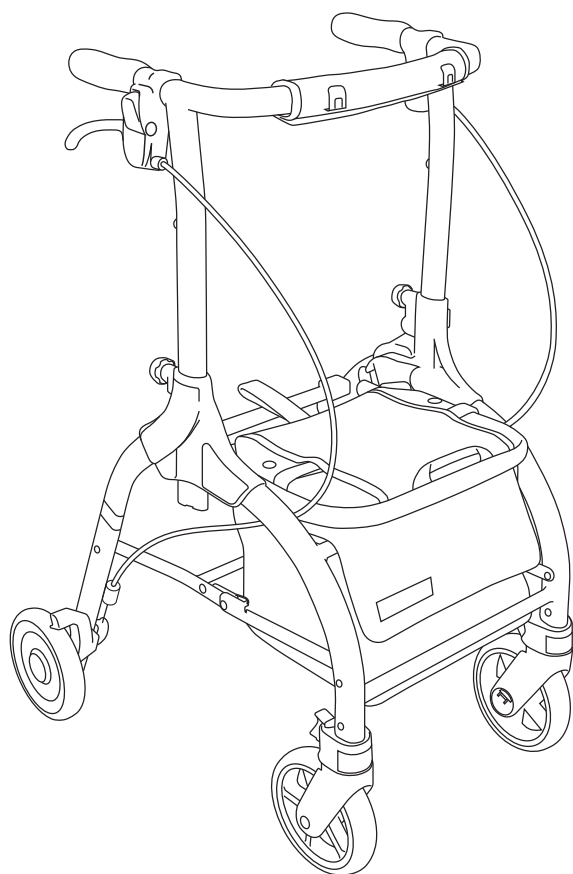

ご使用前の注意	1P
ご使用上の注意	2～3P
お手入れ方法	3P
保管方法	3P
各部の名称と製品仕様	4P
ハンドルフレームの取付方法	5P
車体の組み立て方・折りたたみ方	6P
グリップの使用方法	7P
ブレーキの使用方法	7P
座面の使用方法	8P
袋の使用方法	9P
荷物用フックの使用方法	9P
店内カゴの使用方法	10P
2WAYキャスターの使用方法	11P
杖立ての使用方法	11P
ブレーキの調整方法	12P
タイヤ交換時期確認方法	13P
故障かな？と思ったら	13P
保証書	14P
商品に関するお問い合わせ	15P

販売元

パラマウントベッド株式会社

〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号
TEL:03-3648-1111

製造元

株式会社 幸和製作所

転倒や事故防止のため、下記の事項をかならず守ってください。

ご使用前の注意

⚠ 警告 下記の場所では絶対に使用しないでください。

- バス・電車の中やエスカレータ。
- 雨・雪・凍結などで滑りやすい所。
- 悪路での使用。（石畳など車体に衝撃が加わりやすい場所）

⚠ 注意 誤った使い方をすると、人が傷害を負う可能性や物的損害が発生する可能性があるため、下記の項目をかならず守ってください。

- 組み立てる際は、周囲に人がいないことを確認してください。
- 組み立て、折りたたみおよび調節は確実に行ってください。また指などをはさまないように注意してください。
- ご使用前は各部を点検し、フレームや各部に亀裂・破損・変形などがある場合は使用しないでください。
- 各部を点検し、特にブレーキと駐車ブレーキの使用時に左右の後輪が確実に固定されていることを確認してください。
- ノブボルトは最後までしっかり締めて、ハンドルフレームが確実に固定されていることを確認してください。
- ブレーキを解除したときには、後輪がスムーズに回転することを確認してください。ブレーキ部品が後輪に干渉する場合はブレーキの調節をしてください。（「ブレーキの調節方法」参照）
- ネジなどのゆるみがないことを確認してください。
- タイヤおよびブレーキパッドに磨耗が無いことを確認し、必要に応じて交換などをしてください。交換する場合はご購入販売店もしくは弊社お客様相談窓口へ連絡してください。
- ご使用の際は、かならずご自身の体調を確認し、安全に使用できるかどうかを判断してください。体調によっては、転倒など思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 坂道・溝・段差のある所、砂・泥・水溜りのある所を通る場合は十分に注意してください。
- 交通量の多い所や混雑している所で使用する場合、また夜間に使用する場合は十分に注意してください。

転倒や事故防止のため、下記の事項をかならず守ってください。

ご使用上の注意



警告

誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性があるため、下記の項目をかならず守ってください。

歩行のとき

- グリップ以外の場所を持って歩行しないでください。
- グリップを片手で操作しないでください。
- グリップに寄りかかったり、荷物を吊り下げたりしないでください。車体だけが動いたり、転倒することがあり危険です。
- ハンドブレーキを使用するときは、左右同時にかけてください。
- 段差や溝などにつまずくと、転倒するおそれがありますので注意してください。また、段差に対して斜めに侵入しないでください。段差の手前ではかならず一旦止まり、十分注意して慎重に越えてください。

座面に関して

- 座面に座る際は、かならず座面を出した状態で座ってください。
- 座面に座る際は、かならず駐車ブレーキをかけ、左右の後輪が固定されていることを確認してください。
- 立ち座りの際は、車体が動かないことを確認してからゆっくりと身体を動かしてください。
- 最大使用者体重をかならず守ってください。
- 勢いよく座らないでください。車体に変形、破損することがあります。
- 車体を折りたたんだ状態で座らないでください。
- 座面に座る際は、身体をまっすぐ前に向けて座ってください。座面に対して斜め、または横向きに座るとバランスを崩し転倒するおそれがあります。
- 立ち座りの際に、グリップをご使用の際は、必ず両方のグリップを握ってください。片方のみによりかかると、転倒するおそれがあります。

- 分解・修理は弊社サービス員以外行わないでください。



注意

誤った使い方をすると、人が傷害を負う可能性や物的損害が発生する可能性があるため、下記の項目をかならず守ってください。

歩行のとき

- ハンドブレーキを握った状態、および駐車ブレーキがかかった状態で歩行しないでください。
- ブレーキは自動車のブレーキとは構造的に違いますので、過信しないでください。
- 坂道では駐車しないでください。坂道では、たとえ駐車ブレーキがかかった状態でも動く場合があります大変危険です。
- 踏切横断時は、踏切レールの隙間に注意し、路線に対して直角に横断してください。
- 座面に人を乗せたまま押さないでください。
- グリップに勢いよく負荷をかけないでください。
- ペットの散歩には使用しないでください。転倒など思わぬ事故につながるおそれがあります。



座面に関して	● 坂道などの斜面では座らないでください。 ● 浅く座らないでください。 ● 踏み台として使用しないでください。 ● 幼児、子供を座面上に立たせないでください。また、操作させないでください。
袋に関して	● 袋に 5.5kg 以上の重さの荷物を入れないでください。 ● 袋に荷物を入れたままで折りたたまないでください。 ● 袋の中に乳幼児を乗せないでください。 ● 袋の中に貴重品を入れたまま車体からはなれないでください。 ● 袋の中に鋭利な物を入れないでください。
店内カゴの利用に関して	● 店内カゴは底面が水平なものをご使用ください。 ● 店内カゴに 5kg 以上の荷物を入れないでください。 ● 店内カゴを載せた状態で車体を折りたたまないでください。 ● 店内カゴを載せた状態でグリップ高さの調節をしないでください。 ● 店内以外や傾斜・段差のある場所で、店内カゴを載せて歩行しないでください。 ● 荷物を載せる際は、勢いよく載せないでください。また、店内カゴ内中央付近に置き、端には載せないでください。 ● 店内カゴを載せる際は、店内カゴ固定用フックで固定してください。カゴが倒れることがあります。
荷物用フックに関して	● 荷物用フックに合計 2 kg 以上の荷物をかけないでください。 ● 荷物用フックに荷物をかけたまま折りたたまないでください。 ● 荷物用フックに荷物をかけたままグリップの高さの調節をしないでください。 ● 荷物用フックに荷物をかける際は、勢いよくかけないでください。 ● 車体からはみ出すような大きな荷物はかけないでください。 ● 荷物をかけた際、車体の操作性が少し変わったり、車体がふられることがあります。注意して歩行してください。


お手入れ方法

- 雨などで濡れたときは、乾いた布で拭き取ってください。泥やほこりがついたときは、水につけた布を固くしぼって拭き取り、その後乾いた布で拭いてください。
- 縫製品の汚れは、水につけた布を固くしぼって拭き取り、その後よく乾かしてください。
- 研磨剤入りのスポンジを絶対に使用しないでください。
- 塩素系洗剤・シンナー・クレゾール、アルコール類などは絶対に使用しないでください。劣化や色落ちをまねくことがあります。汚れがひどいときは、中性洗剤を使って拭き取り、その後乾いた布でよく拭き取ってください。

保管方法

- 屋内で保管してください。また、長期間使用しないときは、汚れを落としてから保管してください。
- 雨ざらしになる場所、また高温多湿な場所では保管しないでください。故障や変形の原因となります。
- 車体を倒した状態で、車体の上に荷物を重ねないでください。故障の原因となります。

各部の名称と製品仕様

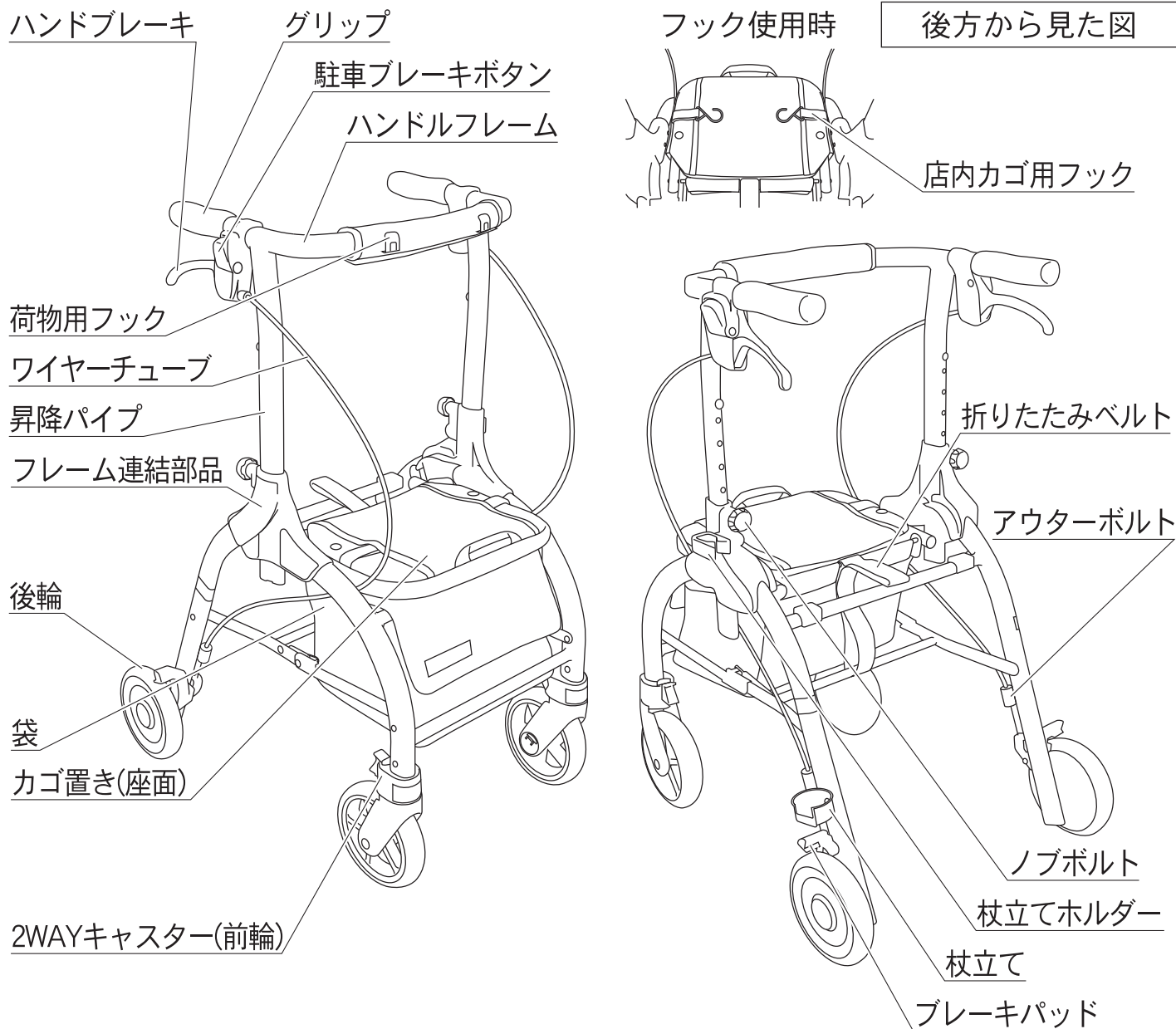


組み立て寸法	幅480×奥行600 ×高さ700～910 mm	重 量	5.2 kg
		最大使用者体重	80 kg
折りたたみ寸法	幅480×奥行370×高さ780 mm	袋の積載荷重	5.5 kg
押し手高さ	700～910 mm 8ポジション	荷物用フックの耐荷重	合計 2 kg
座面高さ	465 mm	本体材質	アルミニウム合金
座面寸法	幅295×奥行230 mm	車輪材質	ポリプロピレン・EVA樹脂
袋寸法	幅290×奥行195×高さ180 mm	座面材質	ナイロン
		袋材質	ナイロン

※各寸法、重量は参考数値です。


ハンドルフレームの取付方法

左右のノブボルトを反時計回りに回してゆるめてください。

ワイヤーチューブがねじれないように注意し、昇降パイプを左右のフレーム連結部品に差し込んでください。

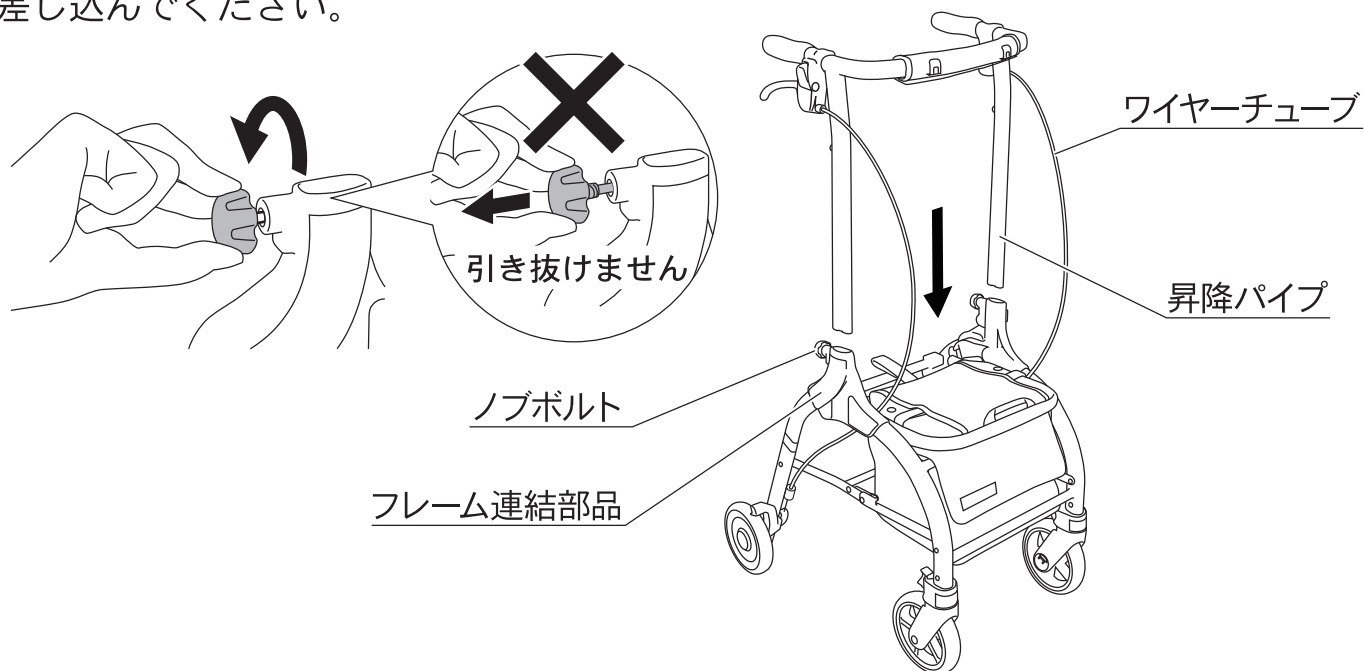

- 指などをはさまないように注意してください。
- 取り付ける際、ワイヤーチューブがねじれていないことを確認してください。

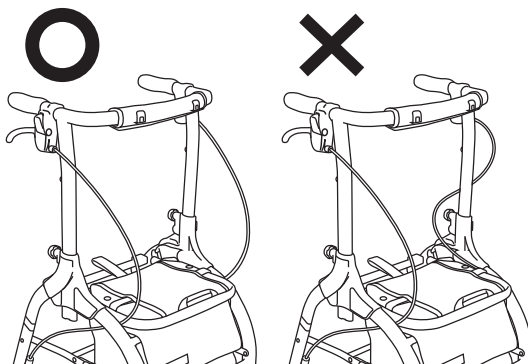


- ハンドルフレーム取り付け後、ワイヤーチューブがフレームやフレーム連結部品、カゴ置き(座面)等に引っかかっていることを確認してください。

⚠ 注意


ワイヤーチューブがハンドル昇降フレームの外側を通っている

引っかかり注意

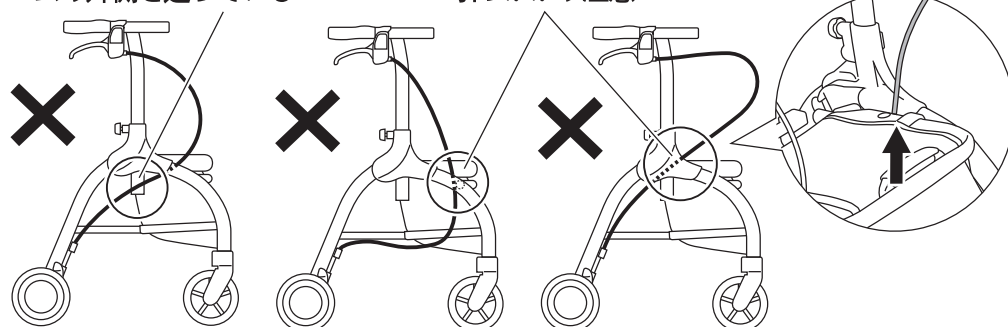


車体の組み立て方・折りたたみ方

【組み立て方】

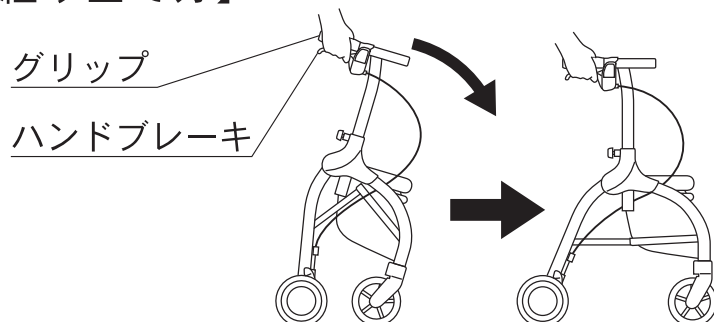

グリップとハンドブレーキを一緒に握り、そのまま車体を前方へ押し出すように動かしてください。
(※その際、体重をかけて車体に寄りかからないようにしてください。転倒のおそれがあり危険です。)

【折りたたみ方】

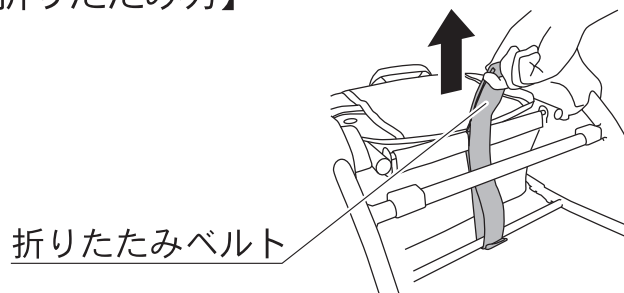


折りたたみベルトをまっすぐ上へ引きあげてください。

⚠ 注意

- 周囲に人がいないことを確認してから行ってください。
- 指などをはさまないように注意してください。
- 確実に組み立てられていることを確認してから使用してください。
- 店内カゴを載せた状態で、折りたたまないでください。
- 荷物用フックに荷物を掛けたまま折りたたまないでください。

【高さの調節方法】

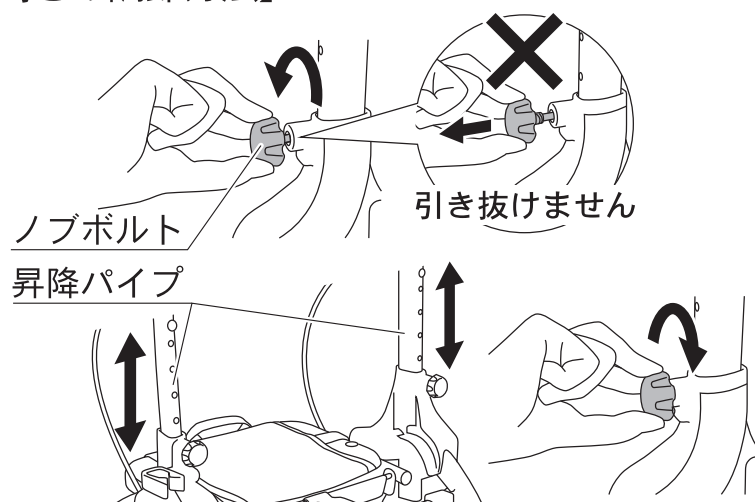


ノブボルトを反時計回りに回してください。
升降パイプを上下させお好みの高さに合わせてください。
ノブボルトを時計回りに最後まで回してしっかり固定してください。

⚠ 注意

- ノブボルトを最後までしっかり締めて、グリップが確実に固定されていることを確認してください。
- 高さ調節の際、勢いよくグリップを引き抜かないでください。
- ノブボルトは紛失防止の為、引き抜けなくなっています。勢いよく引っぱらないでください。
- かならずグリップ高さの最高値以下で使用してください。
- 高さ調節後、都度ブレーキの確認を行ってください。
- 指などをはさまないように注意してください。



グリップの使用方法

左右のグリップを握って、ゆっくり歩行してください。

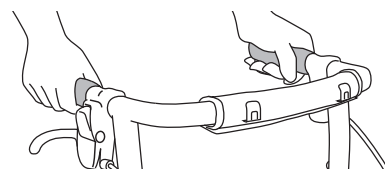

- グリップ以外の部分を握って使用しないでください。

⚠ 注意

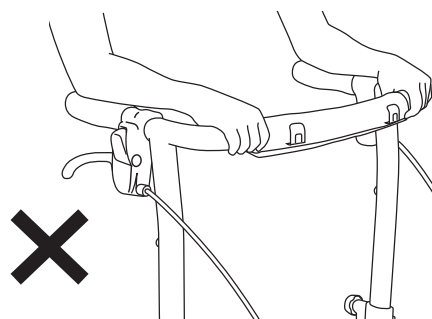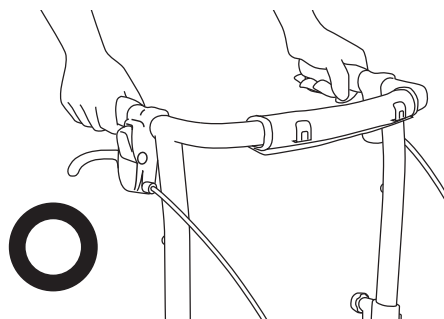

- 片手での操作はしないでください。バランスを崩し危険です。
- 歩行する際は駐車ブレーキが解除されていることを確認してください。


ブレーキの使用方法

【ハンドブレーキの使用方法】

グリップを持ちながら、左右のハンドブレーキを同時に握ってください。解除するときは指をはなしてください。

【駐車ブレーキの使用方法】

駐車ブレーキボタンを押すと、後輪が固定され駐車ブレーキがかかります。グリップとハンドブレーキを一緒に握ると解除されます。

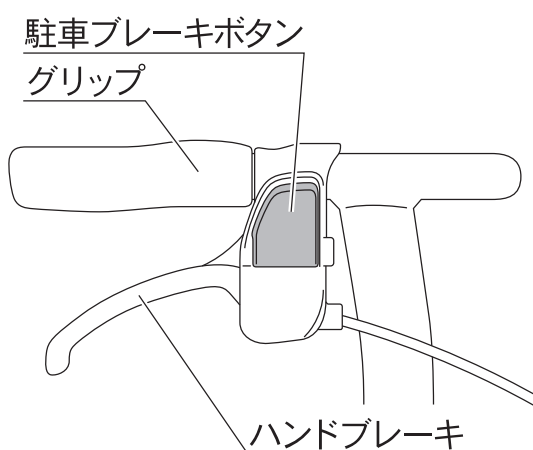

⚠ 注意

- 駐車ブレーキを使用する際は、かならず左右両側の駐車ブレーキボタンを押してください。片側のみでは制動力が不十分で危険です。
- 座面に座るとき、車体からはなれるときはかならず駐車ブレーキをかけ、左右の後輪が固定されていることを確認してください。
- 指などをはさまないように注意してください。


座面の使用方法

駐車ブレーキをかけ、左右の後輪が固定されていることを確認してください。

持ち手を矢印方向に引きあげ、座面を出してください。

左右の後輪がしっかり固定されていることを確かめてから、座面中央に座ってください。

座面を戻す際は、座面を持ちあげ袋の上にくるまで前方に倒してください。

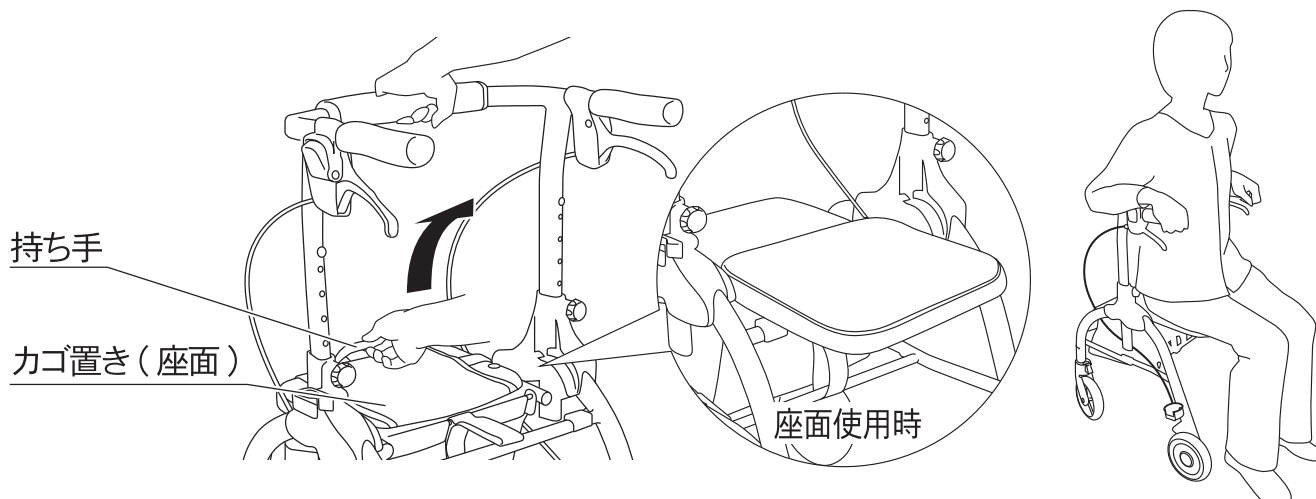


- 指などをはさまないように注意してください。
- 座面開閉時は、店内カゴ用フックを収納してください。




- 座面が出ていない状態では座らないでください。

⚠ 注意

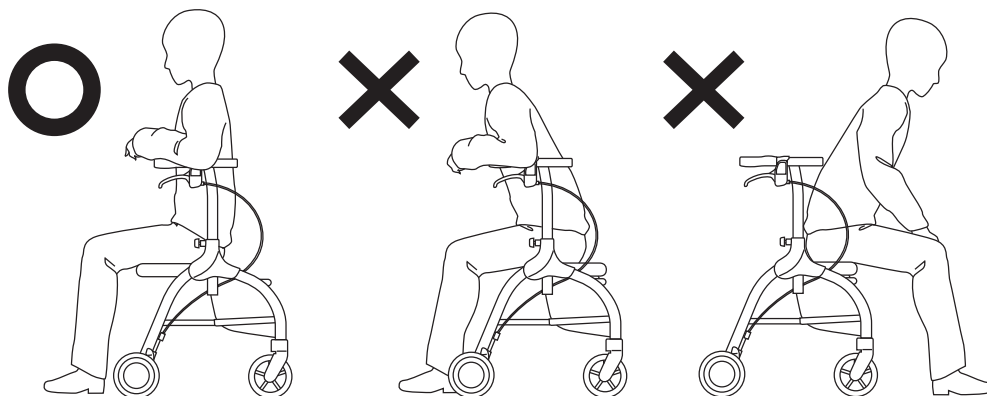


袋の使用方法

1 持ち手を矢印の方向に持ち上げ、座面を出してください。

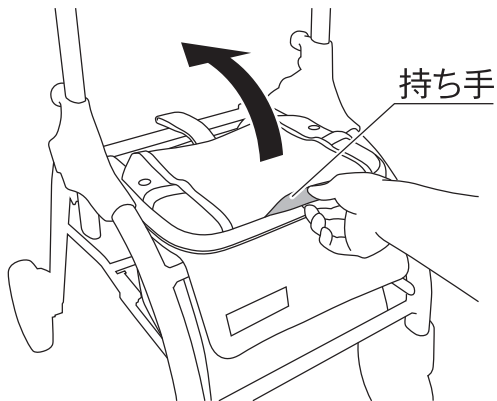

2 袋のフタをめくってください。

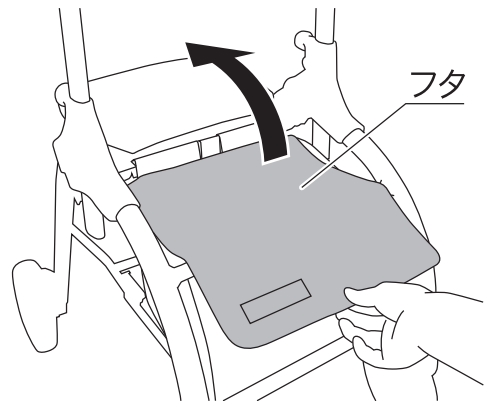


⚠ 注意 ● 指などをはさまないように注意してください。

荷物用フックの使用方法

荷物用フックに荷物をかけてください。



大きい荷物の場合は、荷物をかけたあとにカゴ置き（座面）の上に載せてください。

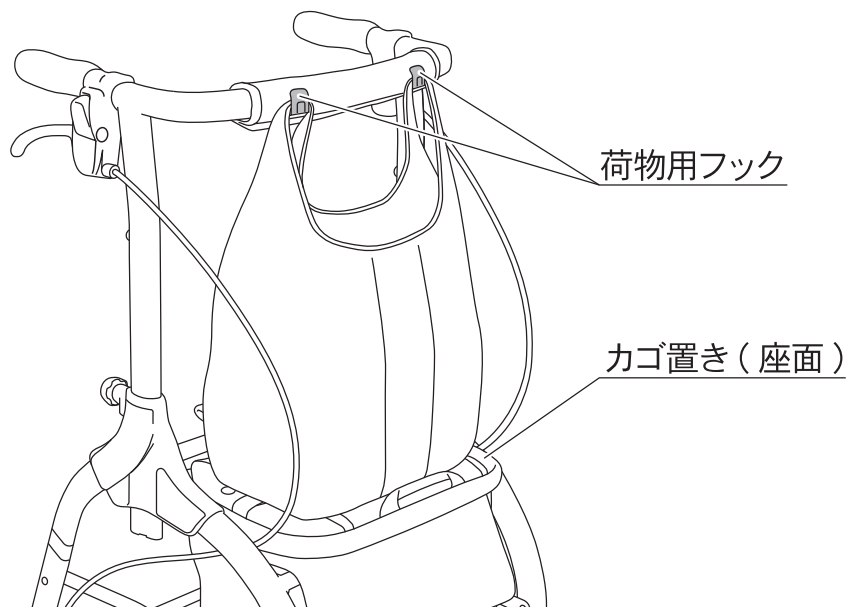

⚠ 注意 ● 荷物をかける際に、指などをはさまないように注意してください。
● 荷物をかける際は、勢いよくかけないでください。



店内カゴの使用法

- 1 店内カゴ用フックを出してください。
- 2 店内カゴを縦向きにゆっくりと設置してください。

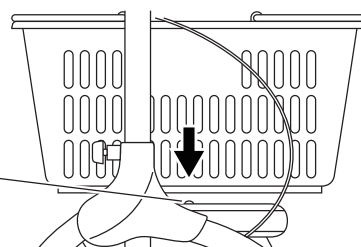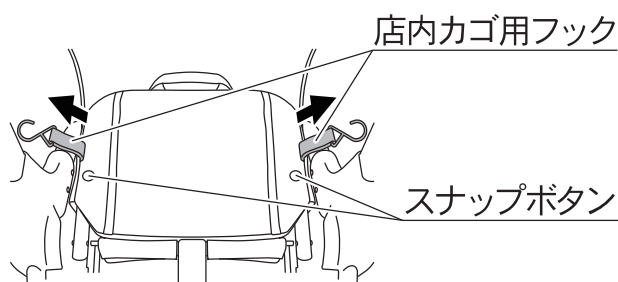


スナップボタンがカゴの中心にくる位置が設置目安です。

- 3 店内カゴ用フックを店内カゴ側面の中央付近に伸ばしながら引っかけてください。
- 4 お買い物後、店内カゴ用フックを収納してください。

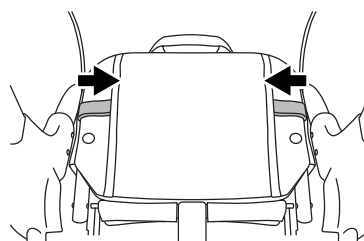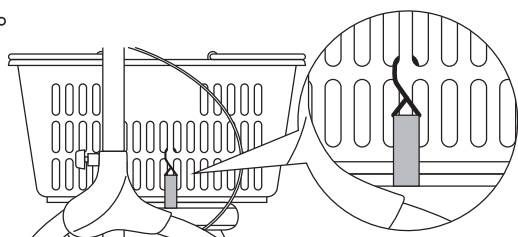


【適応店内カゴサイズ】

幅約 36cm× 底面の奥行約 42cm 以下
※店内カゴの大きさは参考数値です。
かならず店内カゴが安定して設置されていることを確認してご使用ください。

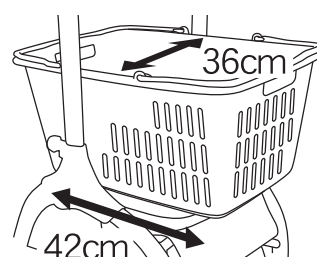

- 適応サイズ以外の店内カゴを載せないでください。
- 店内カゴを載せる際は、押し手高さを760mm以上に調節してください。
- 店内カゴ以外の物を載せたり台車として物品運搬などに使用しないでください。
- 店内カゴを載せる際は、勢いよく載せないでください。
- 荷物は店内カゴ中央付近に置き、端には載せないでください。また、重い荷物は立てずに寝かせて置いてください。

⚠ 注意

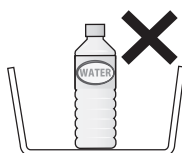

- 店内カゴを使用する際は店内カゴ用フックを掛けてください。また店内カゴ用フックは、店内カゴ側面の中央付近に引っかけてください。店内カゴが倒れることがあります。
- お買い物後、店内カゴ用フックを収納してください。座面使用時や袋使用時に引っかかることがあります。
- 店内カゴ用フックは店内カゴの固定以外の用途には使用しないでください。


2WAYキャスターの使用法

前輪の動き方を、お好みに合わせて2段階に設定していただけます。
キャスターボタン、キャスターストッパーを操作し設定してください。

回転角度120度

キャスターボタンを押し、キャスターストッパーをおろす。


キャスターボタン

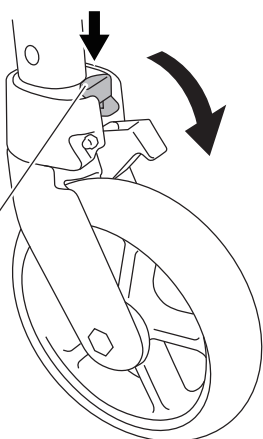

回転角度360度

キャスターストッパーを持ちあげ固定する。

キャスターストッパー

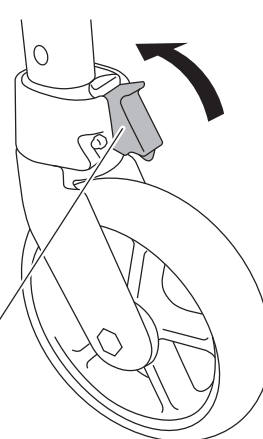

⚠ 注意

- 左右の前輪のキャスターストッパーが同じ位置にあることをかならず確認してください。
- 指などをはさまないように注意してください。

杖立ての使用法


【杖立てへの取り付け方】

取り付け可能な杖は外径 16 ~ 22mm の杖です。

- ①杖立てに杖の足ゴム部分を置いてください。
- ②杖立てホルダーに杖を取り付けてください。

杖立てホルダーへの取り付けは右図の様に、杖立てホルダーの挿入部分から杖を押し入れてください。

挿入部分

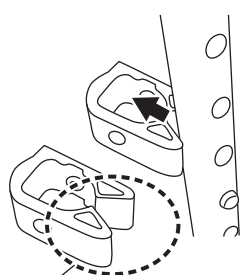


杖立てホルダー

②取り付ける


杖立て

①置く

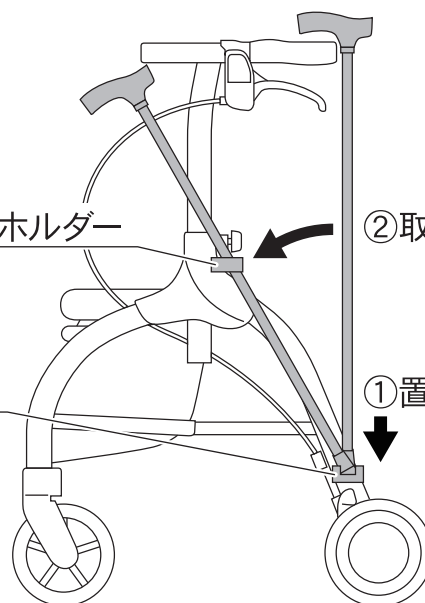

⚠ 注意

- 杖が確実に杖立てホルダーの中に入っていることを確認してください。
- 杖立てホルダーに操作方向以外の方向に力を加えるなど無理な操作はしないでください。

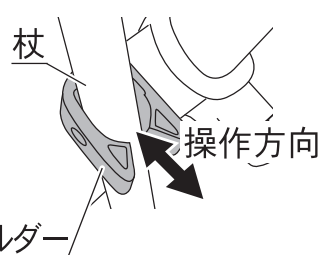

杖立てホルダー

【取りはずし方】


取り付け方の逆の手順で取りはずしてください。

ブレーキの調節方法

駐車ブレーキやハンドブレーキの効き方に不都合があるときは、以下の手順で調節してください。アウターボルトは左右にあります。必要に応じてそれぞれ調節してください。


【駐車ブレーキがかからない場合の調節やブレーキパッドがタイヤにあたっている場合の調節方法】

- 1 駐車ブレーキボタンを押してください。
- 2 六角ナットを反時計回りの方向へ回して緩めてください。
- 3 アウターボルトを時計回りに回して、ブレーキ部品と後輪ホイールが当たる位置まで調節してください。
- 4 アウターボルトをおさえながら、六角ナットを時計回りの方向へ回して締めてください。

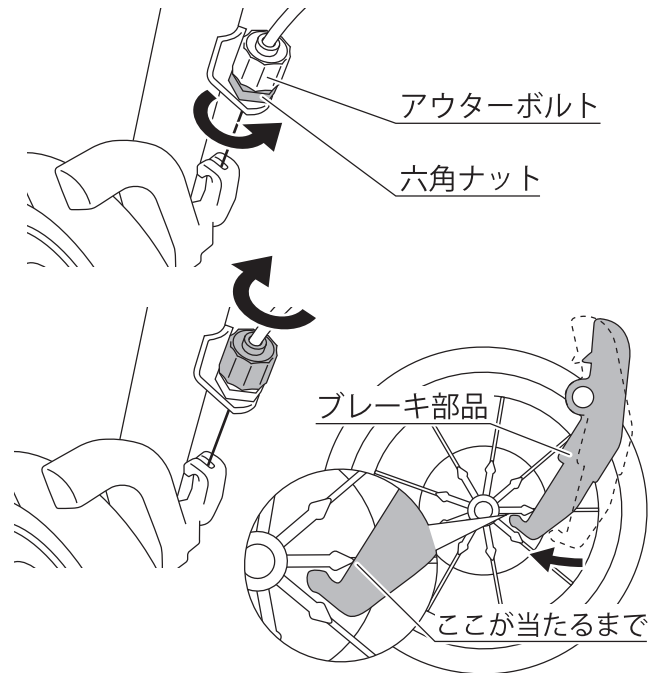

【駐車ブレーキが解除できない場合やブレーキ部品がホイールにあたる場合の調節方法】


- 1 ハンドブレーキを握り、駐車ブレーキを解除してください。
- 2 六角ナットを反時計回りの方向へ回して緩めてください。
- 3 アウターボルトを反時計回りに回して、ブレーキ部品と後輪ホイールとの隙間を 4～5 mmになる位置まで調節してください。
- 4 アウターボルトをおさえながら、六角ナットを時計回りの方向へ回して締めてください。

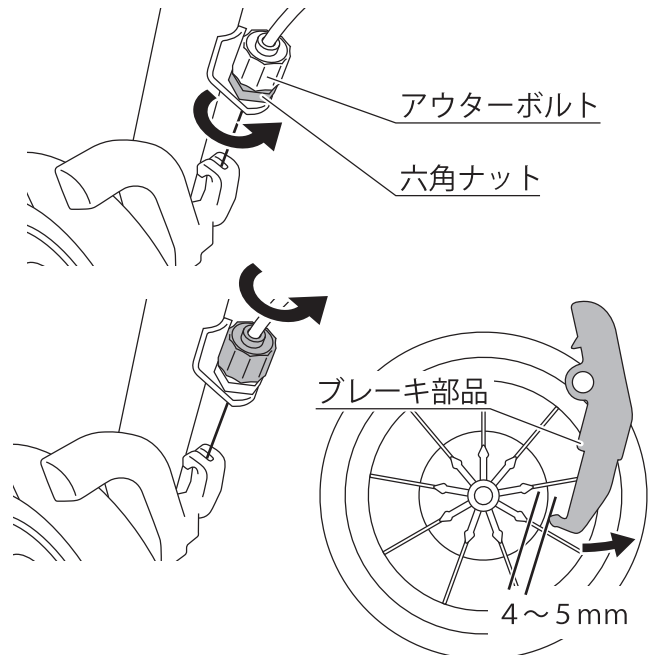

⚠ 注意

- かならずご使用のグリップ高さで調節を行ってください。
- 調節後、左右片側ずつ及び両側グリップの操作、ハンドブレーキの操作を行い、動作に問題がないことを確認してください。

タイヤの交換時期確認方法

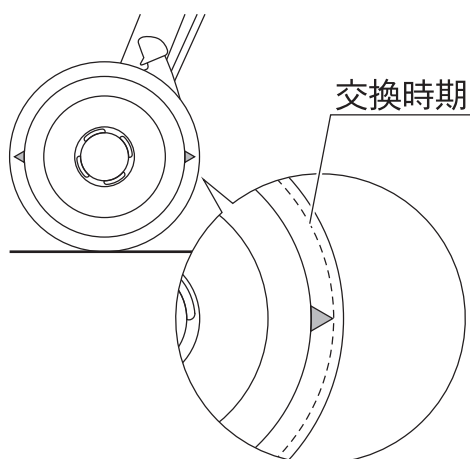

タイヤの側面には図のような△マークが付いています。△マークまでタイヤがすり減ったらタイヤの交換時期です。ご購入販売店もしくは弊社お客様相談窓口へご連絡ください。

(※タイヤは左右両方を交換してください。片方のみですと左右のブレーキの効きかたに差が生じる場合があります。また、すべてのタイヤが接地せず車体がたつく場合があります。)

故障かな？と思ったら



警告

誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性があるため、下記の項目をかならず守ってください。

- 異常がある場合は使用しないでください。
- 使用中に何か異常を感じたら直ちに使用を中止し、すぐにご購入販売店もしくは弊社お客様相談窓口へご連絡ください。
- 分解や改造はしないでください。分解・修理が必要なときはご購入販売店もしくは弊社お客様相談窓口へご連絡ください。

故障かな？と思うような現象が発生したら、修理を依頼する前にもう一度、下記の点を確認してください。

こんなとき	ここを確認	直し方
駐車ブレーキがかからない	駐車ブレーキをかけた際、後輪部のブレーキ部品が後輪ホイールから抜けていませんか？	12P のブレーキの調節方法をご確認いただき、ブレーキ部品の位置を調節してください。
駐車ブレーキが解除されない	駐車ブレーキを解除した際、後輪部のブレーキ部品が後輪ホイールに当たっていませんか？	
走行操作が重い	タイヤに髪の毛やほこりなどのゴミがはさまっていませんか？	はさまっているものを取り除いてください。
異音がする	ボルトやナットがゆるんでいませんか？	ボルトやナットがゆるんでいる場合はご購入販売店もしくは弊社お客様相談窓口へご連絡ください。
タイヤが大きく振れる		

上記の対処をしても良くならない場合、または現象に当てはまらない場合は、ご購入販売店もしくは弊社お客様相談窓口へご連絡ください。

保 証 書

お客さまの正常なご使用により万一不具合が発生した場合に、本書記載内容に従って無償修理いたします。かならず本保証書を製品と一緒にご提示ください。

1. この製品の保証期間はご購入いただきました日から1年間です。
2. ご贈答・ご転居などでお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合は弊社お客様相談窓口にお問い合わせください。
3. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
4. 保証期間内において、部品や付属品の不具合が発見された場合は無償修理させていただきます。
5. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
6. 本保証書は明示した条件や期間において、無償修理をお約束するものです。保証書によってお客さまの法律上の権限を規制するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は弊社お客様相談窓口にお問い合わせください。なお、製造が終了した製品については、修理必要部品の在庫がなくなった場合、修理ができないことがあります。

保証期間内でも下記の記載内容に該当する場合は無償修理対象外となり有償修理とさせていただきます。また、修理に要する送料などの諸経費はお客さまのご負担となります。

1. 保証書を紛失された場合、またはご提示が無い場合。
2. 本保証書の必要事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合。
3. お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障、または損傷が発生した場合。
4. 通常の使用で生じた部品の摩耗、疲労破損などの場合。
5. 特殊な場所での使用、目的外使用などによる故障、または損傷が発生した場合。
6. 弊社以外での修理または改造をされている場合。
7. お客さまの誤った方法によるご使用やお手入れによる場合。
8. 火災・地震・塩害・ガス害・風水害・落下・その他の天災地変により故障または損傷が発生した場合。

お客さまへ

- ・ この保証書をお受け取りになる時に、ご購入年月日、ご購入販売店名・住所が記載されていることをかならずご確認ください。
- ・ 修理期間につきましては、商品弊社到着後7日間を目安としておりますが、修理箇所、修理内容によりましてはさらに日数を要する場合があります。
あらかじめご了承くださいませ。

ご購入年月日

年 月 日

ご購入販売店名・住所（〒 ）

販売元

パラマウントベッド株式会社

〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号
TEL:03-3648-1111

製造元

株式会社 幸和製作所

商品に関するお問い合わせ 〈パラマウントベッド株式会社〉

本社	〒136-8670	東京都江東区東砂2丁目14番5号	☎ (03) 3648-1111 (大代)
東京支店	〒136-8670	東京都江東区東砂2丁目14番5号	☎ (03) 3648-1171 (代)
札幌支店	〒060-0062	札幌市中央区南2条西13丁目318番地11	☎ (011) 271-1181 (代)
仙台支店	〒984-0015	仙台市若林区卸町2丁目3番地の3	☎ (022) 239-5211 (代)
さいたま支店	〒336-0967	さいたま市緑区美園3丁目23番1	☎ (048) 878-0100 (代)
横浜支店	〒194-0004	東京都町田市鶴間5丁目3番33号	☎ (042) 795-8800 (代)
名古屋支店	〒461-0001	名古屋市東区泉1丁目20番17号	☎ (052) 963-0600 (代)
大阪支店	〒550-0001	大阪市西区土佐堀2丁目3番33号	☎ (06) 6443-8791 (代)
高松営業所	〒761-8031	高松市郷東町223番1	☎ (087) 881-8900 (代)
広島支店	〒733-0011	広島市西区横川町3丁目8番5号	☎ (082) 293-1311 (代)
福岡支店	〒812-0013	福岡市博多区博多駅東3丁目14番20号	☎ (092) 461-1131 (代)

製品の破棄方法

ご不用となった製品を処分される場合の廃棄方法につきましては、お住まいの自治体のルールに従ってください。