



商品名：YCO 両面マットレス
型式：YMR001-2R91V

はじめに

このたびは、介護保険レンタル対応 在宅介護用ベッド用マットレス「YCO 両面マットレス」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品は、在宅介護や療養生活を安全かつ快適にサポートするために開発された介護用途向けベッド用マットレスです。

ご使用前に本書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ご使用前のお願い

- この取扱説明書は、いつでも見られる状態にしておいてください。
- ベッドで療養される方だけでなく、操作を行う介助者の方も必ずお読みください。
- 改良などにより、本取扱説明書の内容が一部変更される場合があります。
- ご不明な点がありましたら、弊社または販売店までお問い合わせください。

目次

はじめに	1
ご使用前のお願い	1
目次	2
使用目的と特徴	3
安全上の注意	3
使用方法	4
各部の名称・本体寸法	エラー! ブックマークが定義されていません。
商品仕様	4
日常のお手入れ	5
洗浄・乾燥に関する注意	5
保管する際の注意	5
点検・交換の目安	5

使用目的と特徴

- ・本製品は、ベッド上で使用することを前提としたマットレスです。
- ・両面で異なる硬さとなっており、使用環境や使用者の状態に応じて快適にお使いいただけます。

安全上の注意

本製品を安全にご使用いただくため、必ず本章をお読みください。
以下の注意事項は、ご利用者および介助者の事故防止を目的としています。

1. 注意表示について

本書では、次の図記号で安全に関する事項を示します。

区分	アイコン	意味
禁止	⊘	重大事故や生命に関わる危険が発生する可能性がある項目
警告・注意	⚠	怪我・事故・物損の可能性がある項目

2. 使用前に必ず確認すること

- ⚠ マットレスに破れや大きなへたりがないことを確認してください。
- ⚠ カバーが正しく装着されていることを確認してください。
- ⚠ ベッド上に異物がないことを確認してください。
- ⚠ 異常がある場合は使用を中止してください。
- ⚠ 指定されていない製品との組み合わせは避けてください。
- ⚠ サイドレール上部からマットレス面までの幅は 22cm 以上確保してください。
- ⊘ 他のマットレスや布団等を重ねて使わないでください。

3. 使用上で注意すること

⚠ 使用時の体勢

- ・長時間同じ姿勢での使用は避け、必要に応じて体位調整を行ってください。

⚠ 電気毛布との併用

- ・電気毛布等を使用する場合は、温度設定に注意してください。
- ・マットレスの変質や火災の原因となります。

⚠ 各部の隙間

- ・ベッドやサイドレールとの隙間に、身体やチューブ等が入り込んで挟まれないよう注意してください。
- ・重大な事故を起こしたり、チューブが破損する恐れがあります。

4. 使用上の禁止事項

⊘ マットレス移動時

- ・人が乗った状態のまま、マットレスを移動させないでください。転落の事故を起こす危険性があります。
- ・無理に折り曲げたり、表面生地や内部材を強く引っ張らないでください。商品が破損する恐れがあります。

⊘ マットレス上での禁止行為

- ・マットレスの上で立ち上がったたり、飛び跳ねたりしないでください。
- ・乳幼児への使用は避けてください。

5. マットレス周辺の使用環境に関する注意

⊘ 火気・高熱器具の近くで使用しない

- ・ストーブや加湿器の吹出口付近、直射日光の強い環境では使用しないでください。
- ・変形・変色・火災の原因となります。

使用方法

- 本製品はベッドの上に直接敷いて使用してください。
- 表裏がある場合は、目的に応じて適切な面を上にしてください。
- マットレスの上に厚手の敷物を重ねすぎると、本来の性能を発揮できない場合があります。
- 背上げ機能付きベッドで使用する際は、姿勢や使用時間に配慮してください。

商品仕様





商品名・型式	YCO 両面マットレス (YMR001-2R91V)
寸法	長さ：191cm 幅：91cm 厚さ：10cm
硬さ	ハード面：224N ソフト面：185N
使用素材	カバー：ポリエステル 100% 本体：ポリウレタンフォーム
原産国	中国

日常のお手入れ

- 汚れが付着した場合は、早めに拭き取ってください。
- カバーが取り外して洗う場合は、表示に従って洗濯してください。
- 完全に乾燥させてから再使用してください。

洗浄・乾燥に関する注意

- こたつやヒーター等の高い温度のものや、火気には近づけないでください。
- 側地を取り外した状態、側地のファスナーが閉まりきってない状態では使用しないでください。
- 洗濯の際は側地のみ、本体（中わた）から取り外して洗濯してください。
- 側地は下図の表示に従って洗濯してください。

	ドライクリーニング禁止
	40°C（弱）で洗濯できる
	タンブル乾燥 60°C
	漂白剤使用可能

保管する際の注意

- △使用しない場合は、直射日光や高温多湿を避けて保管してください。
- △重い物を上に載せないでください。
- △長期保管後は、使用前に状態を確認してください。

点検・交換の目安

以下の状態が見られる場合は、交換をご検討ください。

- クッション材の著しいへたり
- 表面生地破損
- 使用時の違和感や不安定さ

● 誤った組立て・取付けや誤った使用方法、また無理な運転操作を行われた場合の事故や物損等につきまして、弊社は一切の責任を負いかねます。

● 製品に何らかの異常が発生した場合には、直ちに弊社にご連絡・ご相談ください。弊社に連絡・相談をなされないまま、使用を継続された場合、弊社は一切の補償を致しかねますので、予めご了承ください。

メモ



株式会社ヤマシタ
〒427-0103 静岡県島田市中河 737
電話番号 0547-38-3570