

Jフィットマットレス

取扱説明書

このたびはお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
正しく安全にご使用いただくために、この取扱説明書をよくお読みいただいた上でご使用ください。
この取扱説明書は、いつでもご覧いただけるように大切に保管していただくようお願い申し上げます。

使用目的

本製品は両面で硬さが異なるリバーシブル仕様になっております。ソフト面は体圧分散性を備えており、ご家庭や医療施設・高齢者施設などで療養される際に身体にかかる圧力を分散させることを目的に作られたマットレスです。ハード面は適度な柔らかさで身体をしっかり支えます。使用する方の状態や体型・好み・環境などにあわせて各面を使い分けることができます。

使用上の注意

⚠ 警 告

- 火または温度の高いものに近づけないでください。火災や火傷の原因となります。
- マットレスとベッド及び付属品の間に、身体や物がはさまれて怪我や破損する恐れがあります。
- ベッドの幅や長さに合わせたマットレスをご使用ください。
- 人を乗せた状態で本製品を移動させないでください。人が転落してけがをしたり、破損する恐れがあります。

⚠ 注 意

- 皮膚に反応性の充血など、圧迫による影響が見られないか状態を確認しながらお使いください。異常が認められた場合直ちに使用を中止し、医師等の指示に従ってください。特に本製品を使い始めた時は、こまめに皮膚の状態を確認してください。
- 本製品の上で飛び跳ねないでください。けがをしたり、破損の原因となります。
- 本製品の上で突起物（ハサミ・ナイフ等）の使用はお避けください。破損の原因になることがあります。
- 突起物のない平らな場所に設置してください。破損の原因になります。
- 持ち運ぶ時は、二人以上で移動し、中のウレタン部分を持ってください。カバーだけで本製品を持ち上げるとカバーが破損することがあります。
- 局所的なへたり（へこみ）が見られる時は、十分な圧力分布効果が得られないことがありますので、使用しないでください。
- アンカ、電気毛布など高い温度で長時間放置しますと変形する恐れがありますのでご注意ください。
- 製品の品質・性能を保つため、直射日光、紫外線が当たらない場所に保管してください。
- 圧迫した状態での保管は避けてください。
- 本製品は、使用状況・環境によってウレタンが変色する場合がありますが、性能には問題ありません。
- ご使用を始められた後しばらくの間、臭いを感じる場合がございますが、体に害を与える様な有害物質は含んでおりません。臭になる場合は、十分に陰干ししてから使用してください。

ご使用方法

- 本製品は 厚み 100×910×1,910 でございます。サイズをご確認いただき、ご使用ください。
- マットレスには汗取りパットをのせ、その上にシーツ等を敷いて使用してください。

お手入れ方法

【カバー】

- カバーは洗濯表示に従い洗濯してください。中材は必ず取り出し、ファスナーを閉めて洗濯してください。
- ※洗濯後カバーを被せる際は、タグの表記に合わせてください。
- 中材の灰色のウレタン面には「ソフト面」を、黄色のウレタン面には「ハード面」が来るように被せてください。

【ウレタン中芯】

- 洗濯はできません。
- 通常の小さな汚れに対しては、固く絞った布でたたくように清拭してください。その後、日陰でよく乾燥させてください。
- 濡れてしまった場合も、風通しの良いところで陰干ししてください。

製造販売元



株式会社 ジェー・シー・アイ

宮城県富谷市成田 1 丁目 5-3

022-745-1315

受付時間 9:00～17:00(土日、祝祭日、年末年始等は除く)