

取扱説明書

ハルクッション

このたびは、本製品をご利用いただき、まことにありがとうございます。
この「取扱説明書」には、本製品を安全にお使いいただくための注意事項
や使用方法などを記載しています。

- 本製品をお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。
- この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。
- 本製品は、改良などにより「取扱説明書」の内容と一部異なる場合があります。
- ご不明な点がございましたら、当社までお問い合わせください。

株式会社フロンティア

1 ご使用上の注意



警告

【死亡または重傷を招く可能性があるもの】

- 取り扱いが理解できないと思われる方が使用する際には、十分注意してください。
取扱説明書が理解できないと思われる方（幼児や認知症の方など）が使用する場合には、保護者、介護者などが必ず取扱説明書に従った使用を確保し、本人による製品の誤動作、その他誤った使用方法による事故を未然に防いでください。
- 包装用ポリ袋は、製品を取り出した後、穴を開けて廃棄してください。
ポリ袋を誤ってかぶったりすると、窒息する危険があります。
- 定期的に圧迫を開放してください。
このクッションは効果的に座圧を分散し、ズレを軽減しますが、長時間同一姿勢の座位を続けると、床ずれの原因となります。
- 製品をご使用中の喫煙は、おやめください。
火種の落下などによりやけどや火災の原因になります。
- 解造や分解をしないでください。



注意

【軽傷または中程度の傷害を招く可能性があるもの】

- 常に乾燥した清潔な状態でご使用ください。
カバー洗濯後など、十分乾燥していない状態ではカビの発生や皮膚トラブルの原因になります。
- 低温な環境下（10℃以下）では、ウレタンフォームが硬くなることがあります。
室温になじませてからご使用ください。
- このクッションは車いすのシート（座面）用として使用してください。

2 製品の特長

- 座骨部に特殊なウレタンフォームを配置したクッションです。車いす上で座圧を効果的に分散します。
- 車いすのシート（座面）のたわみを解消するため、本製品の裏面は船底の形状にしています。これにより安定した座位を保ちやすくなります。
- ご使用によりウレタンフォームが変色することがありますが、品質特性に変わりはありませんので、そのままお使いいただけます。

3 ご使用方法

- 「FRONTIER」マークがひざ裏にくるように設置してください。文字の上下に注意してください。

- △警告 定期的に圧迫を開放してください。このクッションは効果的に座圧を分散しますが、長時間同一姿勢の座位を続けると、床ずれの原因となります。
- △注意 ● 中材のクッション本体は洗濯できません。
● 製品を取り出した際、においが気になる場合には、風通しの良いところで陰干しをしてからご使用ください。
● カバーは、非防水です。失禁や汗の付着にはご注意ください。



4 お手入れの方法

- カバー…洗濯できます。洗濯機で水洗いし、陰干しをしてください。ドライクリーニングもできます。
- クッション本体…洗濯できません。濡れてしまった場合は、風通しの良いところで陰干しをしてください。
- カバー装着方法…クッション本体の裏面（船底形状）を下側に向け、「うしろ」と印字された側が後ろ向きになるようにしてカバーを装着してください。

5 仕様

製品名		ハルクッション
本体外形寸法	幅×奥行	①38×38cm ②38×40cm ③40×38cm ④40×40cm ⑤42×40cm ⑥42×42cm
	厚み	6cm※車いす上使用时：約4cm
重量		約450g
素材	クッション本体	ウレタンフォーム
	カバー	表面：ポリエステル100% 裏面：ナイロン100%（特殊ウレタンコーティング※すべり止め加工）

■製品の仕様は予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。

株式会社フロンティア

千葉本社 福祉本部 〒261-0002
千葉県千葉市美浜区新港42-4
TEL.043-301-8338



●アフターサービスのお問い合わせ

取扱店