

「ライザーベース専用ブロック」取扱説明書

このたびは、「ライザーベース専用ブロック」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

ご使用前に必ずこの取扱説明書及びライザーベース本体の取扱説明書をよくお読みください。またこの説明書は必要ときに取り出しやすい場所に保管しておいてください。使用環境や使用者の身体状況が変化した際には再度お読みください。

●特徴

ライザーベースを使用する際に足の位置を高くする必要がある場合に使用することで高さを 9cm 上げる事ができます。




使用上の注意

ご使用にあたり理学療法士;作業療法士などの専門家もしくは販売店にご相談いただき、正しく使用してください。

- ・ 使用する前に必ず破損が無いことを確認してからご使用してください。
- ・ ライザーベース専用です。その他機器では使用しないでください。
- ・ シャワーや浴室で使用しないでください。
- ・ 必ずライザーベースに取付けて使用してください。

●使用方法

- ①ライザーベース専用ブロックを前方からフットプレートの窪みにスライドさせ取付けてください、
- ②ライザーベース専用ブロックが正しく取り付けられていることを確認してください。

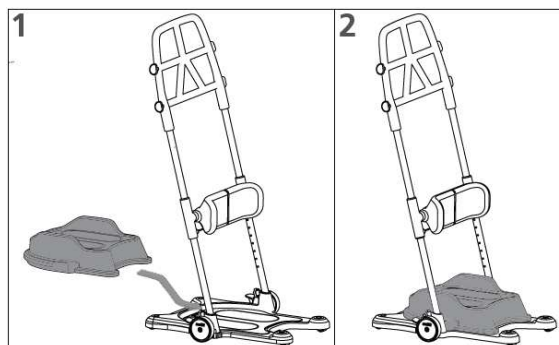

●メンテナンス、保管

- ・ 70%のアルコールもしくは 45%イソプロパノールを使用してください。
- ・ 火気の近くや高温な場所で保管しないでください。

●商品規格

素 材：ポリプロピレン

最大使用者体重：170 kg（ライザーベース本体の最大使用者体重）

商品に関するお問い合わせは

ラックヘルスケア株式会社

〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場 2-10-2 TEL06-6244-0636

