

「マスターグライドJ」取扱説明書

このたびは、「マスターグライドJ」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。またこの説明書は必要とときに取り出しやすい場所に保管しておいてください。使用環境や使用者の身体状況が変化した際には再度お読みください。




●特徴

「マスターグライドJ」は、ベッド⇄車いす、車いす⇄トイレ、車いす⇄自動車などに橋渡しをして、座ったままの姿勢で移乗が行えます。独自の形状で移乗時に利用者の膝裏が当たりにくくなっています。表面はすべり易く、裏面は滑り止め加工が施されておりますのでスムーズな移動が可能です。グリップがついているため、持ち運びや、お尻の下に差し込む際に便利です。

●使用方法

利用者は移動させる側のお尻を浮かせ、お尻を部分的にボードに乗せたら、移動方向へ少しずつ移動していきます。

移乗後はボードを上方に引き上げるようにして取り外します。

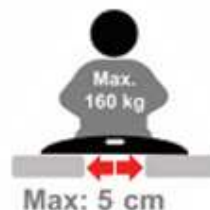

使用上の注意

ご使用にあたり理学療法士・作業療法士などの専門家もしくは販売店にご相談いただき、正しく使用してください。

- ・ 表面と裏面の保護シールをはがしてからお使いください。
- ・ 移乗時には、必ず車いすのブレーキやベッドのキャスターにロックがかかっていることを確認してください。また、車いすはアームサポート、レッグサポートの取り外せるものを使用してください。
- ・ 特に、皮膚の脆弱な方や痩せている方、おむつ着用の方など、皮膚へのリスクが考えられる方へ使用する場合は、必ず専門家に事前相談を行ってください。
- ・ 橋渡しの距離は5cm 以内としてください。
- ・ ご使用にならない場合は高温になる場所は避け、ボードを平らな状態にして保管してください。

●洗浄方法

中性洗剤を使用して水またはぬるま湯での洗浄可能。＊アルコール消毒可

●商品規格

サイズ（長さ×幅）： 40 × 20 cm

素 材：ポリエチレン 最大耐荷重：160kg



MADE IN DENMARK



商品に関するお問い合わせは

ラックヘルスケア株式会社

〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場 2-10-2 TEL06-6244-0636

コード No. 2026.06