

メディマット®アジャストクッション

使用マニュアル



W440T-A(カラー:ブラック)



車いす設置例

メディマット®アジャストクッションは、褥瘡予防および既に褥瘡がある使用者の回復を主な目的とし、車いす用に作られたカバー付クッションです。

使用者にとって、同じ姿勢を長時間強いられるのは大変つらいこと。適切な体圧分散によって臀部の痛みを軽減させ、汗などで蒸れることのないクッションが開発できないか。

介護者にとって、介護は大変な重労働。介護者が健康でなければ適切な介護は望めません。介護者の目線にも立ったクッションが開発できないか。

そのような観点から、テックワン株式会社では使用者と介護者の双方に有益なクッション作りに取り組んできました。

本使用マニュアルをよくお読みになり、正しい用法でお使いください。(※)

※シリーズ製品である子供向けクッション「メディマット®アジャストクッション ジュニア」につきましても、本使用マニュアルと同じ用法でお使いいただけます。



メディマット® アジャストクッションの特徴

●カバー部

「ルストレ® EPX」素材の使用

防水性と透湿性とを兼ね備え、高い抗菌性をもつ「ルストレ® EPX」素材を使用。体液や汚物、薬液などをカバー内に侵入するのを防ぐと同時に、汗などの水蒸気を外部に放出することで蒸れを防ぎます。表裏面共に、銀イオンによる抗菌・防臭処理が施されています。

イージーケアで清潔を保つ

アルコール消毒液や次亜塩素酸ナトリウム希釈液などでの除菌が可能です。家庭用洗濯機での洗濯にも対応し、清潔を保ってお使いいただけます。

優れた取り回し

後方に開閉しやすいファスナーが付いており、カバーの取り外しが簡便です。底面（車いす接地部）にはメッシュ素材が使われており、滑りを防ぎます。

●クッション部

高い体圧性を備えた2種のウレタンを採用

高反発ウレタンと低反発ウレタンの2種類を採用。いずれも優れた体圧分散効果を備えています。臀部外側と大腿部に体圧を分散させることで良好な血液循環を保ち、坐骨や仙骨などの骨が突出した部分への負荷を軽減します。

取り外し可能なU字クッション

坐骨部分のU字クッションの抜き差しにより、高さや硬さを調節可能です。年齢や性別、体重や骨格の大小、褥瘡の有無など、使用者の状態に合わせてお使いいただけます。

使用上の注意

●カバー部


●鋭利なものを押し付けたりしないでください●タバコの火など、高温になるものを近づけないでください●撥水機能が低下した場合には洗濯してください●消毒と殺菌には、エタノールや次亜塩素酸ナトリウム希釈液が有効です●汚れがこびり付いた場合には、蒸しタオルで拭き取るか、部分洗浄してください●メッシュ素材は、接地面がぬれていると滑りを防ぐ効果が薄れます。ぬれている場合には、乾拭きしてからお使いください

●クッション部

●鋭利なものを押し付けたりしないでください●タバコの火など、高温になるものを近づけないでください●保管の際は、直射日光を避けてください●洗浄の際は、ビニール袋に水と洗浄液を入れ、優しくもみ洗いしてください●強くひいたり、つかんだりしないでください。亀裂の原因になります●15℃以下の気温が低い場所で、強く折り曲げないでください。亀裂や破損の原因になります

使用方法


クッション部は 2cm×4 層または 5 層からなるウレタンフォームでできており、いずれも優れた体圧分散効果を備えています。高反発ウレタンフォーム（オレンジ色）は臀部接地箇所の U 字部分がくりぬかれています。使用者の状態により U 字を抜き差しして高さを調節することで適切な体圧分散効果を発揮します。最下層は低反発ウレタンフォーム（黄色）で、U 字部分がなく底付きを防止します。

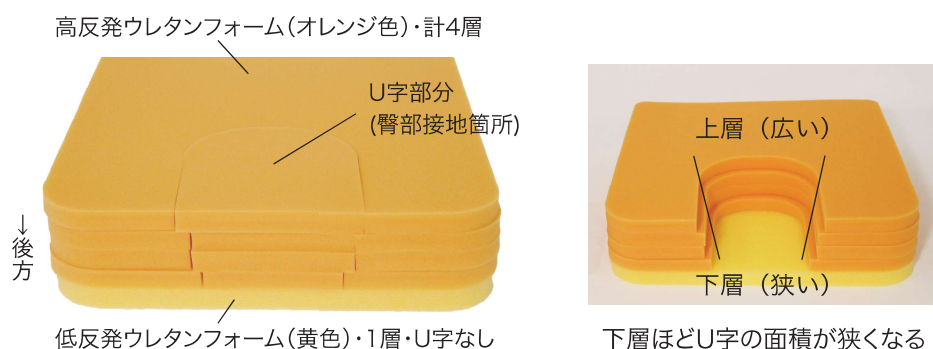

【アジャストクッション使用時における体圧分散のイメージ】



良好な血流を保ち、坐骨や仙骨など骨突出部への負荷を軽減

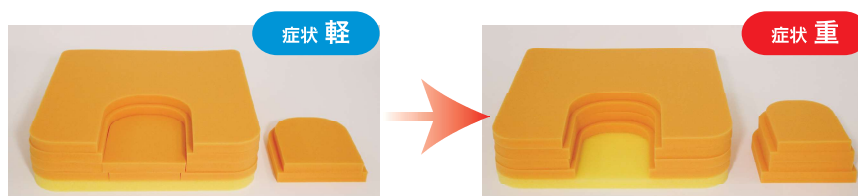

U 字部分を低くすればするほど、坐骨部の血流の滞りをより防ぐ効果が望めます。調節が終わったらカバーに戻し、車いすにセットして使用します。（※）良好な衛生状態を保つため、カバー表面を時々消毒用アルコールなどで拭いてください。汚れがひどい場合には、家庭用洗濯機での洗濯をお勧めします。

※5 層の製品は使用者の体重が 70kg まで、4 層の製品は使用者の体重が 60kg までであることを目安に設計されています。このページに掲載の写真は全て 5 層の製品です。

製品仕様

メディマット® 座面(車いす用マット)

品番	品名	簡易仕様
W436T-A 5層	アジャストクッション (上部/高反発ウレタンフォーム 2cm X 4) (底部/低反発ウレタンフォーム 2cm X 1)	360(幅) X 400(長) X 100(高) (単位: mm) 重量/約 750g カラー/ブラック
W436T8-A 4層	アジャストクッション (上部/高反発ウレタンフォーム 2cm X 3) (底部/低反発ウレタンフォーム 2cm X 1)	360(幅) X 400(長) X 80(高) (単位: mm) 重量/約645g カラー/ブラック
W440T-A 5層	アジャストクッション (上部/高反発ウレタンフォーム 2cm X 4) (底部/低反発ウレタンフォーム 2cm X 1)	400(幅) X 400(長) X 100(高) (単位: mm) 重量/約800g カラー/ブラック
W440T8-A 4層	アジャストクッション (上部/高反発ウレタンフォーム 2cm X 3) (底部/低反発ウレタンフォーム 2cm X 1)	400(幅) X 400(長) X 80(高) (単位: mm) 重量/約700g カラー/ブラック
W320T-A 3層	アジャストクッションジュニア (上部/高反発ウレタンフォーム 2cm X 2) (底部/低反発ウレタンフォーム 2cm X 1)	320(幅) X 350(長) X 60(高) (単位: mm) 重量/約425g カラー/ブラック



「medimatt」ロゴがあるほうが前方、ファスナーがあるほうが後方です。
ご使用の際は間違いのないようご注意ください。

「メディマット®シリーズ」
製品ページ

「メディマット®シリーズ」弊社製品ページです



「メディマット®シリーズ」
YouTubeチャンネル

YouTubeで弊社製品情報をご覧いただけます



お問い合わせ

テックワン株式会社メディマット事業部

〒929-0124 石川県能美市浜町ヌ161-4

TEL 0761-55-0761 / FAX 0761-55-4175

お問い合わせメールアドレス: medical@tecone.co.jp

QRコードを読み取っていただくと、弊社お問い合わせフォームに移行します→

