

小児用バスチェア 「湯つくり」取扱い説明書



TMT-8800
(架台はオプション)

この度は 小児用バスチェア「湯つくり」を
ご購入していただきまして誠に有難うございます。
ご利用の前に本説明書を必ずお読みいただき、
正しい使用方法をご理解の上で、本製品をご使用下さい。



株式会社 トマト

目次

目次	1ページ
1 はじめに	2ページ
2 安全上の注意	2、3、4、5ページ
3 使用上の注意	5ページ
4 操作方法	6、7、8ページ
5 消耗部品	8ページ
6 日常の点検	8ページ
7 その他	9ページ

1 はじめに

～安全にお使いいただく為に～




本製品出荷時には検査を行っておりますが、ご使用前にはおそれいりますが必ず点検を行うようお願い致します。又、各部品の動きやガタつきなど不具合の無い事を確認の上、ご使用を始めていただきますようお願い致します。

2 安全上の注意

取扱い説明書に記載表示されている記号及び言葉は下記の意味があります。充分にご理解の上、安全にご使用下さい。

表示について

(危険や損傷の程度を区分し表示しています)

	注意	傷害又は物的損害を負う可能性が想定される
	警告	死亡又は重症を負う可能性が想定される
	禁止	してはいけない事を表しています
	強制	しなければならない事を表しています

警告ラベルについて

小児用バスチェア「湯っこり」をお使いに頂く方に対して、注意して頂きたい事をラベルにして、注意箇所に貼っています。


警告ラベルを剥がしたり、傷を付けないようお願い致します。



警告

以下の項目は、全て危険行為ですので必ずお守り下さい。
守らなければ生命に関わるケガや物的損害を負う可能性が想定されます。

	●小児用バスチェア「湯っくり」以外での目的に使用しないで下さい
	<p>●改造をしない</p> <p>改造をすることにより、異常動作やケガなどを引き起こす原因となります。 また故障などがみられる場合、当社の技術者以外の方は絶対に修理を行わないで下さい。</p>
	<p>●段差や、坂での使用時は特に注意をして下さい。</p> <p>転落によるケガなどを引き起こす危険があります。 段差や、階段での使用及び登り坂、下り坂での使用時は特に注意をして下さい。</p>
	<p>●ドッキング時、指などの挟み防止の為、手を入れないで下さい。</p> <p>湯っくりの本体と架台をご使用の場合、ドッキングする際に指や腕を挟み込み、ケガをする恐れがあります。警告ラベルが貼ってありますので、注意して下さい。</p>
	<p>●仕様を理解していない方に操作させない。</p> <p>仕様を理解していない方が操作することにより、上下のドッキングがしっかりされていない状態になったりと、転落の恐れがあります。 ご使用前に必ず上下のドッキングが出来ているかをご確認下さい。</p>
	<p>●無理な姿勢での角度調整をおこなわない。</p> <p>うつ伏せや無理な姿勢での角度調整はケガをする恐れがあります。 また、頭側と足側を間違えた状態も無理な姿勢となりますので、ご注意ください。</p>
	<p>●小児用バスチェア「湯っくり」の上で飛び跳ねない。</p> <p>小児用バスチェア「湯っくり」の上で飛び跳ねたりすると転落やケガをしたり、破損したりする恐れがありますので、ご注意下さい。</p>
	<p>●小児用バスチェア「湯っくり」は一人用になっています。</p> <p>小児用バスチェア「湯っくり」は一人用となっておりますので、一度の使用時に複数の人を乗せてのご使用はケガなどを引き起こす恐れがあります。 ご使用の際は、必ず人数をお守り下さい。</p>
	<p>●角度調節をされている状態で力をかけない。</p> <p>角度をつけている状態で、本体・架台共に力をかけないで下さい。 転倒の原因になります。</p>

	<p>●漂白剤、防カビ剤、アルカリ系を使用しないで下さい。</p> <p>漂白剤、防カビ剤を使用した場合、繊維や表面が劣化しますので使用しないで下さい。 吊りベルト、スポンジカバー、マット、枕等が破損・変形してケガをする恐れがあります。</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



●乾燥機を使用しないで下さい。

乾燥機を使用した場合、繊維や表面が劣化しますので使用しないで下さい。
吊りベルト、スポンジカバー、マット、枕等が破損・変形してケガをする恐れがあります。



●天日にあてないで下さい。

天日にあてた場合、繊維や表面が劣化しますので使用しないで下さい。
吊りベルト、スポンジカバー、マット、枕等が破損・変形してケガをする恐れがあります。



●ブレーキロックを使用する。

湯っくり本体から架台に人を乗せ降ろしをする際には、必ずキャスターのブレーキロックをしてからご利用下さい。
架台が動きケガの恐れがあります。



●安全ベルトを使用する。

小児用バスチェア「湯っくり」の上部をリフトで上げ下げを行う際に、必ず安全シベルトを装着してからご使用ください。転落の恐れがございます。



●介助者が側にいて下さい。

小児用バスチェア「湯っくり」の使用時は必ず介助者が側にいて、目を離さないで下さい。



●小児用バスチェア「湯っくり」に乗せる際は等分に。

小児用バスチェア「湯っくり」に人を乗せる際は、必ず体重が等分になるようにご使用下さい。
また、片側に片寄る事で、吊り上げの際に傾き転倒の恐れがあります。



●架台使用時での移動。

架台に乗って移動する際、必ず上下のドッキング金具と安全ベルトを付け移動を行って下さい
転落の恐れがあります。



●吊りベルトの金具を必ず付ける。

吊りベルトの金具をしっかりと取付け、吊り上げ前に必ず確認して下さい。
吊りベルトの取付が不十分になると、転落の恐れがあります。



●ご使用者に注意をする。

ご使用者様の挟み込みに十分注意をして、角度調節を行って下さい。



●小児用バスチェア「湯っくり」から離れる際に注意をする。

小児用バスチェア「湯っくり」を使用時に離れる際や、一時的に目を放す際は、予期せぬ転落に備え必ず安全の確保がされているかをご確認下さい。(ひじ掛け、ドッキング金具、安全ベルト)

●小児用バスチェア「湯っくり」⁴を定期的に点検を行う。



ご使用の環境や頻度により、製品は劣化をしていきます。
[8Pの6日常の点検](#)に点検箇所が記載されていますので定期的に点検を行い
ご使用下さい。



●被災した小児用バスチェア「湯っこり」は修理・点検を行う。

地震や火災などで被災した小児用バスチェア「湯っこり」は、必ずお買い上げの販売店または
弊社まで点検・修理を依頼して下さい。
変形や故障したままのご使用は予期せぬケガの恐れがあります。



●小児用バスチェア「湯っこり」で入浴ができる方を対象とします。

本製品は小児用バスチェア「湯っこり」で入浴ができる方を対象としております。
暴れたり、体感が悪い方など入浴ができない方がご使用の
場合は落下や故障の原因となります。



●吊り上げた小児用バスチェア「湯っこり」上で体位移動する方の入浴方法



吊り上げた状態で体位移動する方の入浴は必ず複数の介助者が頭側と脚側の
フレームを持ち、バランスをとってご使用してください。

3 使用上の注意

- △ ご使用後や、しばらく使われない時など、浴室内や湿気の多い場所に放置せず、換気の良い直射日光の
当たらない場所で保管して下さい。
- △ 塩分が付着する様な場所や、埃の多い場所などでの使用や保管はしないで下さい。
- △ 日々の使用開始時には必ず点検を行って下さい。（※参照8Pの6日常 の点検）
- △ この取扱い説明書はお読みいただいた後、お使いになられる方がいつでも見られる場所に保管をして下さ
い。

4 操作方法

（背もたれ角度調節操作）

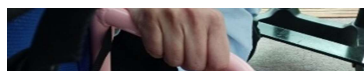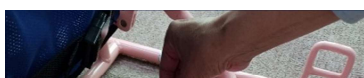




角度調節安全ロックを外す



角度調節フレームを動かし倒す(起こす)

※ 背もたれ角度調節は2段階になっており、角度調節安全ロックを外し湯つくり本体上部を持ちもう一方の手で角度調節フレームを動かして下さい。


(吊りベルトの装着) (使用される方の状態に合わせベルトの長さの調整を行って下さい)

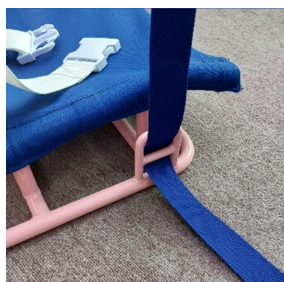

脚側は1か所に吊りベルトを通す



頭側は2か所に吊りベルトを通す

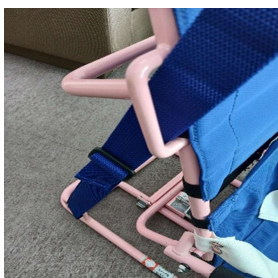

前後左右4本とも通す

リフトハンガーに吊りベルトを装着操作例(肩側、脚側共に同じ)



吊りベルトをリフトハンガーへ



確実に装着した事を確認



全ての吊りベルト装着

※ 吊りベルトは湯つくり本体に通し介護リフトのハンガーにかけて下さい
リフトハンガーへの装着は介護リフトの種類により異なります。
介護リフトの使用説明に従事してご使用ください。
吊り上げ時はバランスを必ず確認してください。

オプション 湯つくり用架台

(キャスターストッパー操作) ☆ロックの確認を必ず行ってください。



(キャスターストッパーロック前)

(キャスターストッパーロック中)

※ キャスターストッパーはペダルを下げるとロックされ
上げるとロック解除となります。

(ドッキング操作) ☆ドッキング状態の確認を必ず行ってください。




はさみ込みに十分注意

※ 上下ドッキングの安全ロックを必ず行って下さい。
架台部分の金具を湯つくり本体の金具に引っ掛けて下さい。



(湯つくり本体はS・M・Lの3種類)

(架台は2種類の高さ)

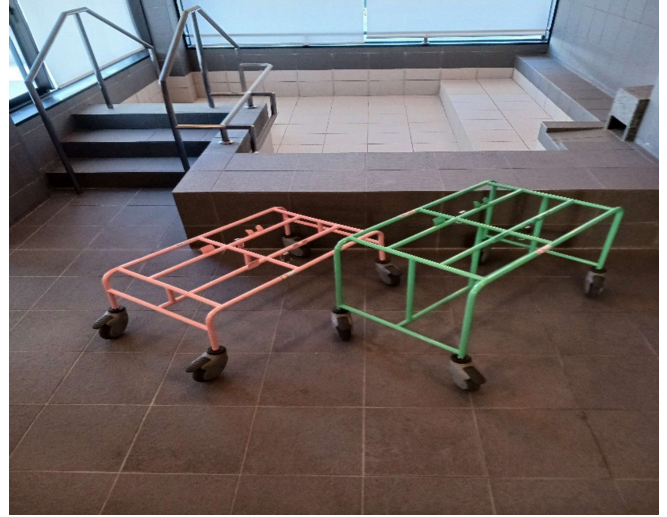

5 消耗部品

A	シート上側	1枚/1台
B	シート下側	1枚/1台
C	吊りベルト	4本/1台
D	安全ベルト(シートベルト)	1本/1台
E	ひじ掛けスポンジカバー	2本/1台

- ※ 価格については販売店までお問い合わせください。
※ 消耗部品は定期的な交換を推奨します。

6 日常の点検

下記の事項を点検の上、ご使用下さい

1	シートベルトに傷や摩耗、ほころびは無いかな？
2	吊りベルトに傷や摩耗、ほころびは無いかな？ 吊りベルトの長さは適正な長さかな？
3	シートに傷や摩耗は無いかな？
4	フレームや部品に変形は無いかな？ ボルト・ナットの緩みは無いかな？
5	キャスターの回転やロックはスムーズかな？
6	異常音や違和感が無いかな？

7 その他

修理を依頼されるとき

故障した際は、お買い上げ販売店もしくは製造元の株式会社トマトまでご連絡ください。

■連絡していただきたい内容

●故障・異常の内容(できるだけ明細に) ●お買い上げ日 ●お名前、ご住所、電話番号

■修理を依頼される前に

修理を依頼される前に、今一度この取扱説明書をよくお読みください。

それでも異常のある場合は、お買い上げ販売店もしくは製造元の株式会社トマトにご相談ください。

■保証期間内は

保証書の記載内容に基づき無償で修理いたします。ただし、保証期間内でも修理が有償になる場合があります。
詳しくは下記の保証書をご覧ください。

アフターサービスについてご不明な点

お買い上げ販売店もしくは製造元の株式会社トマトまでお問い合わせください。

保証書

この製品には保証書を添付しています。「販売店・購入日」などの記入をお確かめになり、記載内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

~~~~~保証書~~~~~

品名/品番		小児用バスチェア 湯つくり TMT-8800		保証期間	お買い上げより1年間
お客様	お名前	販売店	お買い上げ日	年 月 日	
	〒		販売店名	株式会社トマト	
	住所		住所	静岡県静岡市清水区渋川1-6-20	
	TEL		TEL	054-349-2180	

1.1年間の保証期間に取扱説明書に従った正常な使用状況で故障した場合には、無償修理致します。

2.保証期間内でも次の場合は有償になります。

- ①使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および破損がある場合。
- ②お買い上げ後の落下による故障および破損。
- ③火災、地震、水害、落雷、その他天災地変による故障および破損。
- ④本書の提示がない場合。
- ⑤本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- ⑥取扱説明書の消耗部品に記載されている部品の交換の場合。

3.本書は国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.

4.本書は再発行いたしませんので紛失しないようご注意ください。

※販売店さまへお願い・・・お買い上げ日および貴社名、住所、電話番号を記入、捺印したうえでお客様にお渡しください。



株式会社

トマト

〒424-0053 静岡県静岡市清水区渋川1-6-20

TEL: 054-349-2180 FAX: 054-349-2182

E-mail: tomato.info@tomato-miyabi.co.jp URL: <http://tomato-miyabi.co.jp>

※本製品の仕様や取扱説明書は、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

2025.10.01