

浴室洗身台  
ゆかい(湯介)・ゆあん(湯安)取扱い説明書



TMT-5101-M  
～フラットタイプ～



TMT-5301-M  
～背上げ式タイプ～

この度は「浴室洗身台」シリーズを  
ご購入していただきまして誠に有難うございます。  
ご利用の前に本説明書を必ずお読みいただき、  
正しい使用方法をご理解の上で、本製品をご使用下さい。



株式会社 トマト

# 目次

目次	.....	1ページ
1 はじめに	.....	2ページ
2 安全上の注意	.....	2、3、4ページ
3 使用上の注意	.....	5ページ
4 操作方法	.....	5ページ
5 消耗部品	.....	6ページ
6 消耗部品交換手順	.....	6ページ
7 日常の点検	.....	6ページ
8 その他	.....	7ページ

# 1 はじめに

～安全にお使いいただく為に～

本製品出荷時には検査を行っておりますが、ご使用前にはおそれいりますが必ず点検を行うようお願い致します。又、各 부품の動きやガタつきなど不具合の無い事を確認の上、ご使用を始めていただきますようお願い致します。

この取扱説明書はゆあん(湯安)・ゆかい(湯介)共通となっております。説明には機能的に無い部分があります。ご了承をお願いします。

## 2 安全上の注意

取扱い説明書に記載表示されている記号及び言葉は下記の意味があります。充分にご理解の上、安全にご使用下さい。

### 表示について

(危険や損傷の程度を区分し表示しています)

	注意	傷害又は物的損害を負う可能性が想定される
	警告	死亡又は重症を負う可能性が想定される

	禁止	してはいけない事を表しています
---	----	-----------------

	強制	しなければならない事を表しています
---	----	-------------------

 <b>警告</b>	以下の項目は、全て危険行為ですので必ずお守り下さい。 守らなければ生命に関わるケガや物的損害を負う可能性が想定されます。
--	---

	●浴室洗身台以外での目的に使用しないで下さい
---	------------------------

	●改造をしない 改造をすることにより、異常動作やケガなどを引き起こす原因となります。 また故障などがみられる場合、当社の技術者以外の方は絶対に修理を行わないで下さい。
---	---

	●段差や、坂での使用時は特に注意をして下さい。 転落によるケガなどを引き起こす危険があります。 段差や、階段での使用及び登り坂、下り坂での使用時は特に注意をして下さい。
---	--

●サイドフレームからの転落に注意する。
---------------------



サイドフレームから、身を乗り出して転落の危険性があります。  
予想の出来ない行動をとる可能性がある方や、自身で危険行動の予知が取れない方に  
使用時は、しっかり入っているかを確認し目を離さず、十分に注意してご使用下さい。

●仕様を理解していない方に操作させない。



仕様を理解していない方が操作することにより、  
転落の恐れがあります。仕様を理解したうえでのご利用をして下さい。

●無理な姿勢での角度調整をおこなわない。(ゆあん【湯安】)



うつ伏せや無理な姿勢での角度調整はケガをする恐れがあります。  
また、頭側と足側を間違えた状態も無理な姿勢となりますので、ご注意ください。

●浴室洗身台の上で飛び跳ねない。



浴室洗身台の上で飛び跳ねたりすると転落やケガをしたり、ストレッチャー  
が破損したりする恐れがありますので、ご注意下さい。

●浴室洗身台は一人用になっています。



浴室洗身台は一人用となっておりますので、一度の使用時に複数の人を乗せての  
ご使用はケガなどを引き起こす恐れがあります。必ず人数をお守り下さい。

●適合品以外との併用をしない。



当社が指定するサイドフレーム等を他の物での使用をお止め下さい。  
適合品以外の物を使用することにより、ケガや破損の恐れがあります。

●角度調節をされている状態で乗らない。(ゆあん【湯安】)



角度をつけている状態で、頭側、足側に乗らないで下さい。  
支持部に大きな加重がかかりますので故障の原因になります。

●足先を架台に乗せないで下さい。



架台に足先を乗せると、キャスターが動き足を踏み外しケガをする恐れがあります。

●漂白剤、防カビ剤、アルカリ系を使用しないで下さい。



漂白剤、防カビ剤を使用した場合、繊維や表面が劣化しますので使用しないで下さい。  
マット等が破損・変形してケガをする恐れがあります。

●乾燥機を使用しないで下さい。



乾燥機を使用した場合、繊維や表面が劣化しますので使用しないで下さい。  
マット等が破損・変形してケガをする恐れがあります。

●天日にあてないで下さい。



天日にあてた場合、繊維や表面が劣化しますので使用しないで下さい。  
マット等が破損・変形してケガをする恐れがあります。

●ブレーキロックを使用する。



浴室洗身台に人を乗せ降ろしをする際には、必ずキャスターのブレーキロックをしてからご利用下さい。架台が動きケガの恐れがあります。

●介助者が側にいて下さい。



浴室洗身台の使用時は必ず介助者が側にいて、目を離さないで下さい。

●浴室洗身台に乗せる際は等分に。



浴室洗身台に人を乗せる際は、必ず体重が等分になるようにご使用下さい。片側に片寄る事で、吊り上げの際に傾き転倒の恐れがあります。

●浴室洗身台での移動。



浴室洗身台に乗って移動は行わないで下さい。転落の恐れがございます。

●ご使用者に注意をする。**(ゆあん【湯安】)**



頭側、足側の角度調節時は共にご使用者様の挟み込みに十分注意をして、角度調節を行って下さ

●浴室洗身台から離れる際に注意をする。



浴室洗身台を使用時に離れる際や、一時的に目を放す際は、予期せぬ転落に備え、必ず安全の確保がされているかをご確認下さい。

●浴室洗身台を定期的に点検を行う。



ご使用の環境や頻度により、製品は劣化をしていきます。  
[6Pの7日常の点検](#)に点検箇所が記載されていますので定期的に点検を行い  
ご使用下さい。

●被災した浴室洗身台は修理・点検を行う。



地震や火災などで被災した浴室洗身台は、必ずお買い上げの販売店または弊社まで、  
点検・修理を依頼して下さい。  
変形や故障したままのご使用は予期せぬケガの恐れがあります。

●浴室洗身台での洗体ができる方を対象とします。



浴室洗身台は、洗身台上で洗体ができる方を対象としております。  
暴れたり、体感が悪い方、認知症の方などストレッチャー入浴ができない方がご使用の  
場合は落下や故障の原因となります。

## 3 使用上の注意

- △ ご使用後や、しばらく使われない時など、浴室内や湿気の多い場所に放置せず、換気の良い直射日光の当たらない場所で保管して下さい。
- △ 塩分が付着する様な場所や、埃の多い場所などでの使用や保管はしないで下さい。
- △ 日々の使用開始時には必ず点検を行って下さい。(※参照13Pの8日常の点検)

△ この取扱い説明書はお読みいただいた後、お使いになられる方がいつでも見られる場所に保管をして下さい。

## 4 操作方法

(キャスターSTOPパー操作) ☆ロックの確認を必ず行ってください。




(キャスターSTOPパー使用前)



(キャスターSTOPパー使用中)

※ キャスターSTOPパーはペダルを下げるとロックされ上げるとロック解除となります。

(背もたれ・脚上げ 角度調節操作) (ゆあん【湯安】のみ)

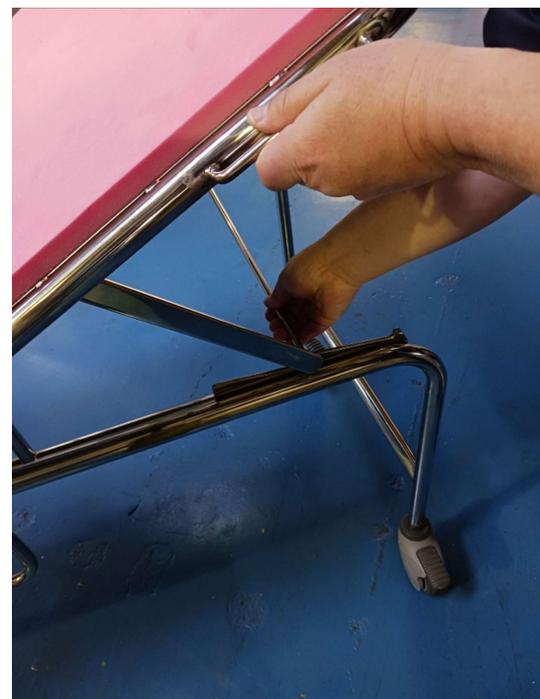

※ 背もたれ角度調節は 0° 15° 30° の3段階になっており、片手で取っ手を  
持ちもう一方の手で角度調節軸フレームを動かして下さい。

## 5 消耗部品

マット	2枚/1台
-----	-------

(ゆあん【湯安】のみ)

※ 消耗部品は1年半経過で交換を推奨します。

※ 価格については販売店までお問い合わせください。

## 6 消耗部品交換手順

マット固定ピン交換手順 (ゆあん【湯安】のみ)

A マット表面 / マット裏面



B マット固定ピンを裏側より押し込みます



D マットが外れます。



C マット固定ピンを抜いて下さい。



※ 取付時は逆手順で行って下さい。

※ マット固定ピンの交換は上記にプラスして裏のナットを外せばピン受けが外れます。

## 7 日常の点検

下記の事項を点検の上、ご使用下さい

1	シートに傷や摩耗は無いかな？
2	フレームや部品に変形は無いかな？ ボルト・ナットの緩みは無いかな？
3	キャスターの回転やロックはスムーズかな？
4	異常音や違和感が無いかな？

## 8 その他

修理を依頼される時

故障した際は、お買い上げ販売店もしくは製造元の株式会社トマトまでご連絡ください。

■ 連絡していただきたい内容

● 故障・異常の内容(できるだけ明細に) ● お買い上げ日 ● お名前、ご住所、電話番号

■修理を依頼される前に

修理を依頼される前に、今一度この取扱説明書をよくお読みください。

それでも異常のある場合は、お買い上げ販売店もしくは製造元の株式会社トマトにご相談ください。

■保証期間内は

保証書の記載内容に基づき無償で修理いたします。ただし、保証期間内でも修理が有償になる場合があります。

詳しくは下記の保証書をご覧ください。

アフターサービスについてご不明な点

お買い上げ販売店もしくは製造元の株式会社トマトまでお問い合わせください。

保証書

この製品には保証書を添付しています。「販売店・購入日」などの記入をお確かめになり、記載内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

~~~~~保証書~~~~~

|       |     |                                |        |                   |            |
|-------|-----|--------------------------------|--------|-------------------|------------|
| 品名/品番 |     | 浴室洗身台<br>ゆあん(湯安)<br>TMT-5301-M |        | 保証期間              | お買い上げより1年間 |
| お客様   | お名前 | 販売店                            | お買い上げ日 | 年 月 日             |            |
|       | 〒   |                                | 販売店名   | 株式会社トマト           |            |
|       | 住所  |                                | 住所     | 静岡県静岡市清水区渋川1-6-20 |            |
|       | TEL |                                | TEL    | 054-349-2180      |            |

1.1年間の保証期間に取扱説明書に従った正常な使用状況で故障した場合には、無償修理致します。

2.保証期間内でも次の場合は有償になります。

- ①使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および破損がある場合。
- ②お買い上げ後の落下による故障および破損。
- ③火災、地震、水害、落雷、その他天災地変による故障および破損。
- ④本書の提示がない場合。
- ⑤本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- ⑥取扱説明書の消耗部品に記載されている部品の交換の場合。

3.本書は国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.

4.本書は再発行いたしませんので紛失しないようご注意ください。

※販売店さまへお願い※ お買い上げ日および貴社名、住所、電話番号を記入、捺印したうえでお客様にお渡しください。



株式会社 トマト

〒424-0053 静岡県静岡市清水区渋川1-6-20

TEL:054-349-2180 FAX:054-349-2182

E-mail: [tomato.info@tomato-miyabi.co.jp](mailto:tomato.info@tomato-miyabi.co.jp) URL: <http://tomato-miyabi.co.jp>

※本製品の仕様や取扱説明書は、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

2025.10.01