


取扱説明書

スタンダードリバーシブル UC マットレス CSM-3918SRNDP

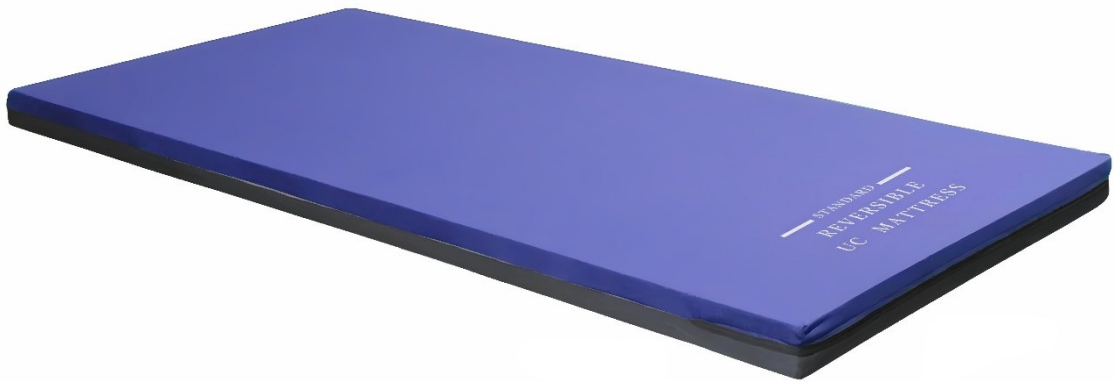

この度は、スタンダードリバーシブルUCマットレスをお買い上げ、またはレンタル頂き、誠にありがとうございます。

この「取扱説明書」は製品を安全にご使用いただくための注意事項が記載されています。ご使用前に必ずお読みになり正しくお使いください。

この「取扱説明書」は、いつでもご覧頂けるように大切に保管してください。

製品は改良などにより、一部この「取扱説明書」の内容と異なる場合があります。寸法、重量などはその数値に多少の誤差が含まれます。この「取扱説明書」は、約おおよそなどの言葉は特別なものを除き省略しています。



ランダルコーポレーション

本 社 〒 351-0034 埼玉県朝霞市西原 1-7-1
TEL.048-475-3661 FAX.048-475-3712

北海道／青森／秋田／岩手／宮城／群馬／埼玉／東京／千葉／神奈川／愛知／大阪／兵庫／岡山／福岡

ご使用上の注意

⚠ 警告

- この商品は石油を主原料とした、ウレタンフォームを使用しています。ストーブなどの直火または温度の高い物に近づけないで下さい。
- 寝具用マットレス以外の用途（体育マット等）に使用しないでください。衝撃の吸収に耐え切れず、ケガ、破損する場合があります。
- 窒息等のおそれがあるため、お子様などが側地（外袋）を使用して遊ばない様ご注意ください。

⚠ 注意

- マットレスの端を強くつかまないでください。内部がちぎれる場合があります。持ち運びや移動時にはご注意ください。
- ベッドサイドレール・ベッド用グリップ等とマットレスとの隙間に手などを挟まれないようご注意ください。怪我をする恐れがあります。
- マットレスを折り曲げないでください。内部構造が破損する恐れがあります。
- マットレスに人を乗せたまま移動させないでください。落下して怪我をする恐れがあります。
- 濃色品は壁材等に接触してご使用されますと色が移染する場合があります。壁面等より隙間をあけてご使用ください。
- 湿気、高温、直射日光はお避けください。カビ、変形、変色等の原因となります。
- 敷いたままにせず、陰干しにする等お手入れをしてください。フローリングなど通気性の低い床面でのご使用は、湿気・汗等の水分が溜まり易くお手入れを怠ると、マットレスあるいは床面にカビが生える恐れがあります。また、側生地の色落ちや色移りの原因になります。

お手入れの方法

※業務用機械での洗浄・乾燥・消毒やその他ご不明な点については弊社までお問い合わせください。

側地（カバー）のお手入れ

- この製品の側（カバー）は外して洗濯ができます。洗濯の際は洗濯ネットを使用し洗濯表示をお守りください。
- 濃色品は、染料の特性上、洗濯すると色落ちすることがある為、単独洗いをお願いします。
- 湿った状態で、他の物とこすり合わせると、色が移るおそれがあります。洗濯後、放置せずに、日陰で吊るして干してください。



液温は30℃を限度とし、洗濯機で
弱い処理が出来る



塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止



低い温度でのタンブル乾燥が
できる（排気温度上限60℃）



日陰のつり干しがよい



底面温度110℃を限度としてスチームなし
でアイロン仕上げができる



石油系溶剤による弱いドライクリーニングができる



ウェットクリーニング※ができる
※有機溶剤を使わずに、専門家による特殊な
技術で行う水洗いのこと

中材のお手入れ

- 水温は30℃を限度とし、中性洗剤を使用し手で押し洗いして下さい。
- 中材を上下に振って水抜きして下さい。手絞りは避けて下さい。
- 日陰で平干しして、カビの発生を防ぐためにも十分に乾燥させてからご使用ください。
- 一般的にウレタンマットレスはウレタン特有の臭いがあります。臭いが強い場合は、風通しの良い日陰に数日間放置してください。
- 中材のウレタンフォームは素材の特質上、空気や光等の影響で変色しますが、機能的には問題ありません。

保管方法

- 圧縮された状態や、曲げた状態での保管は避けて下さい。「損傷」や、「ヘタリ」の原因となります。
- 高温、多湿、ホコリの多い場所、直射日光のあたる場所での保管は避けて下さい。
- マットレス以外の物を重ねて載せないでください。

製品仕様

品名	スタンダードリバーシブル UC マットレス
	CSM-3918SRNDP
サイズ (mm)	幅 × 長さ × 厚さ
	910 × 1910 × 75
側地（カバー）材質	ポリエステル 100%
中材材質	ウレタンフォーム
構造	平形 3層構造
備考	ハード面とソフト面と、両面使用できるリバーシブルタイプ



ランダルコーポレーション

本 社 〒351-0034 埼玉県朝霞市西原 1-7-1

TEL.048-475-3661 FAX.048-475-3712

北海道／青森／秋田／岩手／宮城／群馬／埼玉／東京／千葉／神奈川／愛知／大阪／兵庫／岡山／福岡