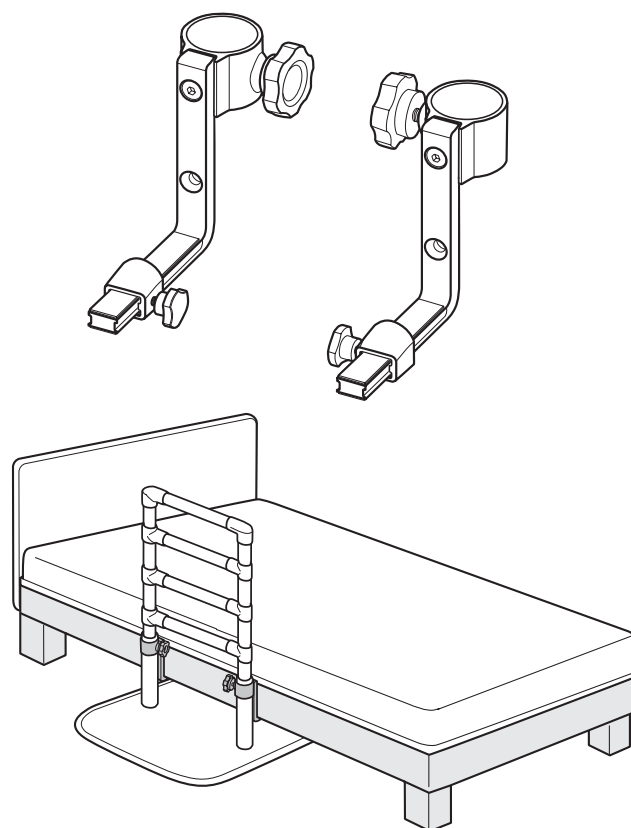


取扱説明書

よかレールストッパー

PJ01-T1



※イラストは、別売りの「よかレール」に取り付けた状態です。

目次

ページ

安全にご使用いただくために…… 1～2

開梱と部品の確認 …………… 3

組み立てかた …………… 3～6

・「よかレールストッパー」を …… 4
組み立てる

・「よかレール」に取り付ける …… 5

・ベッドに設置する …………… 6

商品の仕様 …………… 裏表紙

お手入れについて …………… 裏表紙

この度は 据え置き型手すり用「よかレールストッパー」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

この「取扱説明書」は、取り付け・ご使用前に必ずお読みいただき、正しくご使用いただきますようお願いいたします。

- 介助が必要な方がお使いになる場合は、介助する方も必ずこの取扱説明書をお読みください。
- この取扱説明書はお読みになった後も大切に保管してください。
- 商品を他の人に譲渡される場合は、この取扱説明書も一緒にお渡してください。
- お買い上げの商品は、改良などにより、この取扱説明書の内容と一部異なる場合があります。
- ご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店または弊社までお問い合わせください。

商品の特長

「よかレールストッパー」は、「よかレール」をベッドで使用する際の安定性を向上させる商品です。

株式会社プラッツ

安全にご使用いただくために ※必ずお守りください。

この取扱説明書では、商品を安全に正しくお使いいただき、利用者や他の方への危害や財産への被害を未然に防止するために、色々な絵表示をしております。
下記をよくお読みいただき、内容をよく理解してから正しくお使いください。

 警告	この表示の欄は、「生命に関わる怪我、または重傷を負う可能性が想定される内容」を記載しています。
 注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容」を記載しています。


 警告	
●昇降機能のある電動ベッドでは使用しないでください。	・ 事故や破損の原因になります。
●「よかレール」の安定性向上の目的以外で使用しないでください。	・ 怪我や事故の原因になります。
●他社の商品に取り付け、または他社の部品と組み合わせて使用しないでください。	・ 破損や事故の原因になります。また、他社の商品や部品と組み合わせたものは保証できません。
●水平方向に力を加えないでください。	・ 商品は「よかレール」の安定性を向上させるものであり、固定するものではありません。 水平方向の力を加えると「よかレール」が移動して隙間ができ、怪我や事故の原因になります。
●商品に足を掛けたり、踏み台として使用しないでください。	・ 怪我や事故の原因になります。
●商品は、2個で1セットの商品です。必ず1セットで使用してください。	・ 怪我や事故の原因になります。
●ストーブや火気のある物などを近づけないでください。	・ 火災や火傷の原因になります。
●商品の改造や加工はしないでください。	・ 破損や事故の原因になります。
●設置時は、商品とベッド側面の間に隙間がないように設置してください。	・ 身体がはさまり、怪我をする恐れがあります。
●強度のないベッドや、ベッド下に収納が付属されているベッドで使用しないでください。	・ 怪我や事故の原因になります。
●商品に異常を見つけた際は、使用を中止してください。	・ 正しく設置できない場合や機能を損なう状態の場合は直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店、または弊社までご連絡ください。

⚠ 注意

- **ボルト部分が突起しているので、衣類などを引っ掛けないように注意してください。**
・衣類が引っ張られるなどして、怪我をする恐れがあります。
- **組み立て・取り付け・設置は、販売店もしくは弊社指定の業者がおこなってください。**
・怪我や事故の原因になります。
- **定期的に、ガタツキ・ボルトの緩み部品の破損がないことを必ず確認してください。**
・取り付けが不安定な状態で使用すると、破損や事故の原因となります。
- **ベッドを移動する際は、商品を取り外してから移動させてください。**
・取り付けた状態で移動させると、破損や事故の原因になります。
- **浴室・脱衣所・洗面所など、水やお湯に濡れる場所では使用しないでください。**
・変質や破損をする恐れがあります。
- **直射日光の当たる場所や屋外、高温多湿の場所で使用しないでください。**
・金属部分が熱くなり、火傷の原因になります。また、変形、変質、劣化または破損の原因になります。


< 設置時の注意 >

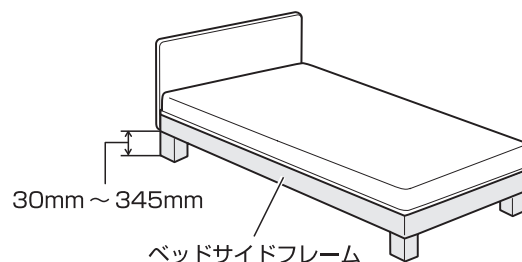- 床面からベッドサイドフレーム下端までの高さが 30mm ~ 345mm のベッドに対応できます。



- ベッドサイドフレーム裏側に、ストッパー C を取り付けられる空間がない場合（下図②参照）、ストッパー C は取り付けずに、ストッパー B だけを挿し込んでご使用ください。







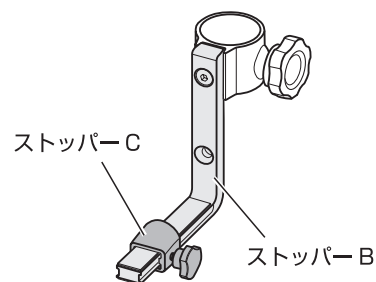
その場合、横方向の荷重に対する安定性は低下しますが「よかレールストッパー」を使用しない場合に比べると、手すりのぐらつきの軽減や「よかレール」の転倒防止といった効果を得ることができます。



ストッパー C の取り付けが可能な場合	ストッパー C の取り付けが不可能な場合
① よかレール よかレールストッパー ベッドサイドフレーム ストッパー C	② よかレール よかレールストッパー ベッドサイドフレーム ストッパー B

開梱と部品の確認

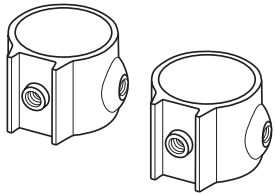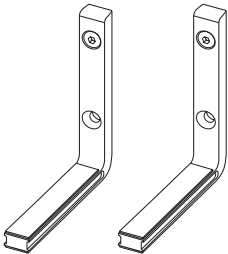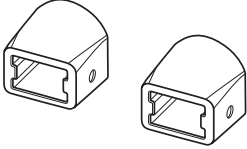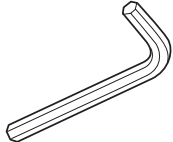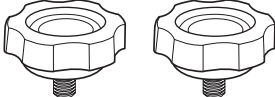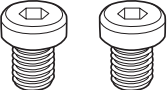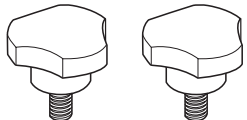
商品が到着しましたら、下記の部品がすべて同梱されているか、また破損の有無をご確認ください。
万一、部品の不足や破損があった場合は、販売店または弊社までご連絡ください。

各種部品			
 ストッパー A (2個)	 ストッパー B (2個)	 ストッパー C (2個)	 六角レンチ (1本)
 ノブボルト (大) M8 × 15 (2本)	 六角穴付ボルト M8 × 10 (2本)	 ノブボルト (小) M5 × 10 (2本)	取扱説明書 (本書)

組み立てかた

- 1
- 床面から、ベッドサイドフレーム下端までの高さを測る

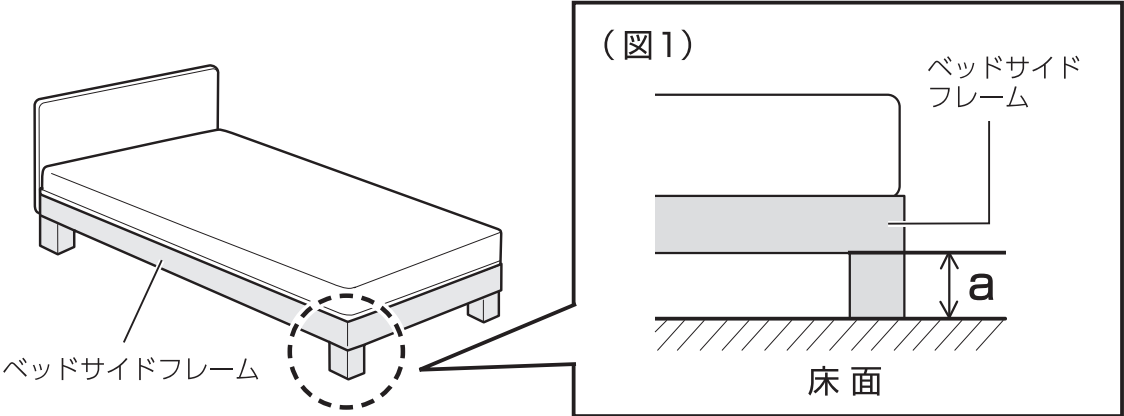ベッドサイドフレーム下端までの高さ（図1）aの寸法によって、
「よかレールストッパー」の組み立て方法が異なります。











組み立てかた

2 「よかレールストッパー」を組み立てる

※ P3 の、(図 1) a の寸法に合わせて、下図のパターン①～④ のように組み立ててください。
a の寸法が「40mm 未満」の場合には、P2 < 設置時の注意 > をご確認ください。

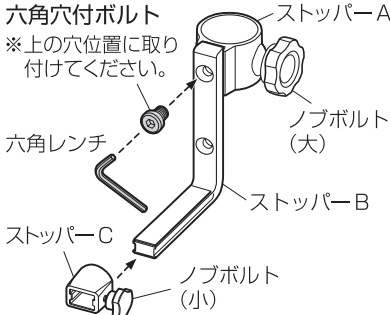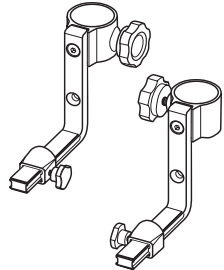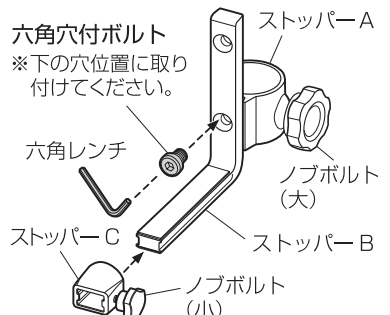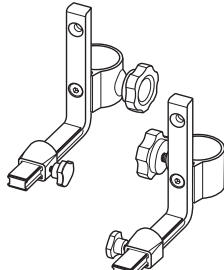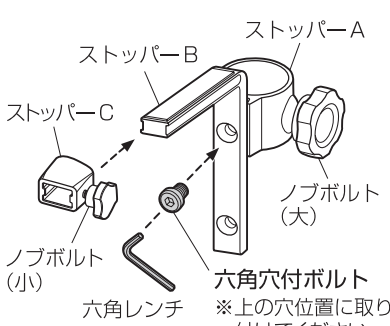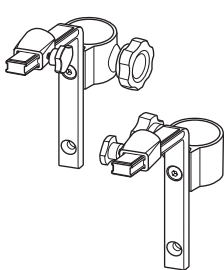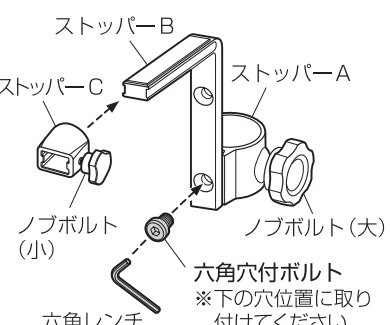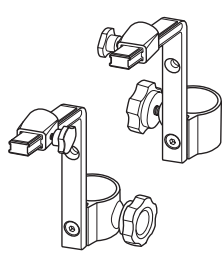※ベッドに設置する際、「よかレール」支柱のネジ穴に「よかレールストッパー」のノブボルト (大) が一致してしまうときは、a の寸法に関わらず別のパターンで組み立ててください。

パターン①：a の寸法が「40mm～135mm」の場合 - 各部品を右図のように組み合わせてください。 六角穴付ボルトでストッパー A と B を固定する際は、付属の六角レンチを使用してしっかりと締め付けてください。(参考) 締め付けトルク：4.3N・m {44kgf・cm} 1 つを組み立てたら、もう 1 つは左右対称になるように組み立ててください。 ※ノブボルトの取り付け向きに注意してください。	 六角穴付ボルト ※上の穴位置に取り付けてください。 六角レンチ ストッパー A ストッパー B ノブボルト (大) ノブボルト (小)	完成図 
パターン②：a の寸法が「135mm～200mm」の場合 - 各部品を右図のように組み合わせてください。 六角穴付ボルトでストッパー A と B を固定する際は、付属の六角レンチを使用してしっかりと締め付けてください。(参考) 締め付けトルク：4.3N・m {44kgf・cm} 1 つを組み立てたら、もう 1 つは左右対称になるように組み立ててください。 ※ノブボルトの取り付け向きに注意してください。	 六角穴付ボルト ※下の穴位置に取り付けてください。 六角レンチ ストッパー A ストッパー B ノブボルト (大) ノブボルト (小)	完成図 
パターン③：a の寸法が「200mm～280mm」の場合 - 各部品を右図のように組み合わせてください。 六角穴付ボルトでストッパー A と B を固定する際は、付属の六角レンチを使用してしっかりと締め付けてください。(参考) 締め付けトルク：4.3N・m {44kgf・cm} 1 つを組み立てたら、もう 1 つは左右対称になるように組み立ててください。 ※ノブボルトの取り付け向きに注意してください。	 ストッパー A ストッパー B ストッパー C ノブボルト (大) 六角穴付ボルト ※上の穴位置に取り付けてください。 六角レンチ ノブボルト (小)	完成図 
パターン④：a の寸法が「280mm～345mm」の場合 - 各部品を右図のように組み合わせてください。 六角穴付ボルトでストッパー A と B を固定する際は、付属の六角レンチを使用してしっかりと締め付けてください。(参考) 締め付けトルク：4.3N・m {44kgf・cm} 1 つを組み立てたら、もう 1 つは左右対称になるように組み立ててください。 ※ノブボルトの取り付け向きに注意してください。	 ストッパー A ストッパー B ストッパー C ノブボルト (大) 六角穴付ボルト ※下の穴位置に取り付けてください。 六角レンチ ノブボルト (小)	完成図 

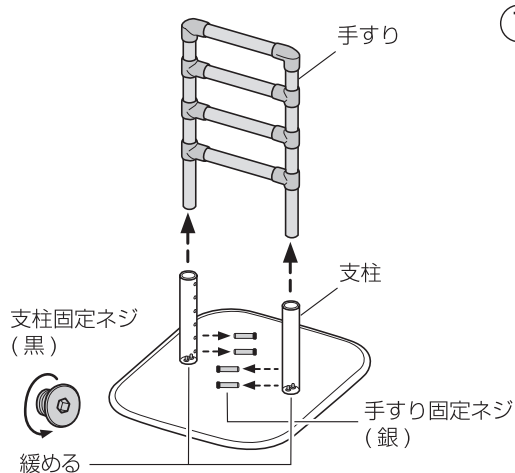
⚠ 注意

- 電動工具 (電動ドライバーなど) を使用しないでください。
締めすぎると、ボルトの破損の原因になります。
- ボルトはボルト穴に対してまっすぐに締め付けてください。
ボルト穴が合っていない状態で無理に締め付けると、ボルト穴の破損の原因になります。
- 組み立て後に、ガタツキやボルトの緩みがないことを確認してください。

組み立てかた

3 「よかレール」に取り付ける



※「よかレール」の取扱説明書 (P6 ~ P8) も合わせてご覧ください。





- ① 六角レンチで、「よかレール」支柱固定ネジ (黒) を緩めて、手すり固定ネジ (銀) を外し、手すりを取り外します。

※手すりを手で支えながら、手すり固定ネジ (銀) を取り外してください。

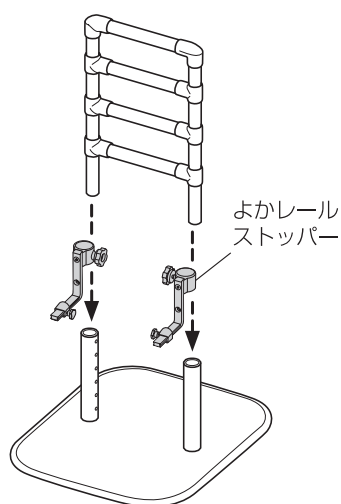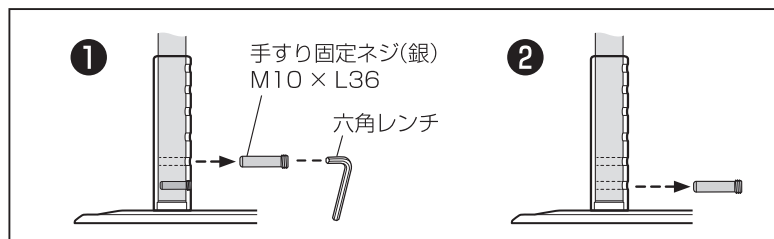※「よかレール」に付属されている六角レンチをご使用ください。




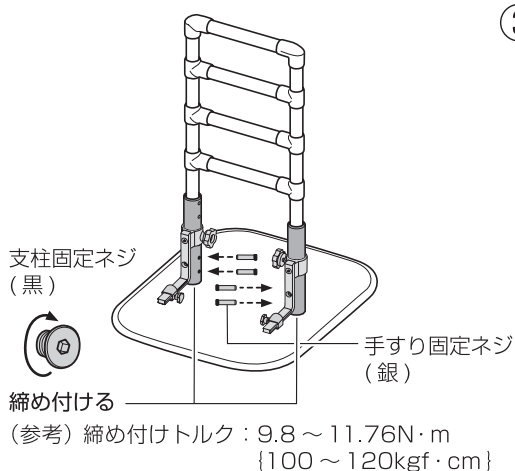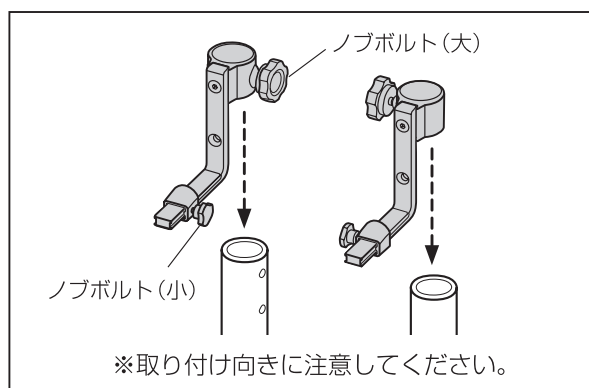- ② 支柱に、「よかレールストッパー」のノブボルトが内側になるように通して、手すりを再び挿し込んでください。



- ③ 手すり固定ネジ (銀) を六角レンチで締め付けて、手すりを固定し、支柱固定ネジ (黒) をしっかりと締め付けてください。

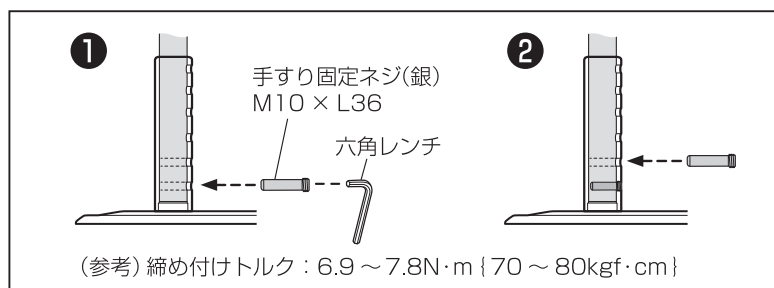※「よかレールストッパー」がネジ締めの邪魔になる場合は、邪魔にならない場所に移動させてから取り付けてください。



⚠ 注意

- ・「よかレール」支柱 2 本に対し、「よかレールストッパー」を各 1 個ずつ取り付けてください。
- ・組み立て後に、ガタツキやネジの緩みがないことを確認してください。

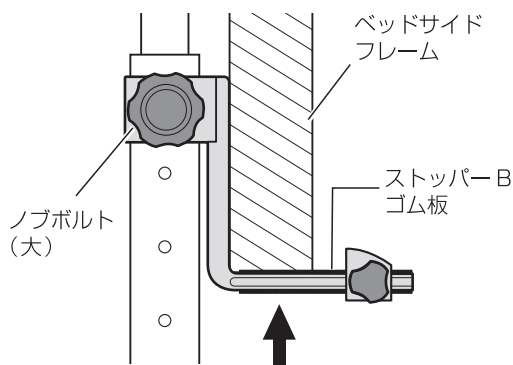
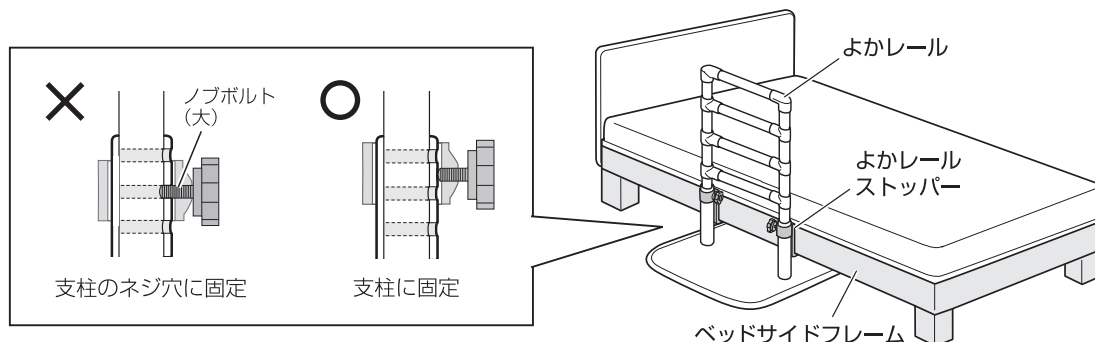
4

ベッドに設置する

※ P2 < 設置時の注意 > をご確認くださいの上、設置してください。

※設置するベッドの高さによっては、「よかレール」支柱のネジ穴と、「よかレールストッパー」のノブボルト(大) が一致してしまうことがあります。

その際は、ノブボルト(大)の位置が支柱のネジ穴から外れるように、P4における組み立てかたの「aの寸法」に関わらず別のパターン of 組み立てかたを使用して設置してください。




①「よかレールストッパー」のストッパー B (ゴム板付) の位置を決めます。

ストッパー B のゴム板を、ベッドサイドフレームの下面に確実に押し当てて位置を決め、ノブボルト(大) をしっかりと締め付けてください。

(参考) 締め付けトルク : $4.3\text{N}\cdot\text{m}$ { $44\text{kgf}\cdot\text{cm}$ }

⚠ 注意

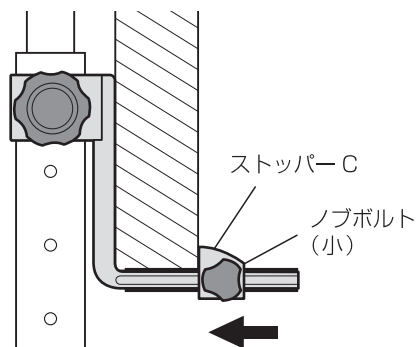- ・「よかレールストッパー」のストッパー B と、ベッドサイドフレームは、垂直になるように取り付けてください。
- ・「よかレールストッパー」は、「よかレール」の手すり部には取り付けないでください。
- ・「よかレールストッパー」のノブボルト(大) は、「よかレール」支柱のネジ穴に固定しないでください。
- ・「よかレール」は、ベッドと手すりの間に隙間ができないように設置してください。
※身体がはさまり、怪我をする恐れがあります。



②「よかレールストッパー」のストッパー C を固定します。

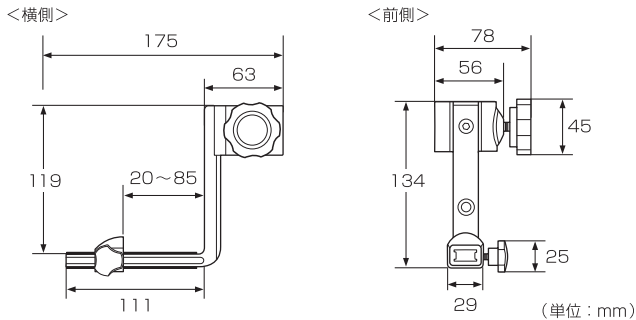
ストッパー C を、ベッドフレームの裏側に確実に押し当てて位置を決め、ノブボルト(小) をしっかりと締め付けてください。

(参考) 締め付けトルク : $1.0\text{N}\cdot\text{m}$ { $10\text{kgf}\cdot\text{cm}$ }

⚠ 注意

- ・組み立て後に、ガタツキやボルトの緩みがないことを確認してください。

商品の仕様



型 式	PJ01-T1
商品名	よかレールストッパー
梱包サイズ 梱包質量 (商品質量)	165 × 55 × 155mm 0.75kg (1個 / 0.35kg) (2個 / 0.7kg)
材 質	本 体：アルミ合金、ゴム (NBR) ボルト：鉄、樹脂
原産国	ベトナム

お手入れについて

⚠ 注意

- 高濃度の酸性・アルカリ性洗剤は使用しないでください。
 - ・錆、変色、変質、塗装の剥がれの原因になります。必ず中性洗剤を使用してください。
 - ※下記の＜日常のお手入れ方法＞に記載の消毒剤の濃度を守ってください。
- シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。
 - ・変質して破損する恐れがあります。
- たわしや磨き粉などで磨かないでください。
 - ・傷が付く恐れがあります。
- 直射日光を避けて、陰干しをしてください。
 - ・変形、変色、変質の原因となります。
- オゾンガス・ホルムアルデヒドガスは使用しないでください。
 - ・変質して破損する恐れがあります。
- 塩素系の消毒液が付着した時は水拭きをし、商品表面に消毒液が残らないようにしてください。
 - ・錆、変色、変質、塗装の剥がれの原因になります。

＜日常のお手入れ方法＞

- 水か中性洗剤を含ませた布を固く絞って拭いてください。
- 商品が汚れた場合は、石鹼水や中性洗剤を少し含んだ湿らせた布で拭いてください。
- 殺虫剤をかけないでください。ひび割れの危険があります。
- 消毒する場合は下記の消毒剤を指定の濃度で、消毒剤の取扱説明書などの指示に従ってご使用ください。



・消毒用エタノール	76.9-81.4%	・塩化ベンゼトニウム	0.05-0.2%
・塩化ベンザルコニウム	0.05-0.2%	・グルコン酸クロルヘキシジン	0.05%
・次亜塩素酸ナトリウム	0.02-0.05%		

＜点 検＞

- 定期的に点検をおこない、ガタツキ・ボルトの緩み・部品の破損、その他異常がないことを確認してください。

＜ 廃棄方法 ＞

- 廃棄の際は、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」および各自治体の規則に従ってください。

株式会社プラッツ

〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2丁目3-17

アフターサービスのお問い合わせ
0120-77-3433

平日：午前9時～午後5時（土日祝祭日・夏季休業日・年末年始休業除く）

'25.05月作成

NP0303-D