

取扱説明書

よかレールマット

PJ01M-S1 シリーズ

PJ01M-L2 シリーズ

目次

ページ

商品の仕様……………表紙

安全にご使用いただくために…… 1

貼り付け方法…………… 2



お手入れについて……………裏表紙

この度は据え置き型手すり用「よかレールマット」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この「取扱説明書」は、取り付け・ご使用の前に必ずお読みいただき、正しくご使用いただきますようお願いいたします。

- 介助が必要な方がお使いになる場合は、介助する方も必ずこの取扱説明書をお読みください。
- この取扱説明書はお読みにになった後も大切に保管してください。
- 商品を他の人に譲渡される場合は、この取扱説明書も一緒にお渡しください。
- お買い上げの商品は、改良などにより、この取扱説明書の内容と一部異なる場合があります。
- ご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせください。

商品の特長	● マットの裏面が吸着面になっており、ベース面に吸着してご利用時のマットのずれを防ぎます。 ● ベース面に貼ることで、素足で乗っても冷たくありません。 ● 洗濯が可能です。 ● 抗菌：消臭効果があります。※すべての菌に効果があるわけではありません。
-------	---

商品の仕様

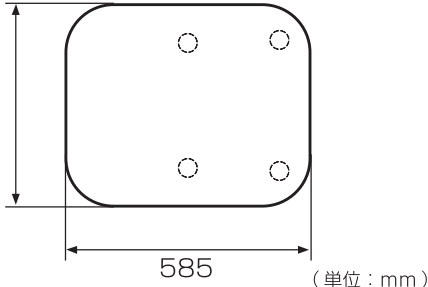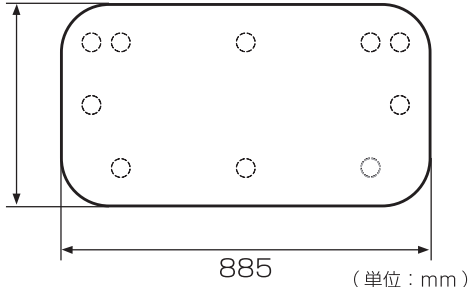商品サイズ	 (単位：mm)	 (単位：mm)
型 式	PJ01M-S1 シリーズ	PJ01M-L2 シリーズ
商品名	よかレールマット ショートサイズ用	よかレールマット ロングサイズ用
材 質	表面：ポリエステル 100% 裏面：アクリル樹脂	表面：ポリエステル 100% 裏面：アクリル樹脂
適合する よかレール	PJ シリーズ-AS(センタータイプ) PJ シリーズ-CS(コーナータイプ)	PJ シリーズ-AL(サイドタイプ) PJ シリーズ-AAL(ウイングタイプ) PJ シリーズ-BL(ロングタイプ) PJ シリーズ-DL(エルタイプ)
原産国	日本	日本

株式会社プラッツ

安全にご使用いただくために ※必ずお守りください。

この取扱説明書では、商品を安全に正しくお使いいただき、利用者や他の方への危害や財産への被害を未然に防止するために、色々な絵表示をしております。

下記をよくお読みいただき、内容をよく理解してから正しくお使いください。

 警告	この表示の欄は、「生命に関わる怪我、または重傷を負う可能性が想定される内容」を記載しています。
 注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容」を記載しています。


 警告	
●「よかレール」以外と組み合わせて使用しないでください。 ・破損や事故の原因になります。また、他社商品と組み合わせたものは保証できません。	
●「よかレール」のベースに貼る以外の用途で使用しないでください。 ・怪我や事故の原因になります。	
●ストーブや火気のある物などを近づけないでください。 ・火災や火傷の原因になります。	
●濡れた状態での使用や、ベース面が濡れた状態で貼らないでください。 ・滑って怪我をする恐れがあります。	
●吸着面をベース面に貼ってください。（表裏を間違えないでください。） ・滑って怪我をする恐れがあります。	
●吸着面やベース面に、異物が付いた状態で使用しないでください。 ・吸着が弱まり、滑って怪我をする恐れがあります。	
●ご使用の前に、保護フィルムを剥がしてからベース面に貼ってください。 ・保護フィルムを剥がさないと、マットが吸着せず滑って怪我をする恐れがあります。	

 注意	
●ベース面に貼り付けるとき、シワができないように手で押さえながら貼り付けてください。 ・マットに段差ができ、転倒の原因になります。	
●定期的にベース面から剥がして、お手入れをしてください。 ・吸着面がベース面に固着する可能性があります。	
●吸着が弱まってきたら新しいマットに交換してください。 ・マットが吸着せず滑って怪我をする恐れがあります。	
●直射日光の当たる場所や屋外、高温多湿の場所で使用しないでください。 ・吸着面の劣化や変質の原因となります。	
●各商品は各タイプの「よかレール」専用となっております。他のタイプに使用しないでください。 ・取り付けができない、または不要な穴が空いた状態になります。	
●各商品のお手入れは、本取扱説明書に記載の内容に従っておこなってください。 ・変形、変色、変質の原因となります。	

貼り付け方法

下図の＜マット切り取り位置＞を確認し、「よかレール」のタイプに合わせてマットの支柱部分を切り取ってください。


※マットの支柱部分にはミシン目が入っているため、手で簡単に切り取ることができます。

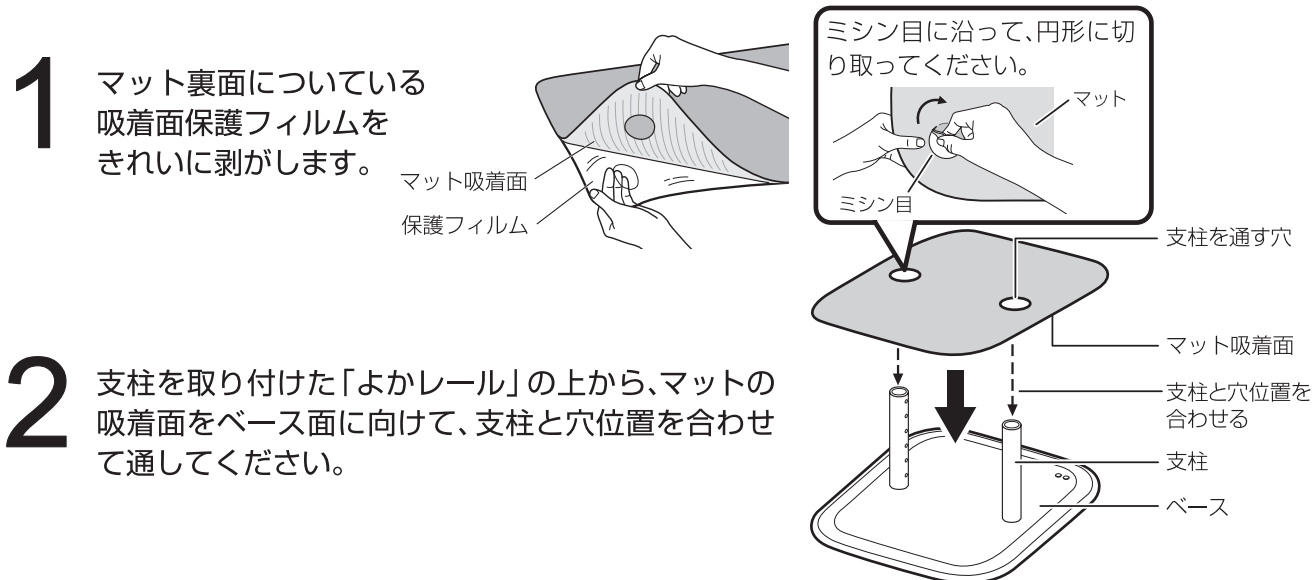

＜マット切り取り位置＞ ※使用する支柱部分（●黒丸）を切り取ってください。

PJシリーズ-AS	PJ01M-S1シリーズ	PJシリーズ-CS	PJ01M-S1シリーズ	PJシリーズ-DL	PJ01M-L2シリーズ
PJシリーズ-AL、AAL		PJ01M-L2シリーズ	PJシリーズ-BL		PJ01M-L2シリーズ
＜PJシリーズAL＞ ＜PJシリーズAAL＞		左図で使用する部分のみ切り取ってください。	＜支柱取付位置1＞ ＜支柱取付位置2＞		左図で使用する部分のみ切り取ってください。

3 ベース面に貼り付ける際は、支柱とベースゴムに被らないように配置し、マットにシワができないように、手で軽く押さえながら貼り付けてください。

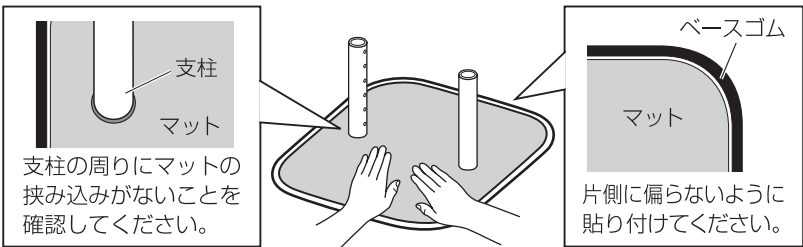


お手入れについて

⚠ 注意

- お手入れの際は、以下のものは使用しないでください。
酸性・アルカリ性の洗剤、シンナーやベンジンなどの有機溶剤、柔軟剤や漂白剤（塩素系・酸素系）
・変形、変色、変質の原因となります。
- 洗濯後にマットのミシン目が破れたときは、新しいマットに交換してください。
・破れた穴につまずき、怪我をする恐れがあります。
- 乾燥機を使用しないでください。
・変形、変色、変質の原因となります。
- 乾燥時に直射日光に当てないでください。
・変形、変色、変質の原因となります。
- マット吸着面に異物が付着したときは、粘着テープなどを用いて異物を除去する、または洗濯してください。
・滑って怪我をする恐れがあります。
- お手入れでマットを取り外すときは、ゆっくり取り外してください。
・ベース面に吸着材が付着する場合があります。
付着したときはぬるま湯で湿らせた布で拭き取ってください。

ベース面に貼って使用している時のお手入れ方法

- ・マット表面の汚れは、掃除機や粘着テープなどで異物を除去し、水で湿らせた布で拭き取ってから乾燥した布で水気を拭き取り、自然乾燥させてください。
- ・汚れがひどいときは、石鹸水や中性洗剤を少し含んだ湿らせた布で拭き取り、乾燥した布で水気を拭き取って自然乾燥させてください。

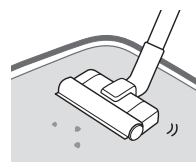

マットの洗濯方法

- ・洗濯は下記の表示の内容に従ってください。



液温は30℃までで、洗濯機の弱水流による洗濯ができます。



漂白処理はできません。



洗濯処理後のタンブル乾燥処理はできません。



日陰でつり干ししてください。



アイロンは使わないでください。



ドライクリーニングには対応していません。

廃棄方法

- ・廃棄の際は、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」および各自治体の規則に従ってください。

株式会社プラッツ

〒816-0921 福岡県大野城市仲畑 2丁目3-17



アフターサービスのお問い合わせ

0120-77-3433

平日：午前9時～午後5時（土日祝祭日・夏季休業日・年末年始休業を除く）

'25.10月作成

NP0302-E