

「座る」をより快適に。より心地よく♪

for care

笑顔は姿勢から
モノが人に合わせる...



特許・意匠申請中

※写真の商品カラー(グリーン)は、
凹凸を表すイメージ色です。

フォーケア ツインピース® <姿勢保持クッション>

Made in Japan

一人ひとりの姿勢や椅子に合わせて「ベストな形状」に可変します♪

おおいた産医療関連機器導入推進事業対象製品

対象: 県内医療・歯科・介護等 関連事業所(補助率1/2以内)

【カラー】 本体/ブラック

ファスナー色/グリーン(Sサイズ)
オレンジ(Mサイズ)

【メーカー希望小売価格】

S サイズ/25,630円(税込) 税別23,300円

Mサイズ/27,830円(税込) 税別25,300円

【病院・施設向け(追加ピース付)フルセット価格】

S サイズ/ 31,350円(税込) 税別28,500円

Mサイズ/ 33,550円(税込) 税別30,500円

※不特定の方に使用する際、調整(張り・支え)に便利です。

Beautiful Life
ビューティフルライフ

お問合せ先

製造・販売元

有限会社 ビューティフルライフ

〒870-0829

大分県大分市椎迫4-2

TEL: 097-546-0666 WEB: <http://www.be-life.info>



※写真の商品カラー(グリーン)は、凹凸を表すためのイメージ色です。

フォーケア®クッション 同時発売
Proプラス & Proエアー
2タイプの体圧分散クッション

令和3年度九州地方発明表彰
「大分県知事賞」受賞



クッションPro II & Basic

ふるさと納税返礼品・おおいだ産ECサイト販売中



PR 動画



笑顔の声(26例)

体圧分散効果の比較


ツインピース®(背面)/Proプラス(座面)使用(右)

使用 前


使用 後

椅子のみで計測

ツインピース
姿勢保持クッション

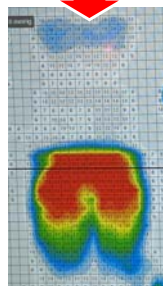

背
腰
座骨
大腿

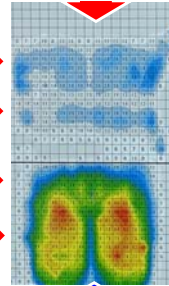

Proプラス(4.5cm厚)
体圧分散クッション

姿勢や体形、椅子の大きさなど、目的に合わせて形状や膨らみ具合を調整♪

ツインピース® の機能と特長

より 快適な座る時間(とき)をお楽しみください。

- (1) 洗濯可能な、外カバー(ズレ防止・メッシュ生地)と中材(特殊加工のオリジナルチップ)は、蒸れを防ぎ身体を支えます。
- (2) 背面や座面の使用や枕・背あて時に、身体に合わせてクッションの形状を自在に変形することができます。
- (3) 左右の膨らみ部収納の中材(ピース:M・S・調整)の調整ピースを抜き差しして、お好みの膨らみ具合に調整できます。
※体勢や状態に合わせて、右左の各膨らみ(支え)具合を変えてご使用できます。 ※調整ピース(別売)で、更に調整の幅が広がります。
- (4) 椅子や自動車・車椅子など身体や椅子の幅、椅子の形状に合わせて膨らみ(支え)具合の調整ができます。
- (5) 枕や背あてなどに使用して、姿勢を保持(安定)するなど多彩なシーンで使用できます。
- (6) 帯部には、クッション性を高める帯ピースを挿入しています。 ※帯ピース(別売)を2枚重ねるとクッション性がUPします。
※膨らみ部を帯部に巻き込んで使用する際は、帯ピースを取り外すと巻きやすくなります。

【表面】



【裏面】



▶ 固定に便利なループ付き ▶ 調整ピースと帯ピースを抜き差しして、膨らみ(支え)具合を調整します。

中材(ピース)

膨らみ(支え)具合を、更に増したい時、経年でへたった際は、調整ピースと帯ピース(左記・別売ピース)を追加できます。




Mピース



Sピース



調整ピース

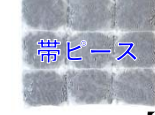

帯ピース

▶ Sサイズ: 膨らみ部(左右)に
Sピース1個、調整ピース1個
帯部に帯ピース1個

▶ Mサイズ: 膨らみ部(左右)に
Mピース1個、調整ピース1個
帯部に帯ピース1個

【Sサイズ】

横幅71cm×縦32cm
膨らみ部: 幅16cm

【Mサイズ】

横幅78cm×縦32cm
膨らみ部: 幅20cm

クッションサイズ

※サイズはおよその数値です。

【オプション】本体購入時がお得です。定 価	本体同時購入
膨らみ部(調整ピース×2)	3,960円(税込) 3,300円(税込)
帯部(帯ピース×1)	2,750円(税込) 2,420円(税込)

特殊加工ウレタンラミカットチップ



【素材の特長】

身体を優しく・しっかり支える
独自の強度と耐久性を向上
にするオリジナルチップです。

▲ ピース(M/S)に、オリジナルチップと
反発ウレタン柱を組み込んでいます。

独自の構造と中材により、着座姿勢や寝た姿勢を保持し易くなります。

特許・意匠申請中

椅子や座椅子、事務椅子、自動車、ベッド上などで、臀部や大腿部側面、腰部のサポートに使用することで、体圧を分散し体幹を安定させることを実現しました。

体圧分散効果の比較(右下、圧計測表)で、姿勢保持クッション(背部)使用時は、背中の広い範囲で体幹を支えているため圧力分散しており姿勢がしっかり保持されています。座面のProプラスも座骨・仙骨への圧力が軽減され、大腿部の広い範囲に圧力が分散されて、座る負担が軽減されます。「背」と「座」で着座姿勢を保持し易くなっていますので、使用する椅子などに合わせて選択し、使用例のような応用をして腰痛をなくし楽に座りましょう。

〈共同開発〉



合同会社 KT福祉環境研究所
代表 松尾清美
前 佐賀大学教育研究院
医学域医学系 准教授



コネクトリハビリテーション
代表 山形茂生(OT)