


商品名：電動昇降リクライニングベッド

ユニット型番： MFB-3UK  
MFB-3UK SD



## 組立て・取扱説明書

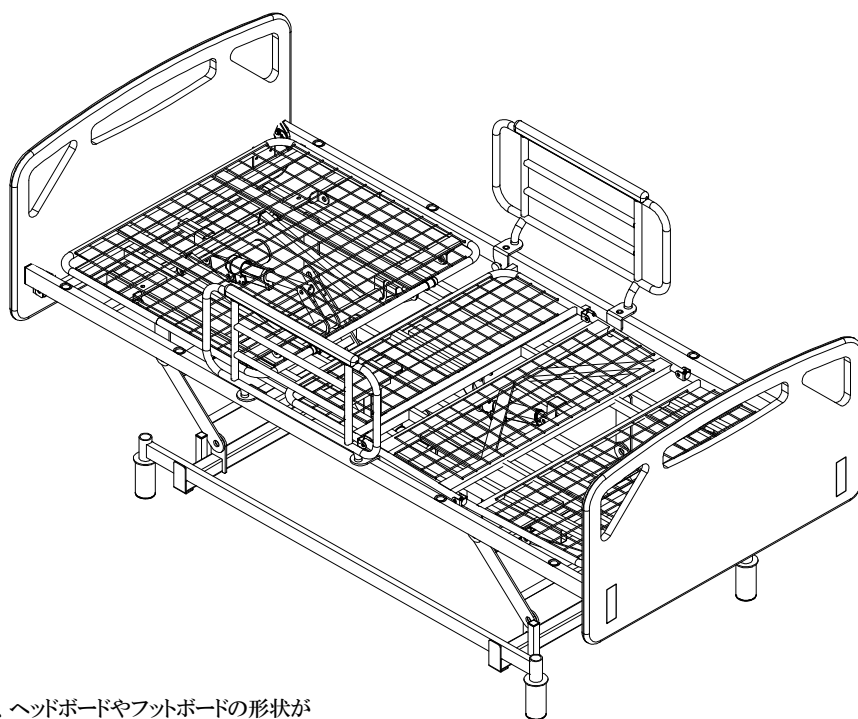

商品イメージ  
機種によって、ヘッドボードやフットボードの形状が異なるものもあります

この度は、当社製品をご購入頂き誠にありがとうございます。

- 組立て・お取扱いに関しては、この説明書をよく読み、正しく行ってください。  
また、介護が必要な方ならびに介護される方も、使用方法などを十分に把握されてから、ご使用下さい。
- この説明書には、保証書が記載されています。お読みになった後も必ず大切に保管してください。
- 説明書内の図解・写真などはイメージです。機種によって、実際の商品と少し異なる場合がございます。

### ご注意

本製品は大変重量があります。

運搬・組立・設置に関しては、必ず2人以上で行ってください。

# 目次

■ 目次・仕様	..... 2
■ 安全なご使用のために	..... 3
■ 組立て・設置にあたって	..... 4
■ 部品の確認	..... 5
■ 組立て手順	..... 6～8
■ 使用方法	..... 9～10
■ オプション キャスターの取り付け方	..... 11
■ アフターサービスその他/保証書	..... 13

# 仕様

商品名	電動昇降リクライニングベッド
型番	電動ユニット部：MFB-3UK，MFB-3UK SD
形式	電動モーター式 MFB-3UK:ベッド昇降、頭側リクライニング、足上げ動作 3モーター式(Sサイズ) MFB-3UK SD:ベッド昇降、頭側リクライニング、足上げ動作 3モーター式(SDサイズ)
寸法	床板幅 S : 91.5cm (ハンドルを含む全幅104cm) 適合マットレス 97x197cm以内 SD : 114.0cm (ハンドルを含む全幅126.5cm) 適合マットレス 120x197cm以内 床板長さ : 198cm 床板高さ : 60cm(最大)～ 30cm(最小) ベッドの外寸はヘッドボード・フットボードの種類により異なります 外寸法はヘッドボード・フットボードの仕様をご確認ください
材質	フレーム部 : スチール、一部合成樹脂 ハンドル部 : スチール、天然木
モーター	中国製 JET認証
定格電圧	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	240W
定格使用時間	連続使用5分 (1人での使用に限る)
生産国	中国
その他	(標準装備) サイドガード2個付属、マットレス止め (オプション) 別売 専用キャスター4個組、別売 サイドガード

# 安全なご使用のために

## 使用上のご注意

### 危険！

- マットの上で飛びはねたりして、遊ばないで下さい。転倒してケガや破損の恐れがあります。
- 昇降ユニットや、リクライニングユニットを踏台として使用しないでください。転倒し、ケガや破損の恐れがあります。
- モーター部に水等の液体をかけないで下さい。感電及び故障の原因になります。
- 乳幼児や身体の不自由な方には付き添い無しでは使用しないで下さい。
- 取り扱い説明書、警告ラベルの内容が理解できないお子様が操作する可能性がある場合、電源コードを抜いて作動できないようにして下さい。
- リモートコントローラは、小さなお子様の手の届かない場所に置いてください。いたずらにより思わぬ事故が発生する恐れがあります。
- リクライニング調整は、必ずおひとりのベット使用時に行ってください。
- リクライニング操作時、フレームパイプの上に手や足を置かないで下さい。手や足や身体の一部をはさみケガをする恐れがあります。
- ベットのヘッド部分の隙間に手や足や異物を入れたまま、リクライニング操作をしないで下さい。手や足や身体の一部をはさみケガをしたり、重大な事故になる恐れがあります。
- 雷が鳴った時はコンセントを抜いて、使用しないようにして下さい。感電の恐れがあります。

### 注意！

- 直射日光やストーブ等の熱、冷暖房器具の風が直接当たらないようにして下さい。
- とくどきマットを風通しのいい場所で陰干しをして、湿気を取り除いてください。
- ベットを移動する時は、収納物やはずれる部品・部材は全て取り除いてください。落下して物の破損や、床面のキズや、ケガの恐れがあります。
- ベットを移動させるときは、大人2人以上で持ち上げて移動させてください。
- ベットの上に熱いものを直接置かないでください。変色や変形の原因になります。
- ベットはつねに平らな場所に水平になるように置いて、ボルト、ナット類をしっかりと締め付けた状態で使用してください。ボルト、ナット類が緩んだ状態で使用しますと破損やガタツキの原因になります。
- 長時間ご使用になられないときは、必ず差込みプラグをコンセントから抜いてください。絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。
- ご使用を中断し収納される時は、必ず電源コードの差込みプラグを抜いて、収納して下さい。
- リクライニング操作時やリクライニングを上げた状態で、腰をかけたり上に乗ったりしないで下さい。モーターに無理な力がかかり、故障の原因になります。
- リクライニング操作する時は、仰向けに寝た状態で行ってください。これ以外の状態では寝ている方の身体に負担がかかります。(うつ伏せ、横向きでのご使用はしないで下さい。)


# 組立て・設置にあたって

## 組み立て前の注意点

- 組み立て前に、この説明書をよく読みあらかじめ組み立て内容を把握して作業を開始してください。
- 組み立てには平らな場所で行ってください。
- 組み立て前に、全ての部品が揃っているかご確認ください。
- 組み立ては必ず大人2人以上で組み立ててください。  
1人の作業やお子様の作業は破損の原因になり、ケガをする事が有ります。
- 組み立て前に、フローリング等の床が傷つかないように敷物等を敷いて作業をして下さい。
- 各部品を説明書に記載されているように正しい取り付け場所に取り付けてください。
- ボルトやネジが緩んだまま使わないで下さい。商品の破損の原因になり、ケガをする事が有ります。

## 設置上の注意点


- 床面の平らな場所に水平になるように置いてください。転倒や商品の変形の原因になります。
- 床面がクッションフロアーの場合は、敷物を敷いて使用してください。  
脚部(木製の場合)の塗料と床面が反応して、汚れの原因になります。
- 床面がフローリングや畳などの場合は、敷物を敷いて使用してください。  
床面のキズ防止になります。
- 直射日光が当たる場所、暖房器具の近くで高温になる場所、湿度の高い場所などでは使用しないでください。火災や商品の変形、カビの原因になります。
- テーブルと他の物とは最低30cm離して風通しのよい場所に置いてください。  
カビやダニ発生の防止になります。
- 浴室など湿気の多い場所や水のかかる場所では使用しないで下さい。  
感電及び故障の原因になります。
- 電源コンセントの位置から10cm程度離し、昇降時に電源プラグと接触しないように設置してください。
- ベッドの下には物を置かないでください。昇降時にベッドが破損したり、ベッドが破損する原因にもなり、大変危険です。
- ベッドの周りにはなるべく広い空間をとってください  
ベッドが昇降するとき、前後に円弧を描きながら昇降しますので、下記に明記されている寸法より多く壁からはなして設置してください。

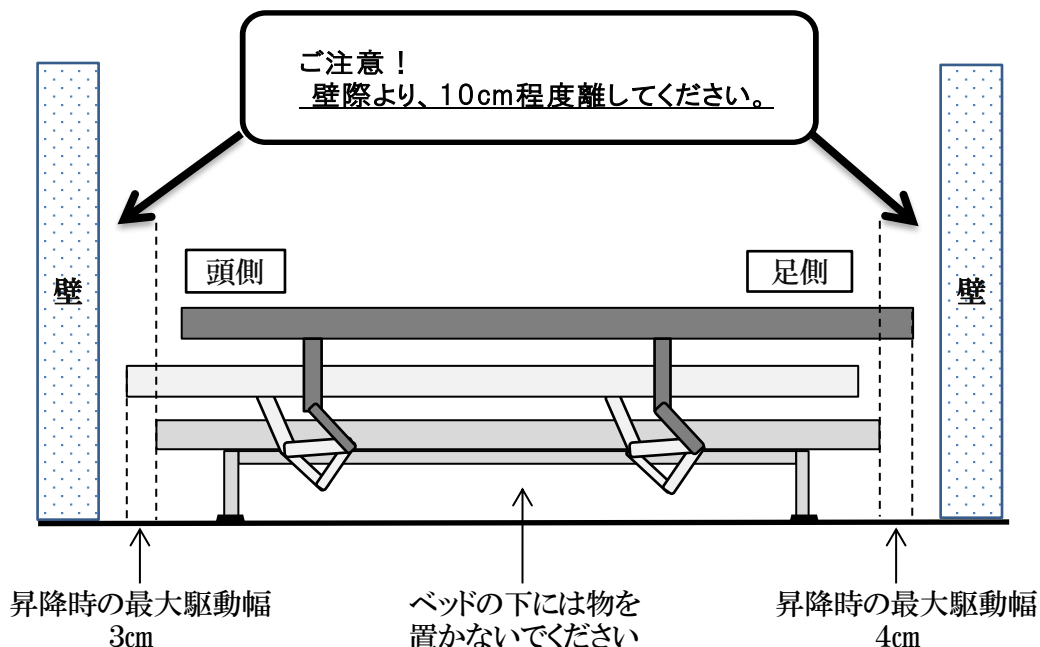

## 部品の確認

- 組立て前に、下の部品が全て揃っているか、必ずご確認ください。
- 梱包 3カートン（機種、オプションによって梱包内容が若干異なります。）


(3-1)

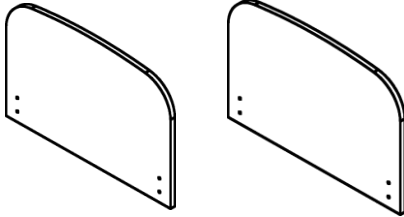


ヘッドボード:1個 / フットボード:1個

ヘッドボードとフットボードは機種により形状が異なります。  
機種により、サイドフレームカバー付きもあります。


(3-2)

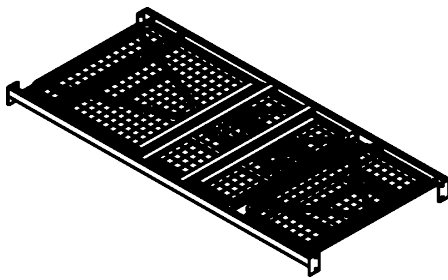

リクライニングユニット:1台

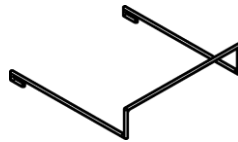

マットレス止め:1個

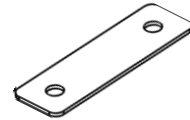

ヘッドボード固定金具:4個




ヘッドボード取付けネジ:8個  
(M8x45)



ヘッドボード取付けナット:8個  
(M8)



六角レンチ

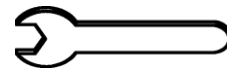

13mmスパナ

(3-2) \* 機種によっては最初からリクライニングユニットに  
接続されている場合があります




リモコン:1個



電源ユニット:1個

(3-2)

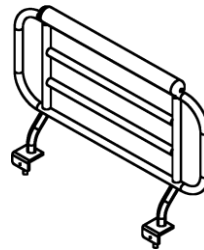


サイドガード:2個



固定ネジ:4個

(3-3)

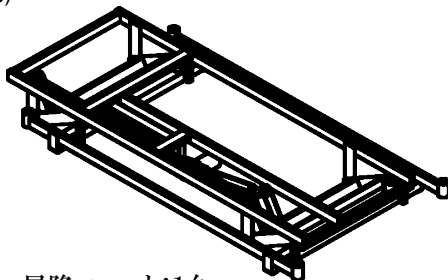

昇降ユニット:1台



固定脚:4本



ワッシャ:4個




組立ネジ(M8x40):4個

## 組手で手順

- 昇降ユニットに脚とリクライニングユニットを取り付けます。 組立作業は必ず2人以上で行ってください。


① 昇降ユニットを水平な場所で裏返しに設置し、脚を4本取り付けます

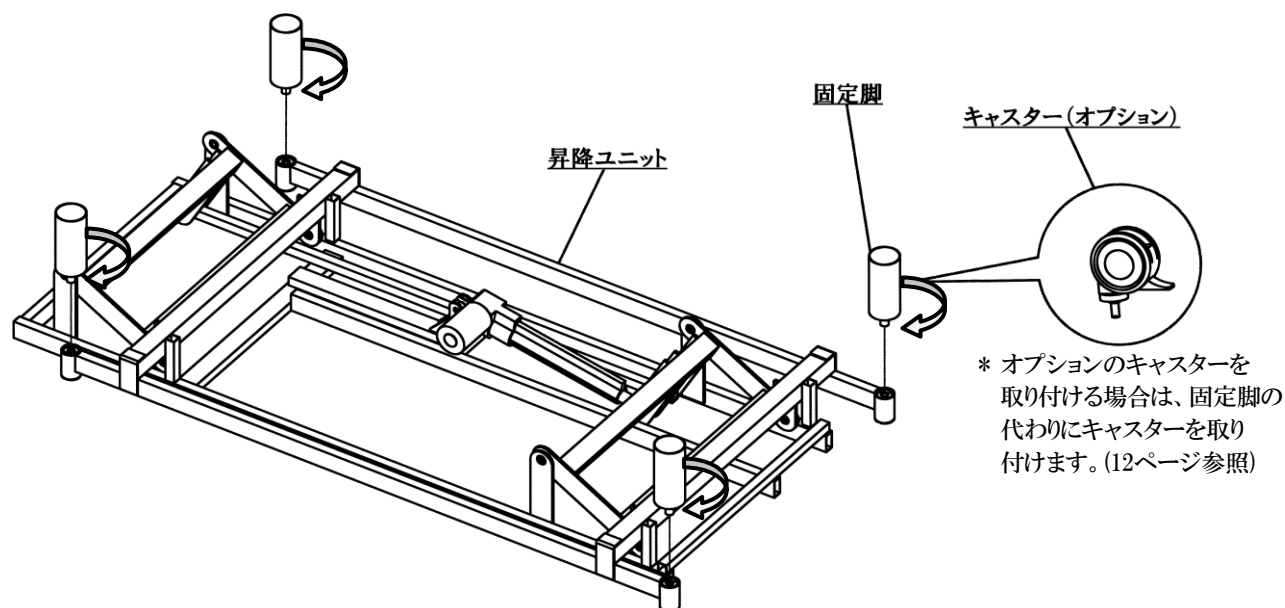

② 昇降ユニットの脚が下になるように表返しにします。

③ リクライニングユニットを乗せる時、昇降ユニットの「頭」側とリクライニングユニットの「頭」側の向きを合わせます。



④ 昇降ユニットの位置決め目印にリクライニングユニットの位置を合わせて、組立ネジ(M8x40)4本とワッシャ4個で固定します。

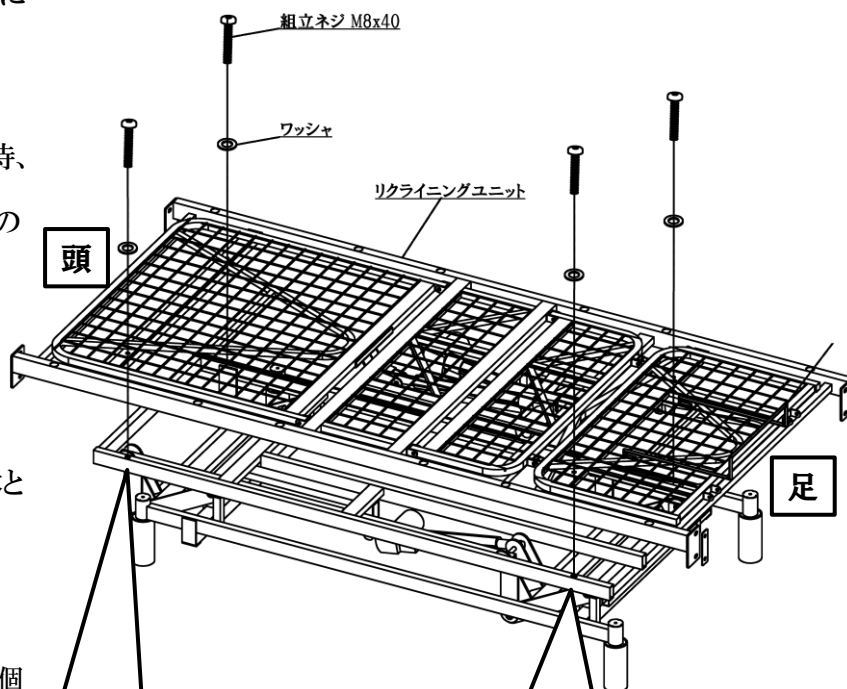









組立ネジ(M8x40):4個 ワッシャ:4個

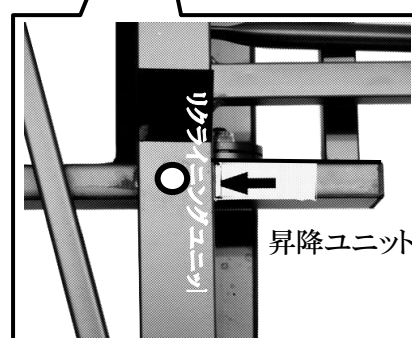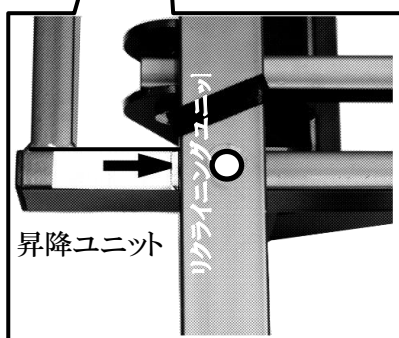

六角レンチ

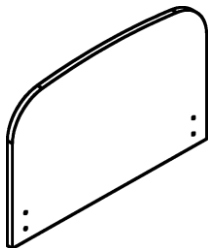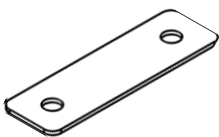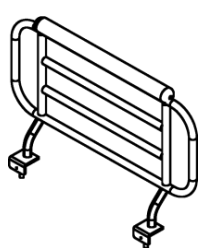

■ ヘッドボード・フットボードとサイドガードを取り付けます。

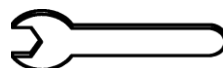 <p>ヘッドボード・フットボード：各1個 *機種により形状は異なります</p>	 <p>ヘッドボード固定金具：4個</p>	 <p>サイドガード：2個</p>	 <p>固定ネジ：4個</p>
 <p>ヘッドボード取付けネジ (M8x45)：8個</p>	 <p>ヘッドボード取付けナット (M8)：8個</p>	 <p>六角レンチ</p>	 <p>13mmスパナ</p>


- ① ヘッドボードをヘッドボード固定金具：2個、ヘッドボード取付ネジ：4個、ヘッドボード取付けナット：4個でベッド本体に固定します。

ヘッドボード取付けナットにはゆるみ止め機構が付いているため向きがあります。

ゆるみ止め機構の無いほうから取付ネジを入れてください

また、ゆるみ止め機構があるため少しネジを回すのに固くなっているため、スパナを使ってナットを確実に固定して取付ネジを締めてください。

- ② 同様に、フットボードも固定します。

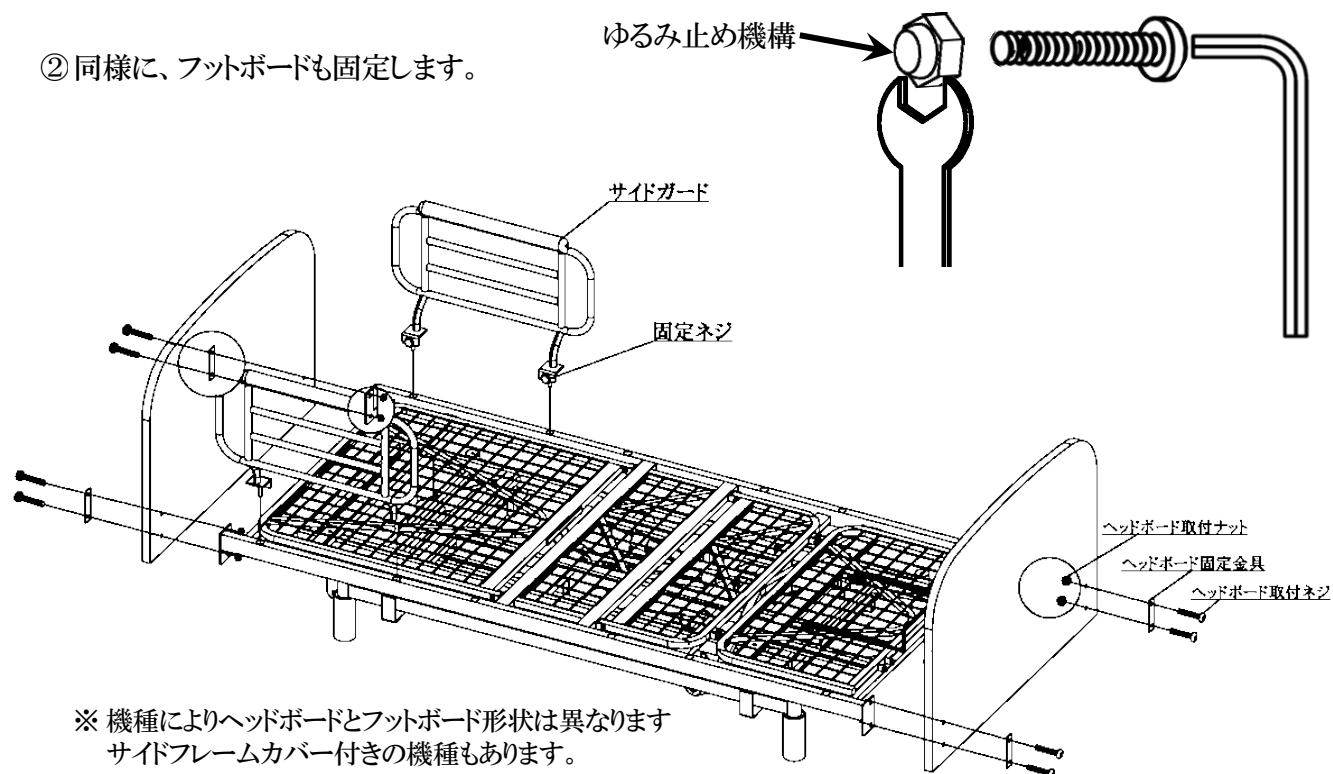

- ③ サイドガードはベッドのサイドフレームに設けられた穴に差し込んで使用します。  
取付位置は任意の場所6ヵ所を使用することができます。  
サイドガードを差し込んだのち、固定ネジでサイドガードが外れないように固定してください。

## 組手て手順


- 昇降ユニット、リモコン、電源ユニットの配線の接続をします。



リモコン:1個




電源ユニット:1個

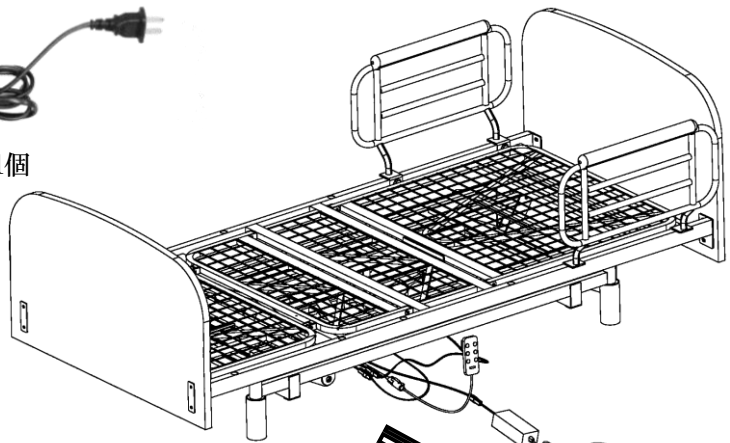

- \* リモコンと電源ユニットは、工場出荷時に接続されている場合があります。

昇降ユニット、電源ユニット、リモコンのコネクターを接続します。  
接続後は確実にロックします。

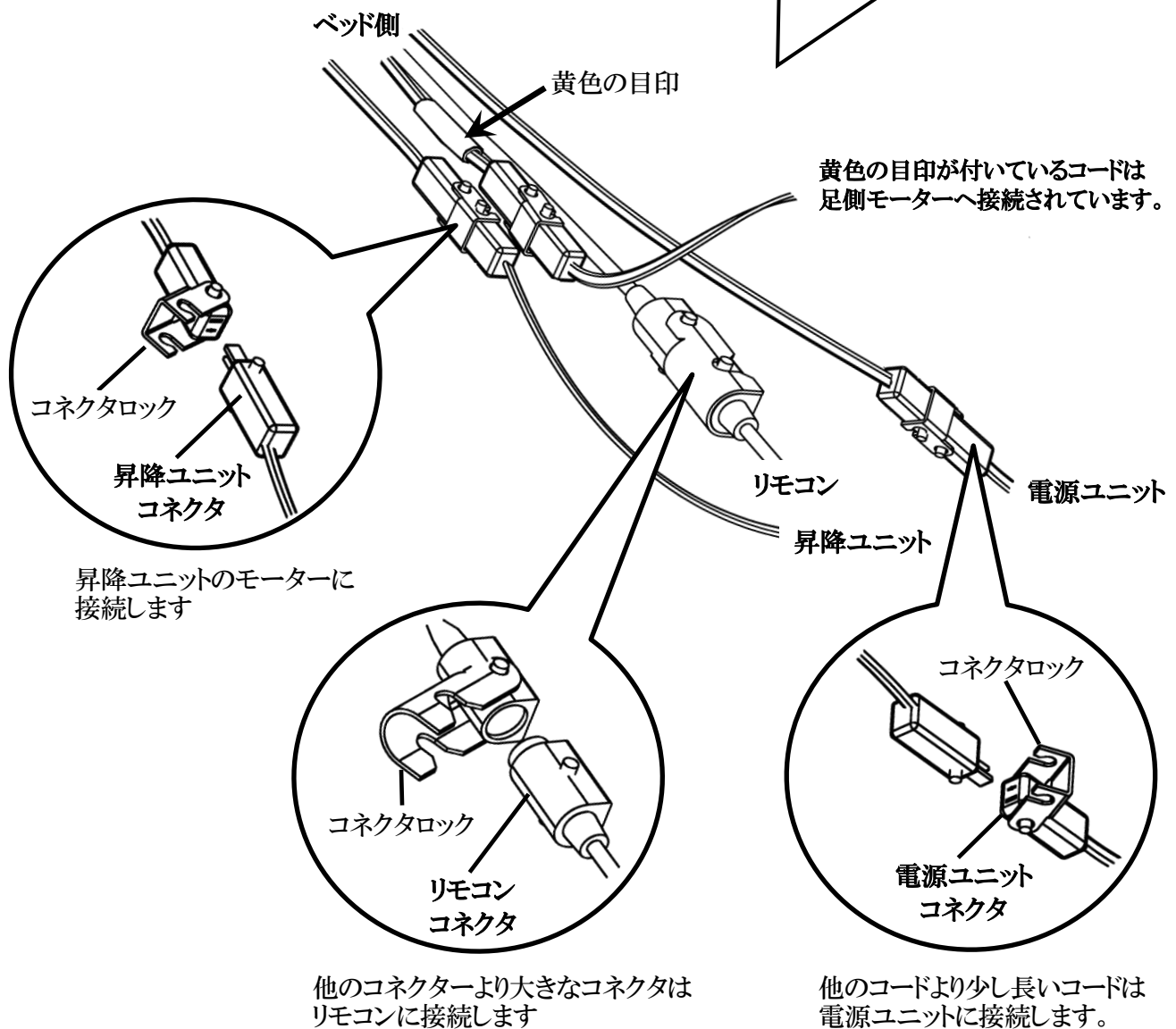



## 使用方法


- リモコンは機種により2種類あります。 どちらのリモコンかご確認いただき正しくご使用ください。

○ 3モーター電動昇降リクライニングベッド

MFB-3UK電動昇降リクライニングユニットを使用した機種は、3個のモーターで駆動します。

- ・ あたま側のリクライニング動作
- ・ 足側の昇降動作
- ・ ベッドの昇降動作

3つの動作を別々のモーターで動かします。

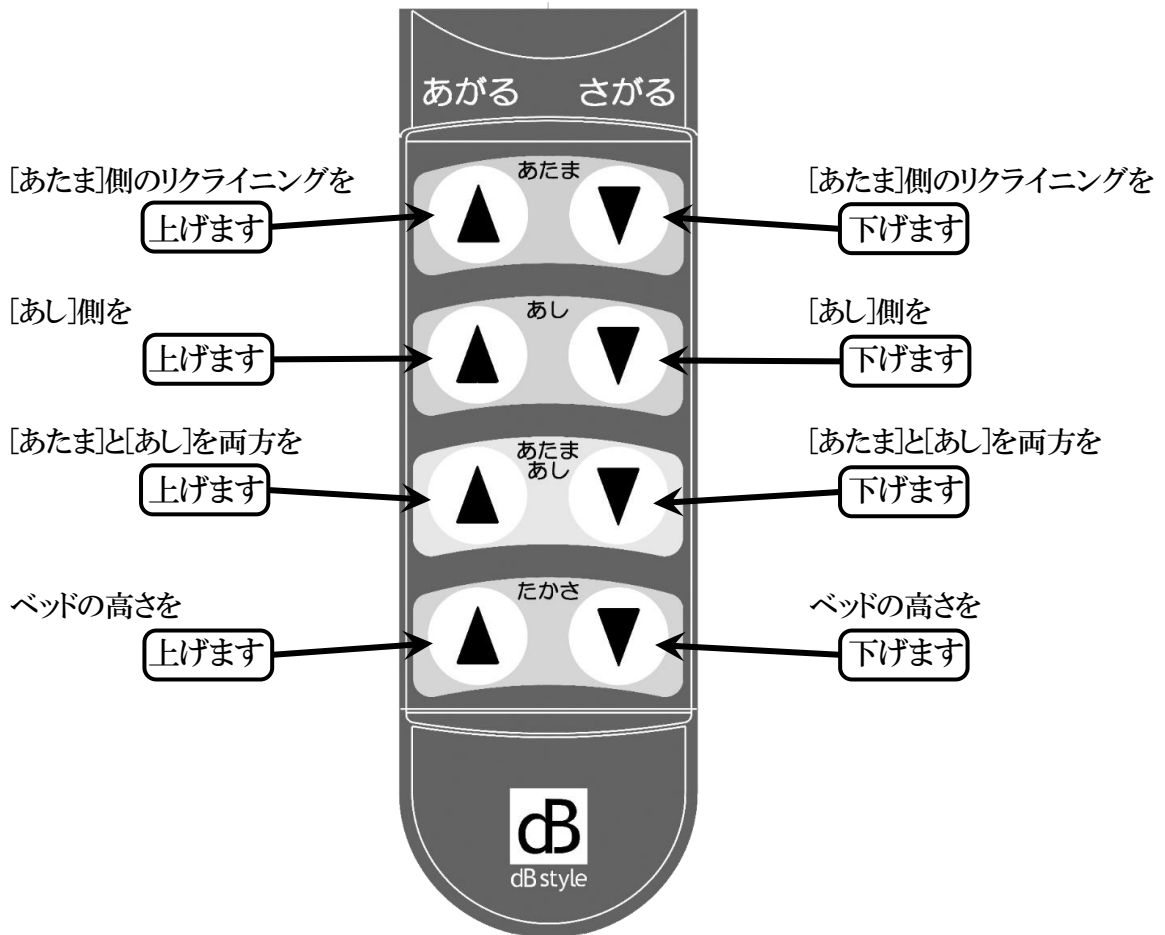


注意：連続使用は5分以内にしてください

連続で5分間使用した場合は、1分間使用を停止したのちにご使用下さい

## 電動昇降リクライニングベッドの移動・設置の注意点

- 本製品は大変重量があります。  
設置・移動に関しては、必ず2人以上で行ってください。
  - 電動昇降リクライニングベッドの設置・移動時の注意点
    - ・ 電動ベッドの移動時はマットレスなどの寝具類はすべて取り外してください。
    - ・ 電動ベッドの移動時は電動ベッドの金属のサイドフレームを両側から持ち上げて下さい。
- ※ ヘッドボードやフットボードを持って電動ベッドを持ち上げると、ヘッドボードやフットボードの取り付け部分が傷みやすくなります。

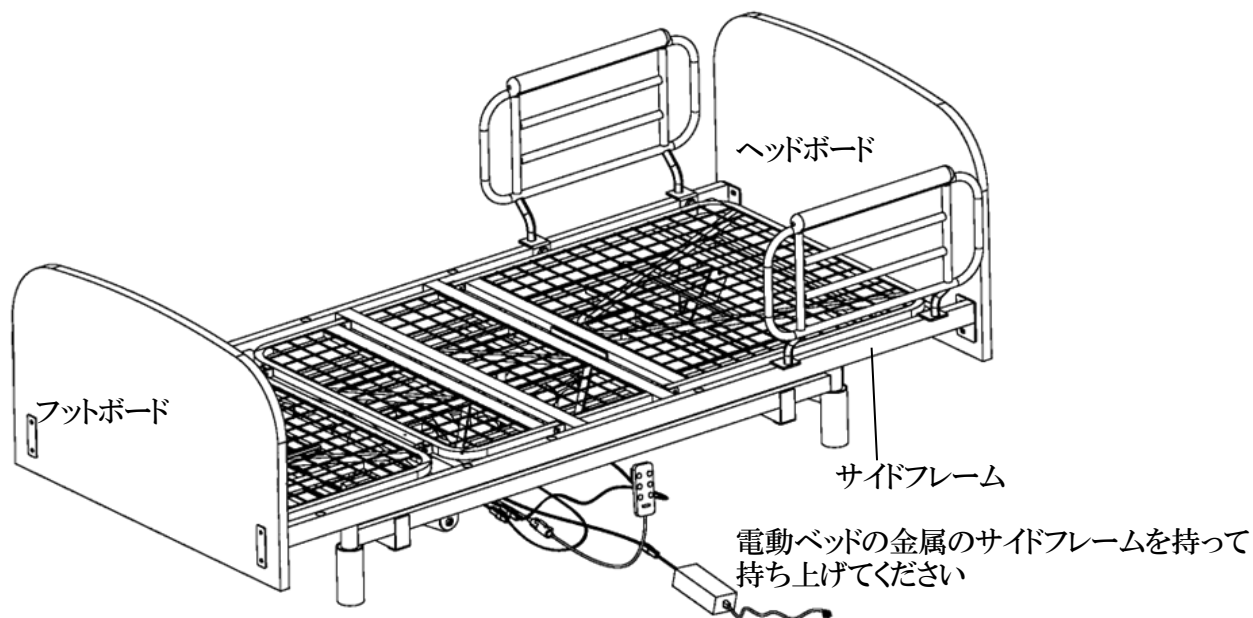

- ※ 電動ベッドの機種により、サイドフレームカバーが付いている場合がありますが、このサイドフレームカバーを持って電動ベッドを持ち上げないでください。  
サイドフレームカバーの取り付け部分が破損する場合がありますため、必ず内部の金属フレームを持ってください




サイドフレームカバー

## オプション キャスターの取り付け・使用方法

### ■ キャスターMFB-CR(別売品)を取り付けます

- ① ベッドのリクライニングユニットを取り外して、昇降ユニットを裏返しにします。  
この作業は必ず2人以上で行ってください。
- ② 固定脚を取り外します。
- ③ キャスターを取り付けます。

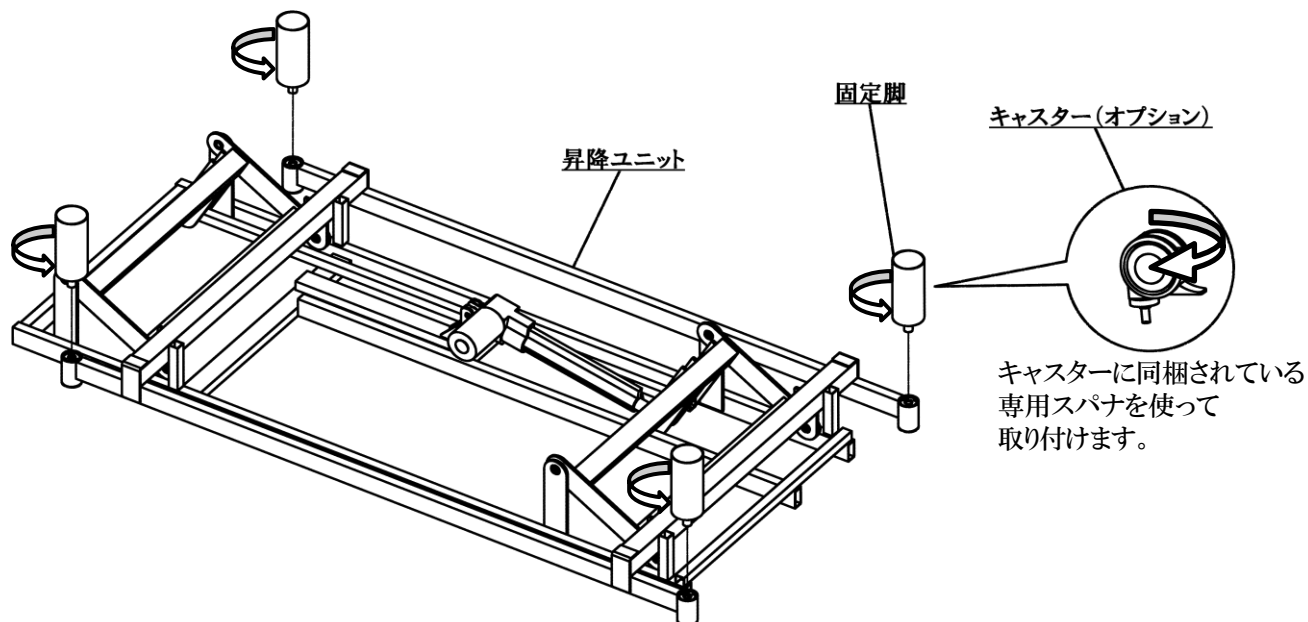

### ■ キャスターMFB-CR(別売品)の使用方法

#### ○「ロック」状態

グレーのレバーの下側を押し込むと「ロック」状態になります



#### ○「フリー」状態

グレーのレバーの上側を押し込むと「フリー」状態になります



#### \* ご注意

ベッドを通常の使用の時は、キャスターは「ロック」状態でお使いください。  
また、キャスターのロックは必ず4個とも行ってください。

ベッドを動かす場合は、必ずキャスターを「フリー」状態にして動かしてください。  
「ロック」状態で動かすと、床を傷つけたり、故障の原因となります。

時々、キャスターの取付けに緩みが無いことを確認してください。  
もし緩みがあるときは直ちに使用を取りやめて、キャスターを確実に固定してください



## アフターサービスについて

- 本書は、下記記載の保証条件で無料修理を行うことをお約束するものです。保証期間内に故障した場合には、本書を提示のうえ、お買上げ店または当社に修理をご依頼下さい。
- 保証期間後の修理は、修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。お買上げ店または、当社にお問合せください。
- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保存してください。

### 保 証 書

型 式 名 電動昇降リクライニングベット（モーターユニット [MFB-3UK]、[MFB-3UK SD]）

型 式 番 号

保 証 期 間 お買上げ日から1年間

お 買 上 げ 日

年	月	日
---	---	---

お 客 様		販 売 店
お 名 前	様	
電 話 番 号	(            )	
ご 住 所	〒	
		販売店印の捺印またはレシート、領収書を貼り付けてください

#### 保証規定

- 1 保証書記載の保証期間内に、取り扱い説明書などに従った正常なご使用状態で故障した場合には、お買上げ店または当社が無料修理いたします。
- 2 保証期間内であっても、次の場合は有料修理となります。
  - ① 不当な修理や改造による故障または損傷した場合
  - ② お取り扱いの不注意または誤ったご使用方法による故障や損傷した場合
  - ③ 故障原因が本機以外（天災、火災、納入後の移動、その他不測の事故等）にあつて修理と経費と時間を要する場合
  - ④ 本保証書の所定事項の未記入および不明確な場合
  - ⑤ 本保証書の提示が無い場合
- 3 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan

保証期間内に故障して無料修理を受ける場合には、お買上げ店または当社に本書を提示ください。



大 商 産 業 株 式 会 社

〒831-0034 福岡県大川市一本954  
Tel : 0944-88-2131 Fax : 0944-88-2107  
e-mail : kagu@daisho.info

