



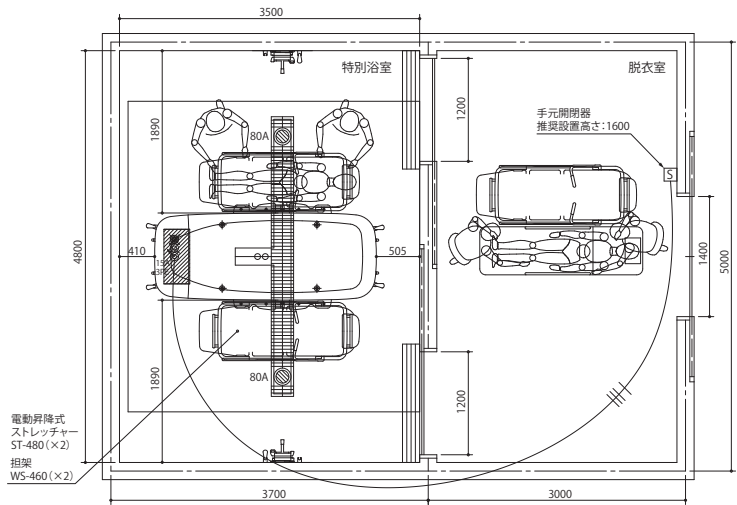

浴槽 ROB-460C

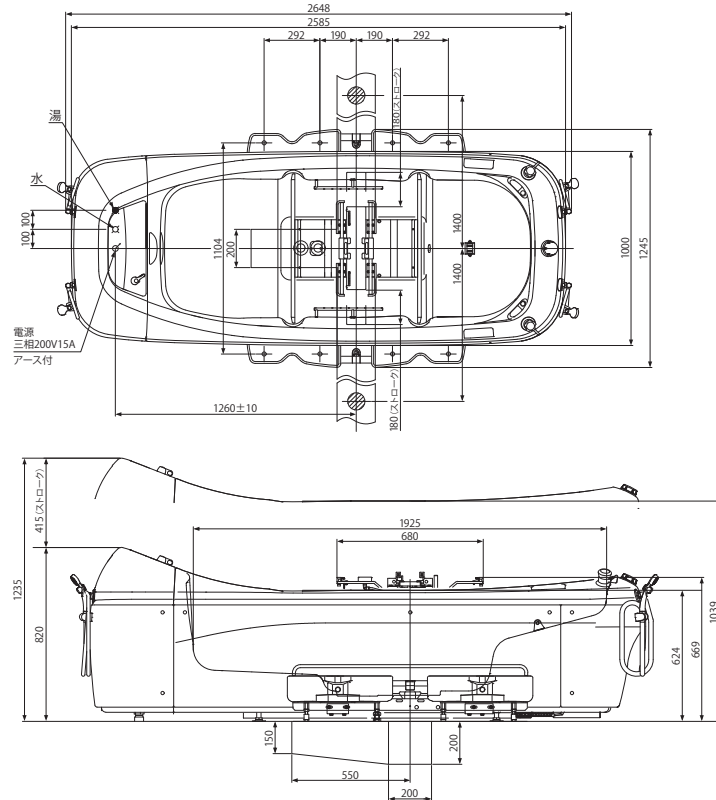

設備	仕様	工事区分
給湯水	給湯温度 : 60℃～65℃ (立ち上がり位置での温度) 給湯水圧力 : 120～150kPa (1.2～1.5kgf/cm ²) (圧力変動を極力避けてください) 〔設備〕 立ち上げ : 各 20A 床面ボールバルブ止め 立ち上げ高さ : FL+120 以内に収めてください 各々、浴室または浴室近辺に元バルブを設置ください。	設備工事
排水	排水ビッド : 深さ 200 mm 溝幅 200 mm 排水目皿 : 80A × 2ヶ所 浴槽容量 : 450L 必要排水能力 : 0～60 秒 150L	建築工事 設備工事
電源	電圧 : 三相 200V 50/60Hz 所要電源容量 : 1000/800 VA 〔設備〕 立ち上げ : PF 管呼び16 床面立ち上げ 長さ : 1500mm 電線 : 1.6mm 又は 2.0mm ² × 4 芯 PF 管端より 300 出してください アース : D 種接地工事 手元開閉器 : 三相 200V15A 防雨型 (浴室外に設置ください) 漏電遮断器 : 三相 200V15A (浴室外の配電盤に設置ください) 高感度高速型 感度電流 30mA 動作時間 0.1 秒以内 ※電源は単独の専用回路にしてください。	電気工事

浴槽		
型式	ROB-460 C,R,L	ROB-465 R,L
外形寸法	C : 2648 × 1245 × 820～1235mm R/L : 2648 × 1130 × 820～1235mm	2648 × 1130 × 820～1235mm
浴槽内寸法	1925 × 735 × 450mm	
昇降ストローク	415mm	
質量	約 460kg	約 450kg
浴槽容量	約 450L	
実使用湯量	約 380L (入浴者 165cm、65kg)	
電源	三相 200V 15A	
電力	600/700W (50/60Hz)	600/700W (50/60Hz) ※
電源入力	1000/800VA (50/60Hz)	1000/800VA (50/60Hz) ※
材質	浴槽部・カバー / FRP フレーム / スチール・粉体塗装仕上 レール台 / ステンレス	
オプション	—	気泡浴装置 : ROB-60 塩素殺菌装置 : ROB-65

※ オプション付の仕様です。

担架		
型式	WS-460	WS-465
外形寸法	1950 × 700 × 275mm	
質量	約 40kg	
材質	担架面・サイドフェンス / プラスチック フレーム・手すり / ステンレス	
機能	上肢用サイドフェンス・フットガード付	—
付属品	マット・安全ベルト	

電動昇降式ストレッチャー		
型式	ST-480	ストレッチャー (固定式) ST-470
外形寸法	1640 × 682 × 485～720mm	1625 × 682 × 720mm
担架面高さ	500～735mm	735mm
質量	約 90kg	約 50kg
最大使用者体重	100kg	
電源	バッテリー DC24V	—
材質	フレーム / ステンレス・一部粉体塗装仕上 水受盤 / プラスチック 中央スライド式水受盤 / ステンレス・粉体塗装仕上	
機能	キャスター / トータルロック	
付属品	バッテリー (1 個)・充電器	—

洗浄台		
型式	NW-470	
外形寸法	1630 × 795 × 720mm	
担架面高さ	735mm	
質量	約 60kg	
材質	フレーム / ステンレス・一部粉体塗装仕上 水受盤 / プラスチック 中央スライド式水受盤 / ステンレス・粉体塗装仕上	

※ 仕様及び外観は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

操作しやすく、安全で、お手入れしやすい。
介助する方のニーズにお応えした仰臥位浴槽です。

「ゆとり」ある入浴ケアが行えるよう、
介護エイドバス「ロベリア」は、介助する方のニーズを取り入れ
入浴ケアの労力・不安を軽減しました。
さらにデザイン性も向上し、より心地よい時間を生み出します。

Simple Operation

操作がしやすい

Safety & Security


安全機能で
安心をサポート

Easy Maintenance

入浴後の
お手入れにも配慮



2つの機能が入浴介助の労力を大幅に軽減します。

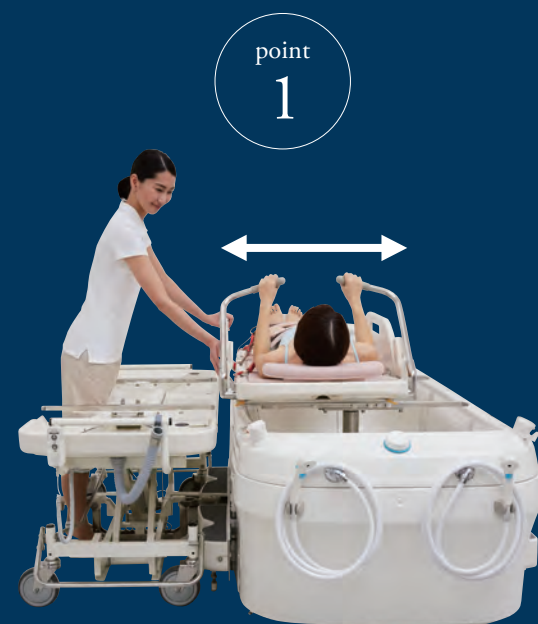

前傾姿勢を解消する オートスライド機構

担架の自動送り込み量は180mm。無理な前傾姿勢をとることなく担架を送り込めます。スライド速度も一定で、入浴者も安心です。

※ROB-460のみ




浴槽に近づきやすくする 中央スライド式水受盤

ストレッチャーを浴槽に接続し、腿を押しあてると、ストレッチャーの側面が凹みます。浴槽に近づきやすくなり、腰をかがめず無理のない姿勢で担架を送り込めます。

Simple Operation

操作がしやすい

シンプルかつスムーズに操作することができ、よりゆとりあるケアに繋がります。

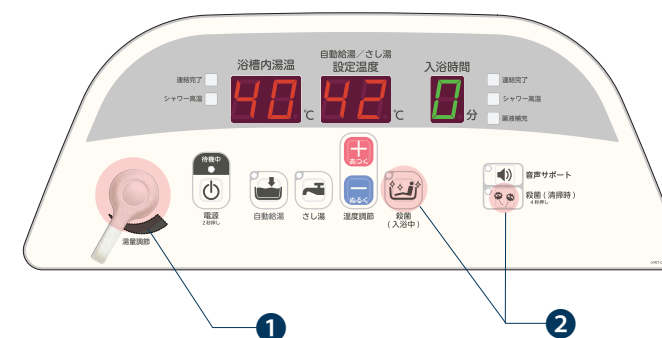

操作に迷わない「ケアサポートパネル」と音声サポート「Sナビ」

わかりやすいイラスト付きのスイッチに加え、操作を音声でサポート。はじめて操作する方でも、迷わずスムーズに介助できます。

- ① 入浴者に合わせてさし湯の量が調整できます。
- ② 清掃時に機器を殺菌する「殺菌(清掃時)」と、入浴中のお湯を殺菌する「殺菌(入浴中)」の2つの塩素殺菌を装備しています。



手が届きやすいサイド操作部

介助する方の立ち位置から、楽な姿勢で操作しやすい位置に設置しました。



介助しやすい浴槽フォルム

浴槽下部を凹ませることで、入浴者に近づきやすくなり、自然な姿勢で介助が行えます。



識別しやすい操作レバー

操作に関わるレバーは識別しやすい黄色に着色しました。



上限お知らせランプ付リモコン

ストレッチャーの上限位置がリモコンのランプで確認できます。

Safety & Security

安全機能で安心をサポート

万が一のミスを防げるよう、さまざまな状況に対応できる安全機能を装備しました。

まさかのミスに備えた 担架スライド防止装置

ストレッチャーが浴槽に正しく連結されるまで、担架がスライドしない安全設計です*。連結状況は「連結完了ランプ」と「メロディー」でお知らせ。思わず押しすぎても、ストッパーが担架の落下を防ぎます。

※出浴時：ROB-460のみ



転落を防ぐ 大型サイドフェンス

大型サイドフェンスに加え、上肢用サイドフェンスを装備。身体が担架からはみ出るのを防ぐので、安心して介助が行えます。



※WS-465は上肢用サイドフェンスがありません。

非常用浴槽下降レバー

万が一入浴中に停電になった場合でも、レバーを回せば浴槽を下降させることができます。

火傷の危険を防止する 温度管理システム

湯温は電子制御ミキシングによりワンタッチで設定できます。給湯温度が46℃以上になると給湯が自動停止。シャワー温度が43℃以上になるとケアサポートパネルのランプが点滅して危険をお知らせします。

ROB-460のみ：浴槽内湯温が44℃以上では、オートスライドが作動しない2重の安全機構です。



Easy Maintenance

入浴後のお手入れにも配慮

お掃除しやすい形状で、入浴後のお手入れの労力を軽減しました。


充電が簡単な着脱式バッテリー

バッテリーは取り外して充電できるので、ストレッチャーをコンセント位置まで移動させる手間がいりません。 ※ST-480のみ



脱衣室や廊下が濡れにくい 水受盤

素早く排水でき、水切れのよい設計です。脱衣室や廊下での水の滴りが少なくなるよう担架の滴を受け止めます。

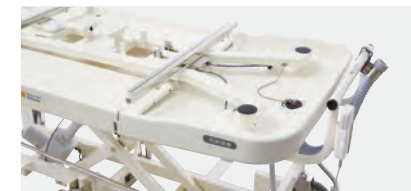

お手入れしやすい担架

担架カバー部は簡単に取り外しできるので、カバーの裏側やフレームの汚れも掃除しやすく衛生的です。



清掃しやすい浴槽底面

汚れがたまりにくく、水はけがよくなりました。




[浴槽]




スタンダードタイプ ROB-460 シンプルタイプ ROB-465

[担架]

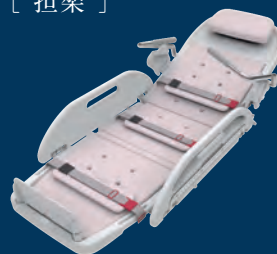


WS-460

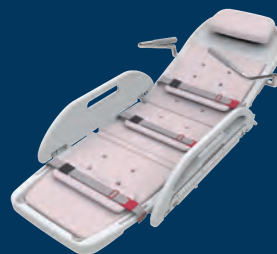


WS-465

[ストレッチャー]

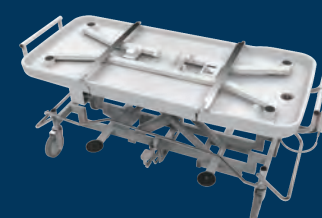


電動昇降式ストレッチャー ST-480

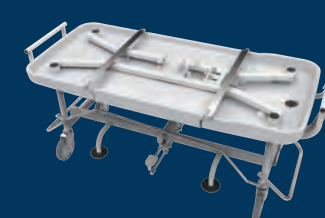

ストレッチャー（固定式） ST-470

[洗浄台]

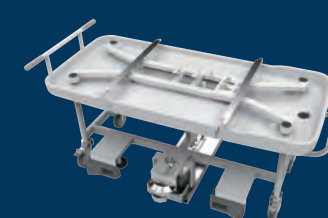

NW-470