

■タイプ



RAL-300R/L


左右どちらかのリフト位置が選べます。



RAL-400


1台の浴槽に2台のリフトを配置したデュアルタイプです。
短時間に多くのご利用者に入浴していただけます。

■標準配置図（RAL-300R）

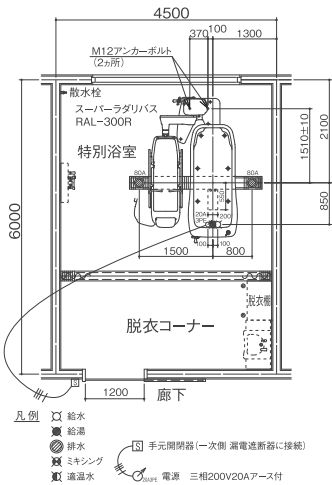

設 備	仕 様	工事区分
給 湯 水	給湯温度：60℃～65℃(立ち上がり位置での温度) 給湯水圧力：120～150kPa(1.2～1.5kgf/cm ²) (圧力変動を極力避けてください) 湯水圧力比<設 備>：2:1～1:2以内 立ち上げ立ち上げ高さ：各25A 床面ソケットプラグ止め ：FL+10～50 各々、浴室または浴室近辺に元バルブを設置ください。	設備工事
排 水	排水ピット：深さ200mm 排水目皿：80Aトランプ付×2ヶ所(排水ピット内に設置)	建築工事 設備工事
電 源	電 圧：三相200V 50 / 60Hz 所要電源容量：1130 / 1180VA(1130 / 1180VA) <設 備>：PF管呼び16 床面立ち上げ 長さ1700mm 立ち上げ電 線：1.6mm又は2.0mm×4芯 PF管端より300出してください。 アース：D種接地工事 手元開閉器：三相200V20A防雨型(浴室外に設置ください) 漏電遮断器：三相200V20A(浴室外の配電盤に設置ください) 高感度高速度 感度電流30mA 動作時間0.1秒以内 ※電源は単独の専用回路にしてください。	電気工事
埋込みアンカー	アンカーボルトは床コンクリート打ち前に鉄筋に溶接固定し、仕上げてください。 注1) 埋入路は有効開口1200以上、有効通路幅2300以上が必要です。	建築工事

■浴槽 RAL-300R

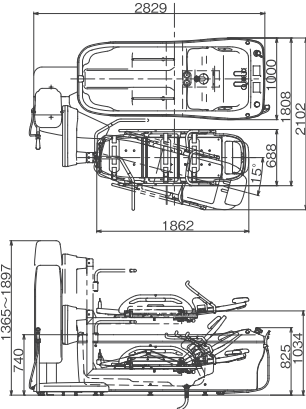

■仕様

名称・型番	寸法	構造・材質	設備規格	備考
RAL-300R/L	担架が浴槽外：2829(L)×1808(W)×1597～1897(H)mm 担架が浴槽内：2829(L)×1230(W)×1365～1897(H)mm		電源：三相200V・20A	電源入力：1130VA(50Hz) 1180VA(60Hz) 電力：760W(50Hz) 970W(60Hz) 質量：約640kg
リフト	外形寸法：922(L)×875(W)×1365～1897(H)mm	フレーム：ステンレス・一部研磨仕上げ カバー：FRP		質量：約350kg 昇降方式：電動油圧・回転アーム式
浴槽	外形寸法：2295(L)×1000(W)×825(H)mm 浴槽内寸法：2030(L)×780(W)×630(H)mm 浴槽縁高さ：740mm	フレーム：スチール・粉体塗装仕上げ 浴槽部・カバー：FRP		容量：600ℓ 質量：約250kg 自動給湯システム 清掃モード 電子制御ミキシング ハンドシャワー 専用シャワー・ミキシングバルブ 緊急下降バルブ 気泡浴装置(オプション) 塩素殺菌装置(オプション) 漏電ブレーカー
担架	外形寸法：1862(L)×688(W)mm 担架面最大高さ：1034mm	フレーム：ステンレス・電解研磨仕上げ 担架面：プラスチック(ポリプロピレン) 手すり：ステンレス、プラスチック(PVC) サイドフェンス：プラスチック		質量：約40kg 自動・手動リクライニング 下部屈曲機構 スイング機構 フットガード 安全ベルト

名称・型番	寸法	構造・材質	設備規格	備考
RAL-400	担架が浴槽外：2829(L)×2615(W)×1597～1897(H)mm 担架が浴槽内：2829(L)×2038(W)×1365～1897(H)mm		電源：三相200V・20A	電源入力：1130VA(50Hz) 1180VA(60Hz) 電力：760W(50Hz) 970W(60Hz) 質量：約1030kg
リフト	外形寸法：922(L)×1460(W)×1365～1897(H)mm	フレーム：ステンレス・一部研磨仕上げ カバー：FRP		質量：約350kg(1台分) 昇降方式：電動油圧・回転アーム式
浴槽・担架	RAL-300R/Lと同じ			

※上記仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承下さい。

酒井医療株式会社

東京都新宿区山吹町358-6 〒162-0801
www.sakaimed.co.jp

札幌営業所 (北海道)
Tel: 011-780-5570
盛岡営業所 (青森・秋田・岩手)
Tel: 019-656-5336
仙台営業所 (宮城・山形・福島)
Tel: 022-390-6840
新潟営業所 (新潟)
Tel: 025-286-1788
埼玉営業所 (埼玉・群馬・栃木)
Tel: 048-662-4560
千葉営業所 (千葉・茨城)
Tel: 047-497-3691
東京営業所 (東京都23区)
Tel: 03-5227-5779
西東京営業所 (東京都下)
Tel: 042-330-7621
横浜営業所 (神奈川・静岡)
Tel: 045-590-5485
名古屋営業所 (愛知・岐阜・三重・石川・富山・福井)
Tel: 052-263-9867
長野営業所 (山梨・長野)
Tel: 0263-40-5014
関西第1営業所 (京都・滋賀・奈良・和歌山)
Tel: 06-6386-3545
関西第2営業所 (大阪)
Tel: 06-6386-3545
山陽営業所 (兵庫・岡山)
Tel: 079-243-2530
広島営業所 (広島・島根・鳥取・山口)
Tel: 082-830-0420
高松営業所 (香川・徳島・愛媛・高知)
Tel: 087-865-0715
福岡営業所 (福岡・長崎・大分・佐賀・熊本・沖縄)
Tel: 092-573-7133
鹿児島営業所 (鹿児島・宮崎)
Tel: 099-252-5251

取扱店



A122 2013.07

Super Radali

スーパーラダリバス RAL-300R/L

スーパーラダリバスデュアル RAL-400

オプション 補助手すり／気泡浴装置／塩素殺菌装置

仰臥位でも、長座位でも、

幅広い入浴スタイルを1台で。



仰臥位・長座位が選べる2WAY浴槽。移乗しやすくゆったりと安全に入浴できます。

2way

移乗

ワンタッチで担架停止位置を移乗しやすい高さに設定できるので、仰臥位入浴でも長座位入浴でも1台で対応できます。

 仰臥位入浴の場合


移乗時の担架自動停止位置は床から**705mm**。

 長座位入浴の場合


移乗時の担架自動停止位置は床から**405mm**。

Relaxed

入浴

回転アーム

なめらかな動きで安心して入浴できます。



ご利用者のそばに
寄り添って介助できます

ゆったり入浴

担架が自動リクライニングし、
仰臥位でも長座位でもゆったり入浴していただけます。

 仰臥位入浴の場合

 長座位入浴の場合


満水位から7.5cm下で給湯が一旦停止、その後、ご利用者に合わせて「差し湯」で水位を調整することができます。

Easy

操作

使いやすさ



わかりやすい液晶タッチパネル

温度設定や適正水位までの湯はりをワンタッチで操作できます。また、入浴時間計により適切な入浴管理ができます。



スイング機構


担架を水平に15°スイングさせることができるため、両側から洗身介助ができます。

安全



上肢用・下肢用サイドフェンス

担架上で安心して洗身介助ができます。

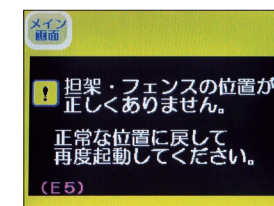

液晶パネルでのお知らせ機能

安全にお使い頂くための情報を画面で確認できます。

湯温管理システム

給湯温度が46℃以上になると湯はりを自動停止。さらに浴槽内湯温が44℃以上では、担架が旋回しない二重の安全機構です。

Option

① 補助手すり RAL-33R/L

洗い場へ移動することなく、立位での洗身介助が担架近くで行えるため、介助動線を大幅に短縮できます。



② 気泡浴装置 RAL-31

③ 塩素殺菌装置 RAL-32

浴槽や配管を殺菌する「浴槽殺菌」と入浴中のお湯を殺菌する「浴槽水殺菌」の2つの塩素殺菌モードを備えています。

関連製品 入浴時の抱きかかえ移乗をゼロに。

① 着衣ベッド CBM-100

着衣がしやすいマット幅62cmのワイド設計です。移乗しやすいようマット面の高さを48cm～81cmまで調節ができます。



② 着衣チェア CBT-100

シート部がフルフラットになり、幅57cmのワイド設計のため、着衣用ベッドとしてご利用いただけます。シート面高さが48cm～76cmまで電動で昇降します。



③ ローラースライドフレキシ RSF/MRSF

ご利用者の身体の下に敷き、ボードの回転を利用して移乗することで、抱きかかえを解消します。

