



標準配置図

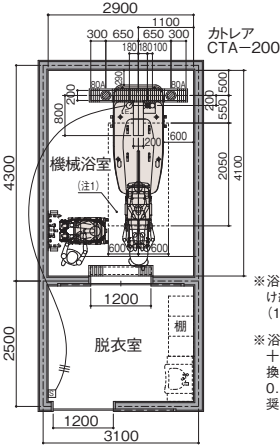


※浴室の床勾配はできるだけ緩やかにしてください。  
(1/150位まで)

※浴室の通気、換気には十分注意してください。  
換気能力は1m<sup>2</sup>あたり0.33m<sup>3</sup>/min以上を推奨いたします。

浴槽 CTA-200  
(単位:mm)

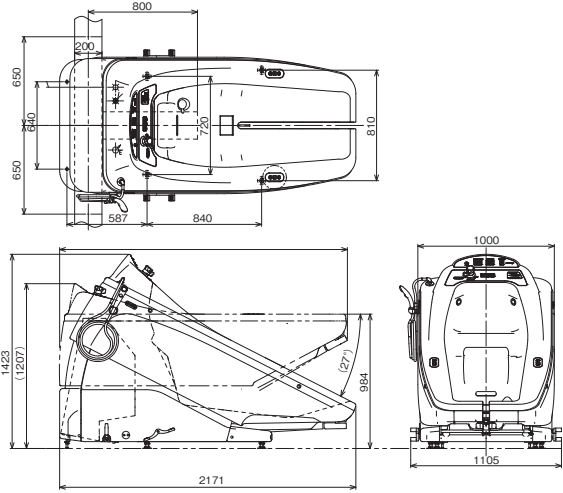

入浴用車椅子  
BWC-165  
(単位:mm)

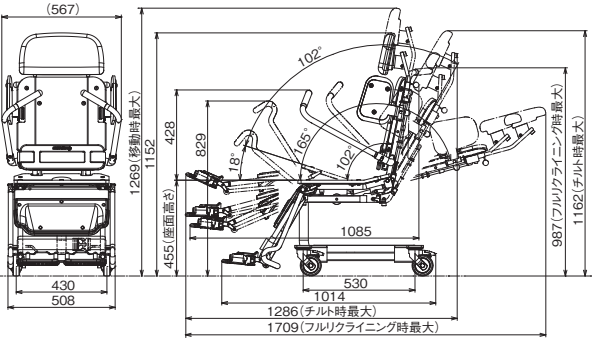

| 設備  | 仕様                                                                                                                                                                                                                                                  | 工事区分         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 給湯水 | 給湯温度 : 60℃～65℃(立ち上がり位置での温度)<br>給湯水圧力:150～200kPa(1.5～2.0kgf/cm <sup>2</sup> )※圧力変動を極力避けてください。<br>湯水圧力比:2:1～1:2以内 流量:19.1L以上/min(湯水共)<br>給湯能力(号数)50号<br>(設備)立ち上げ:各20A 床面ボールバルブ止め<br>立ち上げ高さFL+120以内に収めてください<br>※各々、浴室または浴室近辺に元バルブを設置ください。              | 設備工事         |
| 排水  | 排水ピット:深さ200mm 溝幅200mm<br>排水目皿:80A×2ヶ所<br>浴槽容量:283L<br>必要排水能力:0～60秒 249L                                                                                                                                                                             | 建築工事<br>設備工事 |
| 電源  | 電圧:単相100V 50/60Hz 所要電容量:640/780VA<br>(設備)立ち上げPF管呼び6 床面立ち上げ 長さ1000mm<br>電線:1.8mm又は2.0mm×3芯 PF管端より300出してください。<br>アース:D種接地工事<br>手元開閉器:単相100V15A防雨型(浴室外に設置ください)<br>漏電遮断器:単相100V15A(浴室外の電盤に設置ください)<br>高感度高速度型 感度電流30mA 動作時間0.1秒以内<br>※電源は単独の専用回路にしてください。 | 電気工事         |

注1) ---- エリア内は車椅子が通過するため排水勾配を1/200以下とし、他の床部とならからにつなげてください。  
注2) 排水路は有効開口1200mm以上、有効通路幅2000mm以上必要です。

スクーピングバス カトレア CTA-200 仕様

| 名称・型番                                     | 寸法                                                                                                                       | 構造・材質                                                                                                                                                                                                                            | 設備規格                                                                                                  | 備 考                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 浴槽<br>CTA-200                             | 外形寸法<br>2171(L)×1105(W)×1423(H)mm<br>浴槽内寸法<br>1648(L)×612(W)×577(D)mm                                                    | 浴槽:カーバー/FRP<br>フレーム/スチール/粉体塗装仕上げ                                                                                                                                                                                                 | 電源:単相100V 15A<br>電力:450W(50Hz) 670W(60Hz)<br>電源入力:640VA(50Hz)、780VA(60Hz)<br>給湯水:各20A<br>排水:80A振込内2ヶ所 | 浴槽容量:約283L<br>実使用湯量:約182L(入浴者165cm、65kg)<br>質量:約315kg<br>貯湯タンク容量:約270L<br>オプション:気泡浴装置 CTA-10、シールカーバー CTA-20                                          |
| 入浴用車椅子<br>(チルト&<br>フルリクライニング式)<br>BWC-165 | 外形寸法<br>標準姿勢:<br>1014(L)×567(W)×1269(H)mm<br>チルト時:<br>1286(L)×567(W)×1162(H)mm<br>フルリクライニング時:<br>1709(L)×567(W)×987(H)mm | フレーム/ステンレス<br>ヘッドレスト/プラスチック(PE)<br>フットレスト/プラスチック(PP)<br>マット(背もたれ、座面)/プラスチック(EVA)<br>マット(レッグサポート)/プラスチック(PE)<br>アーム(サイドサポート)/プラスチック(EVA)<br>アームサポート/ステンレス(グリップ付)<br>サポートハンドル/ステンレス(グリップ付)<br>パッド/プラスチック(PE):1ヶ<br>踵受け/プラスチック(EVA) | ---                                                                                                   | 質量:約47kg<br>最大使用者体重:100kg<br>座面高さ:455mm<br>キャスター:φ100mm(4輪にストッパー付)<br>背もたれ角度(水平より):標準姿勢102°、<br>チルト時102°、フルリクライニング時165°<br>座面角度(水平より):標準姿勢0°、チルト時18° |
| 入浴用車椅子<br>(チルト式)<br>BWC-155               | 外形寸法<br>標準姿勢:<br>1014(L)×567(W)×1269(H)mm<br>チルト時:<br>1264(L)×567(W)×1162(H)mm                                           | フレーム/ステンレス<br>ヘッドレスト/プラスチック(PE)<br>フットレスト/プラスチック(PP)<br>マット(背もたれ、座面)/プラスチック(EVA)<br>マット(レッグサポート)/プラスチック(PE)<br>アームサポート/ステンレス(グリップ付)<br>パッド/プラスチック(PE):1ヶ<br>踵受け/プラスチック(EVA)                                                      | ---                                                                                                   | 質量:約41kg<br>最大使用者体重:100kg<br>座面高さ:455mm<br>キャスター:φ100mm(4輪にストッパー付)<br>背もたれ角度(水平より):標準姿勢102°、チルト時102°<br>座面角度(水平より):標準姿勢0°、チルト時18°                    |

※上記仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

酒井医療株式会社

東京都新宿区山吹町358-6 〒162-0801  
www.sakaimed.co.jp

|         |                     |                  |
|---------|---------------------|------------------|
| 札幌営業所   | (北海道)               | Tel:011-780-5570 |
| 盛岡営業所   | (青森・秋田・岩手)          | Tel:019-656-5336 |
| 仙台営業所   | (宮城・山形・福島)          | Tel:022-390-6840 |
| 新潟営業所   | (新潟)                | Tel:025-278-4777 |
| 長野営業所   | (山梨・長野)             | Tel:0263-40-5014 |
| 埼玉営業所   | (埼玉・群馬・栃木)          | Tel:048-662-4560 |
| 千葉営業所   | (千葉・茨城)             | Tel:047-497-3691 |
| 東京第1営業所 | (東京23区)             | Tel:03-5227-5779 |
| 東京第2営業所 | (東京都下)              | Tel:03-5227-5779 |
|         | (フィジオ)              | Tel:03-5227-5776 |
| 横浜営業所   | (神奈川・静岡)            | Tel:045-590-5485 |
| 中部第1営業所 | (愛知)                | Tel:052-263-9867 |
| 中部第2営業所 | (岐阜・三重)             | Tel:052-263-9867 |
| 金沢営業所   | (石川・富山・福井)          | Tel:076-292-1161 |
| 関西第1営業所 | (京都・滋賀・奈良・和歌山)      | Tel:06-6386-3545 |
| 関西第2営業所 | (大阪)                | Tel:06-6386-3545 |
| 神戸営業所   | (兵庫)                | Tel:078-579-6236 |
| 広島営業所   | (広島・岡山・山口・鳥取・島根)    | Tel:082-830-0420 |
| 高松営業所   | (香川・徳島・愛媛・高知)       | Tel:087-865-0715 |
| 福岡営業所   | (福岡・長崎・大分・佐賀・熊本・沖縄) | Tel:092-588-9331 |
| 鹿児島営業所  | (鹿児島・宮崎)            | Tel:099-252-5251 |

取扱店



# 初めて使う方でも安心の簡単操作。 一人でもスムーズに入浴ケアが行えます。

一人ひとりお湯を入れ替える座位入浴装置カトレアが、さらに簡単に操作できるようになりました。初めての方でも戸惑うことなく、安心して介助にあたれます。



## SAFETY

### 安心して見守れる対面入浴。

介助する方とご利用者が向かい合う進入方式なので、全身の身体状況を確認でき、より安全に入浴できます。

#### 姿勢を安定させるチルト機構


背もたれと座面の角度を保ったまま後ろに倒れる「チルト機構」。臀部にかかる体圧を背中に分散でき、姿勢を安定させます。



視認性に優れた  
大型操作パネル



一旦停止位置  
(浴槽縁-11cm)

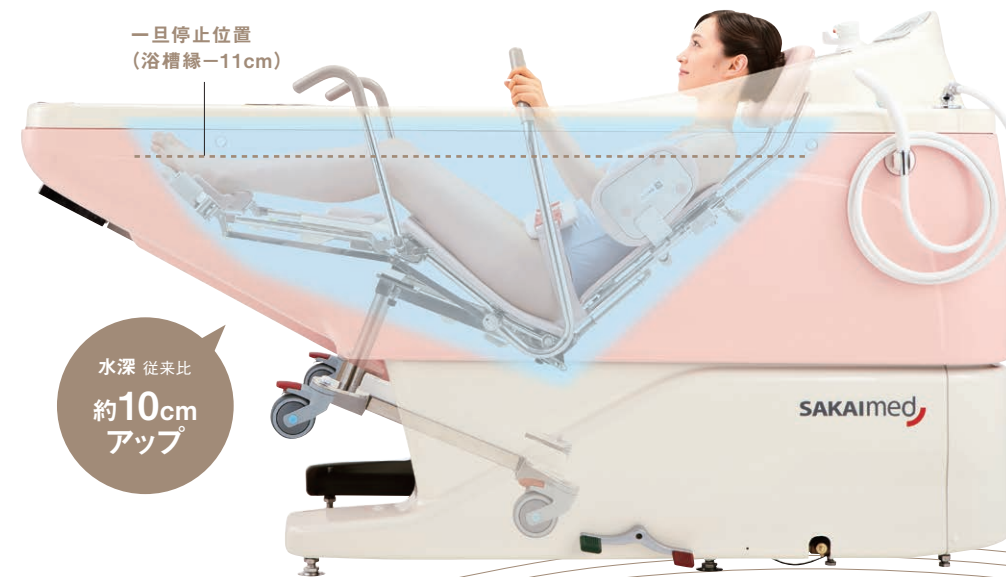

水深 従来比  
約10cm  
アップ

## RELAXED

### 肩までゆったり浸かれる浴槽水深。

浴槽水深が約10cmアップ(従来比)。大柄な方でもたっぷり浸かれる深さです。また、給湯時には浴槽縁から11cmの位置で一旦停止し、スイッチひとつで必要な分だけ足し湯ができます。

#### 火傷の危険を防止する 湯温管理システム

貯湯タンクには36～47℃のお湯、浴槽には36～45℃のお湯しか送湯できない二重の安全装置を内蔵。ハンドシャワーの湯温が44℃以上の時には操作パネルのハンドシャワー高温警告ランプが点滅してお知らせします。



## SAVING

### 1人でも安心して洗身が可能。

入浴用車椅子をフルリクライニングさせることで、臀部の洗身が1人で行えます。(BWC-165のみ)



転落を防止する上肢用サイドサポート  
洗身時には転落を防止、入浴時には適切な姿勢保持をサポートします。(BWC-165のみ)



椅子の後ろからのアプローチが可能  
ヘッドレストを引き上げれば、椅子の後ろから座り直しの介助が行えます。

## EASY

### 簡単操作でスムーズに浴槽と連結。

入浴用車椅子を一体構造にすることで、連結時や操作中の音と振動を軽減。また、浴槽との連結操作がスムーズに行えます。

#### スイッチを押すだけの 簡単操作

操作がシンプルなので、初めて使う方でも迷うことなく安心して操作できます。



#### 掃除がしやすい シンプル構造

浴槽内に凹凸がなく、浴槽下もすっきりとした構造なので、浴槽や浴室の掃除が簡単です。



#### オプション

##### 気泡浴装置 CTA-10

音の静かなエアープンプで発生させた気泡による快適な入浴が楽しめます。

##### シールカバー CTA-20

浴槽底面中央部のシール部を覆い、フットケアの際にご利用者の足と接触するのを防ぎます。

#### 2タイプの 入浴用車椅子

BWC-165  
(チルト&フルリクライニング式)



BWC-155  
(チルト式)

