

- カラー：ブルーマリーヌ（ステッキ部）＋サテンブラック（四点脚部）
：サテンブラック（ステッキ部）＋サテンブラック（四点脚部）
- 杖のサイズ： 約73～約95.5cm 2.5cmピッチ 10段階
- 四点脚部の大きさ：縦22.5cm x 横15.5cm
- 重量：約400g
- 耐荷重：80kg
- 材質：ステッキ部分：マグネシウム合金、グリップ：ゴムスポンジ、ストラップ：
織、プッシュボタン：真鍮、輪ネジ：アルミ、脚先ゴム：合成ゴム

部品交換について

- 脚ゴムが摩耗したり破損した際には、使用を中止し新しい脚ゴムと交換してください。
- 交換用の脚ゴムは、当社またはお買い求めの販売店で購入してください。
- グリップが摩耗したり破損した際には、使用を中止し新しいグリップと交換してください。
- 交換用のグリップは、お買い求めの販売店で購入してください。

保証・修理について

- 本取扱説明書記載の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
 - 誤使用、不当な修理・改造による故障。
 - 本品納入後の移動や輸送或いは落下等による故障。
 - 火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
 - 業務用として使用された場合。
 - 消耗部品、付属部品の交換。
 - 本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 万一保証期間内に、上記に基づく正常な使用状態での故障の節は修理いたします。

製品名・型番 アルキメイト2 AM-04-M-BM□ AM-04-M-SB□	お買い上げ日	保証期間 お買い上げ日より1年間
お客様：ご芳名	ご住所・お電話番号	
販売店：店名	住所・電話	

＜製品についてのお問い合わせ先＞
株式会社マクルウ（製造元）
〒418-0023 静岡県富士宮市山本2 8 6 - 1
TEL 0544-24-5900（平日9:00-17:00）
MAIL admin@macrw.xsrv.jp

アルキメイト2

取扱説明書

【ご使用前に必ずお読みください】

【保存用】

この度は、マグネシウム合金杖「アルキメイト2」をお買い上げいただき誠にありがとうございました。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。なお、お読みになった後はいつでもご覧いただけますよう、大切に保管してください。

表示マークについて



警告

この注意事項を守らなければ、死亡または重傷を負う可能性があります。



注意

この注意事項を守らなければ、怪我や製品が破損することがあります。

各部の名称




警告

本製品は、正しくお使いいただく範囲において十分な強度を持っておりますが、誤った方法でご使用をされた場合、耐荷重を超え局部的に曲がり等が発生する恐れがあります。



警告

この注意事項を守らなければ、死亡または重傷を負う可能性があります。

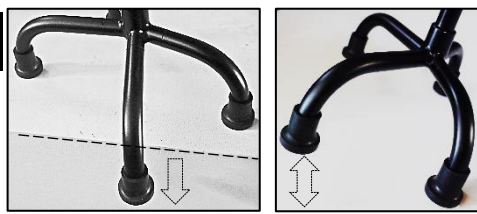- ご使用前に
- ご使用前に専門家（医師、理学療法士、ケアマネジャーなど）へご使用の可否をご確認ください。
- 使用場所について
- 溝や穴、くぼみなどが無い、平らな場所でご使用下さい。
 - 濡れた床やタイルなど、滑りやすい場所でご使用する際は、十分注意してご使用下さい。
 - 浴室内、ぬかみのある場所、砂利道等ではご使用をお控え下さい。
 - 段差等障害物のある場所、毛足の長い絨毯やゴザ等敷物の上ではご使用をお控え下さい。
 - 坂道や階段でご使用する際は、細心の注意を払ってご使用下さい。階段の踏み面に全ての脚が入り切らない場合はご使用をお控え下さい。
- 使用方法について
- 四点の脚部が同時に接地するようご注意ください。一点、又は二点だけで接地することの無いよう十分ご注意ください。
- 危険なご使用例→**
- 
- グリップを逆向きにして使用しないで下さい。
 - 右手用、左手用のセット方向と同じ側の手でご使用下さい。
 - 右手用、左手用のセット後、長さ調節後、プッシュボタンが大きく飛び出した状態を確認し、輪ネジをしっかりと締め付けてからご使用下さい。
 - 四点杖を両手で左右同時に使用しないで下さい。
 - 歩行時、杖を大きく前に出しすぎないように十分ご注意ください。
 - 耐荷重を超える無理な力をかけたり、全体重をかけるような使い方はお控え下さい。
 - パイプに穴を開けたり、他の部品の取り付けや取り替えはお控え下さい。
 - 輪ネジを締める際には、ネジ山がきちっとあっていることを確認し、無理にねじ込まないで下さい。
- 異常が発生した場合
- 杖の曲がり、四点脚部のガタツキ、プッシュボタンの異常等が発生した場合は、直ちに使用を中止していただき、販売店または製造元までお問い合わせください。




注意

この注意事項を守らなければ、怪我や製品が破損することがあります。

- ご使用前に
- 四点杖は、歩行訓練、補候補助の目的で使用する杖です。他の目的での使用はお控え下さい。
- 使用方法について
- ご使用される方に合わせて、右手用、左手用の設定及び長さの設定を行って下さい。また、その際には指をはさむことの無いよう十分ご注意ください。
- お手入れについて
- 乾拭きでお願いいたします。タワシなど金属での磨き、シンナー等での塗装剥がしは絶対にお止め下さい。
- 保管について
- 直射日光の当たる場所、極度に高温な場所での保管はお控えください。
 - 火気付近での保管はお控え下さい。


ご使用前の準備

- 右手用、左手用のセットを行ってください。
- ガタツキや異音、脚ゴムの劣化等異常のないことを確認してからご使用下さい。

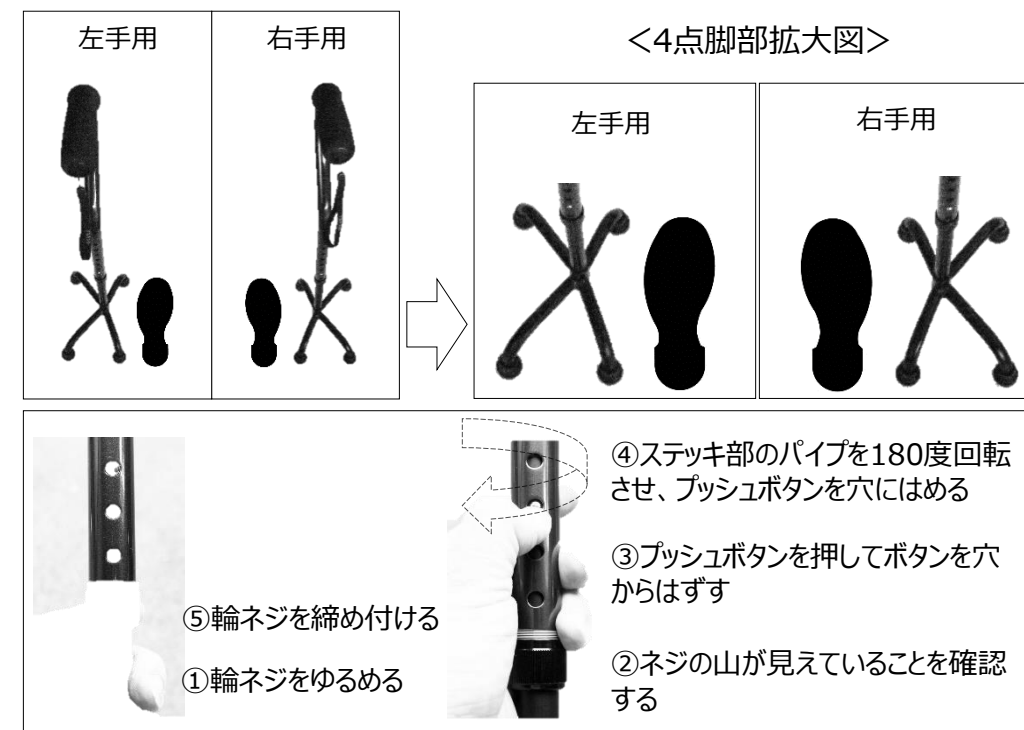

- ① 輪ネジをゆるめる。
- ② 輪ネジを1-2回転させ、ネジの山が見えていることを確認する。
- ③ プッシュボタンを押して穴からはずす。
- ④ ステッキ部のパイプを180度回転させ、プッシュボタンを穴にはめる。
- ⑤ 輪ネジを締め付ける。

- 長さ調整を行なって下さい。
- ガタツキや異音、脚ゴムの劣化等異常のないことを確認してからご使用下さい。

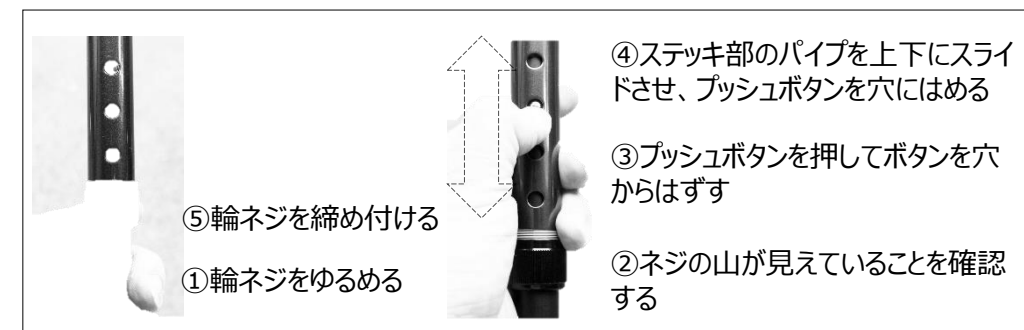

- ① 輪ネジをゆるめる。
- ② 輪ネジを1-2回転させ、ネジの山が見えていることを確認する。
- ③ プッシュボタンを押して穴からはずす。
- ④ ステッキ部のパイプを上下にスライドさせ、プッシュボタンを穴にはめる。
- ⑤ 輪ネジを締め付ける。



警告

- 右手用、左手用のセット後、及び長さ調整後、プッシュボタンが大きく飛び出した状態を確認して下さい。
- 輪ネジを締める際には、ネジ山がきちっとあっていることを確認し、無理にねじ込まないで下さい。
- ガタツキや異音、脚ゴムの劣化等異常のないことを確認してからご使用下さい。