

見守りセンサー Aisleep

ナースコール仕様


PW11-S1

■ ナースコール連動のアラーム

- 離床、座位、心拍数と呼吸数に関する4種類のアラームを、ナースコール分配器を介してナースコール端末に通知します。

ただしナースコール端末では、この4種類の種別はできません。

(例) 離床アラームまたは心拍数のアラームが発生した場合、ナースコール端末には、どちらも「アラーム着信」のようなメッセージとなります。

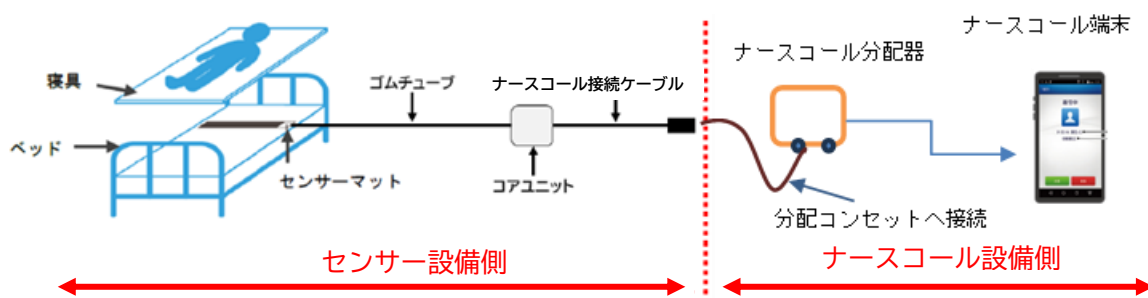

セットアップと接続

- ・ コアユニットの マット接続口① に、センサーマットを接続します。
- ・ コアユニットの ACアダプター差込口② に電源ケーブルを接続し、電源コンセントに繋がめます。
- ・ ナースコール接続ケーブルの樹脂コネクタを、差込口③ に接続します。
- ・ ナースコール接続ケーブルの 2P型コンセントを、ナースコール分配コンセントへ接続します。



ナースコール接続ケーブル
(樹脂コネクタ)の差込口

