

サイレン四脚杖



取扱説明書

□ 使用上の注意事項

- 必ず使用前に使用者の身長に合った高さに調節してください。
- 使用前に各部を点検してください。また杖先ゴムが摩耗してきたり、劣化してはずれやすくなったりした場合は早めに交換してください。
- 支柱が確実に固定されていること、止めネジにゆるみがないことなどを時々確認してください。
- 濡れたり凍ったりして滑りやすくなっている路面他、傾斜している場所では十分に注意してください。
- 道路の凹みが杖先がはまり込む場合があるため、十分に注意してください。
- 杖に強い衝撃や無理な力を与えないでください。
- 用途以外（例えば、登山用、護身用など）には使用しないでください。

□ 使用方法

1. 杖の先をつま先20cm前方に置いて、肘を140~150度に曲げた時が最適な高さです。
2. 調節ボタンを押しながらサイズ調節し、調節ボタンが穴に確実に入っていることを確認する。その後、シャフトロックを回して締めて確実に固定してください。
3. 杖のLEDライトや警告音の機能を使うには単4乾電池2個（別売）が要ります。乾電池を入れた後、警告音機能をオンにします。（グリップボタンを5秒以上押し続ける）
4. ライトはグリップボタンを押して簡単に角度調整できます。1回押すと遠くを照らします。2回押すと足元を照らします。3回押すとライトが消えます。
5. 警告音は杖が床に倒れると鳴ります。音を止めたい場合は杖を立てたり、グリップボタンを5秒以上押し続けると機能をオフにすると音が消えます。また、5秒以上押し続けると警告音機能がオンになります。（詳しい操作は3ページを参考してください。）

□ 各部の点検

- グリップ：使用前、杖のグリップとシャフト本体がぐらつかずよくつながっていることを確認する。
- シャフト：傷や亀裂が入っていないか、支柱が反っていないかを確認する。（杖の支柱の部分に傷や亀裂が入っていると、体重をかけたときに折れるなどの破損の危険性が高くなります。）
- 杖先ゴム：杖先ゴムが破損したり、摩耗していないことを確認する。
- シャフトロック：固定リングを締めた時、動かずよく固定できていることを確認する。
- 杖に水分がついていたり、泥等で汚れてないことを確認する。杖に水分がついていると支柱の部分が劣化しやすくなります。）


□ 使用後の保管方法

- 使用後は乾いた布でよごれをふき取り、乾かして保管してください。
- 油、潤滑油、ガソリン、その他の薬品などで洗浄すると塗装が剥がれる場合がありますので使用しないでください。
- 長時間使用の場合は、随時部品の状態を確認して随時部品の状態を確認し、必要に応じて部品を交換してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 熱いものの近くに製品を置くと、製品の変形や破損の恐れがありますのでご注意ください。
- 長時間使用しない場合、乾電池を取り外して保管してください。


ライト及びサイレンの使用法

□ LEDライト使用方法


1回押す：遠くを照らす。

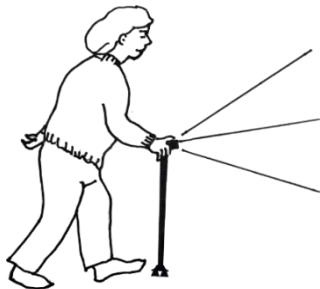

2回押す：足元を照らす。

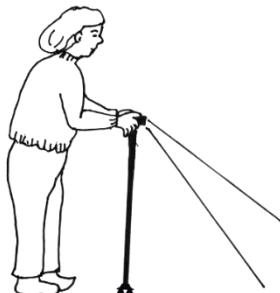

3回押す：ライトが消える。

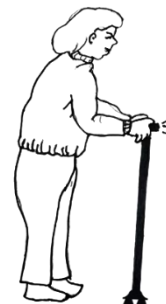

□ サイレン使用方法

グリップボタンを押して警告音のオン／オフ設定が可能。

オン：杖を使う前にボタンを5秒以上押し続けてオンにする。


オフ：杖を使わない時は同じくボタンを5秒以上押し続けてオフにする。

また使うときは同じく5秒以上押し続けオンにします。

BUTTON



警告音が鳴る時

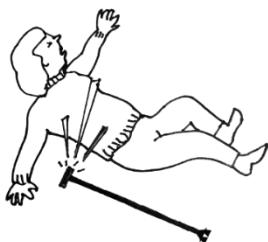


1. 床に倒れた時。
2. 倒れることと関係なく杖が横になっている時。

警告音が止まる時



1. 杖が立っている時。
2. グリップボタンを5秒以上押し続けて機能をオフにした時。

各部の名称及びサイズ

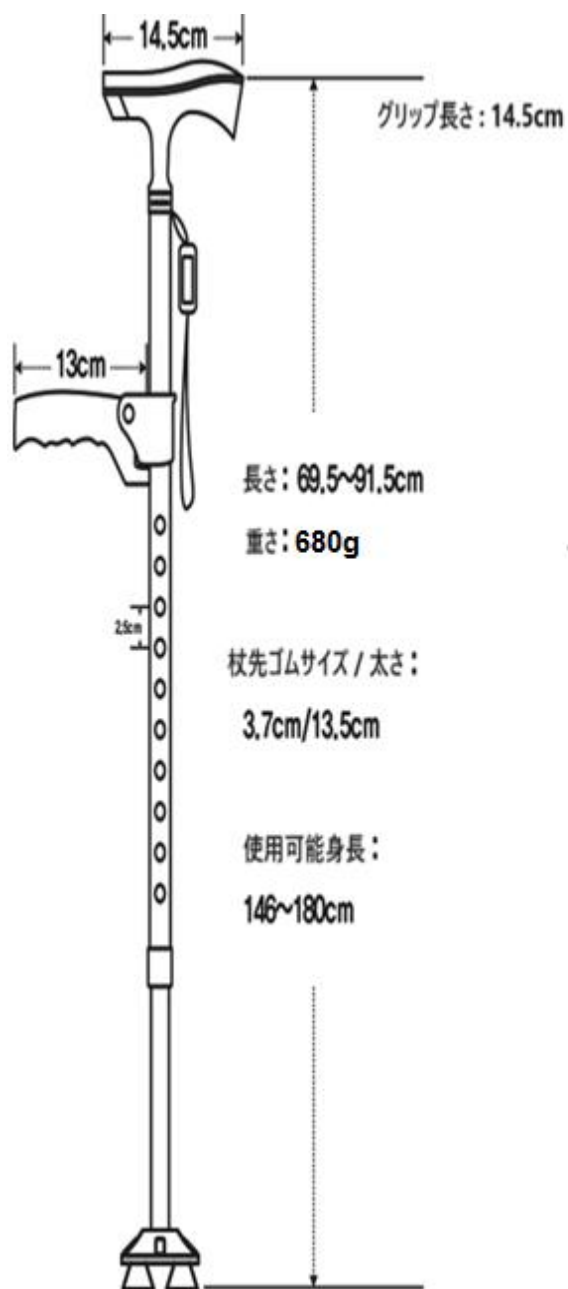

グリップ 長さ/素材	14.5cm / プラスチック
シャフト口径 サイズ/素材	22φ + 19φ / アルミニウム合金
サイズ調節方式	ボタン式
調節穴サイズ	2.5cm間隔 / 10個
重さ	680g
最低長さ	69.5cm
最大長さ	91.5cm
杖先ゴム底径 サイズ/素材	各3.7cm / 合成ゴム
使用可能身長	146cm - 180cm
最大荷重	100kgまで

■グリップのカバーが付属しています。