

三笠ではバラエティ豊富な
靴下もご用意しています!!

一部商品
ご紹介!

じじじ

直押し!



TSUBO

レシピ

マップの裏側に
凸状のツブがついてる!



絹のおもてなし

SILK NO OMOTENASHI

高品質シルクで
美肌生活。



肌にあたる
部分は
シルク



地域の活性化のため、綿を種から育てる
「めんかちゃんプロジェクト」を行っています



種まきの様子 (奈良県大和高田市)



めんかちゃん
プロジェクト

めんかちゃん 動く!
LINEスタンプ販売中!

ありがとう



めんかちゃん

株式会社 三笠

お問い合わせ・お客様センター
10:00-17:00<月~金(祝日を除く)>

0120-419-240

※不良品以外の返品はご遠慮下さい。



公式HP



楽天サイト

手指の動作トレーニング手袋

にぎるくん®

カンタン 使用方法

ガイドブック

にぎるくん
専用サイト



にぎるくん
開発秘話もあるよ!



にぎるくん

MIKASA

※この外箱と同封のガイドブックは、使用の際にはよく読み、大切に保管してください。

にぎるくん[®] をお使いになる方へ

手指の動作トレーニング手袋「にぎるくん[®]」は、
「社会貢献や地域医療の充実に役立てる製品を作りたい」

というMBTコンソーシアムの理念のもと、

奈良県立医科大学リハビリテーション医学講座と
靴下の会社で特殊な機械と技術を持つ株式会社三笠が
共同開発いたしました。

世界初、日常生活をしながら

トレーニングができる「にぎるくん[®]」は、

手指機能の衰えによる困難を抱えている方々の
お役に立ちたいとの思いから、この度販売となりました。
皆様の生活の一助となりましたら大変嬉しく思います。



④



※イラストはイメージです。

にぎるくん[®]が
ついに完成!!


⑤



靴下会社
だから出来る
技術で
「手袋からの
抵抗機能」
を実現!!

世界初となる
手指の動作
トレーニング
サポート手袋が
誕生しました

⑥

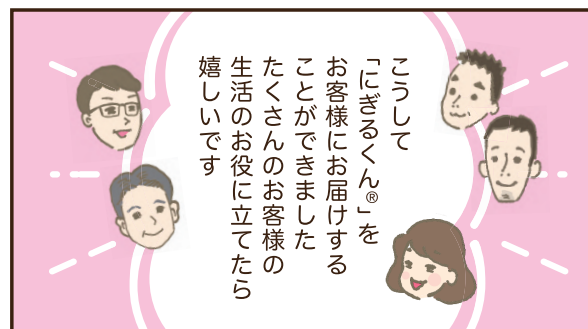

こうして
「にぎるくん[®]」を
お客様にお届けする
ことができました
たくさんのお客様の
生活のお役に立てたら
嬉しいですよ

にぎるくん®を使ってみよう!

にぎるくん解説



装着イメージ
(ベージュ)



手の甲側

反り返っている
面を甲側にして
着用してね!



⚠左右注意



親指のライン

【使用方法】


① 必ず「MIKASA」と表記がある
面が手の甲側になるようにして
下さい。ラインが親指の目印になります。

② 着用後、たるみや指の出る位置などを
調整してください。

※伸ばしすぎると指の付け根に負担を
かけますので、注意してください。

〈着用時は次のことに注意してください〉
肌に直接着用し、最初は短時間の着用から
はじめて、徐々に時間を延ばしてください。

フリーサイズ 手首周りの目安:14~18cm

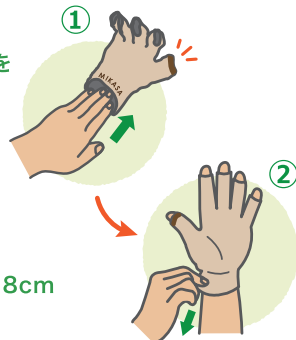

本商品は、日常生活をしながら
着用する事を推奨しております。

※最初は短時間の着用からはじめて、徐々に時間を延ばしてください。

プラス
十

やって
みよう!

カンタン

グーパー運動!!

自然に手指
に負荷が
かかるよ。



グッと
にぎって



パッと
ひらく

5~10回を目安として、1日2~3セットから
無理のない範囲ではじめてください

毎日コツコツ
無理せず
続けよう!

〈使用上の注意〉

- 本品の使用により、疼痛、しびれ、皮膚や爪の変色、うっ血、皮膚温の低下、かゆみ、発疹、発赤、かぶれ、むくみ、傷等の異常及び装着前に感じなかった不快感、違和感が生じた場合は、直ちに使用を中止し、医師等に相談してください。
- 本品が装着中にたるんだり、しわが寄ったり、ずれ落ちたり、誤った位置に装着された場合は、正しく装着し直してください。
- 他の製品との併用又は重ねての装着は、本品単独の装着時より圧迫感が強くなったり、本品にしわ、ずれ等が発生する原因になりやすいため、おやめください。
- 慢性皮膚炎や、化繊・ゴム素材によるアレルギー体質の方は使用しないでください。
- 使用感は個人差があります。
- サイズが合わない場合は使用しないでください。
- 就寝中には使用しないでください。
- 指定の部位以外には使用しないでください。



品質表示

ポリエステル・ナイロン・
綿・ポリウレタン



ネット使用、中性洗剤使用

次ページに
開発秘話が
あります

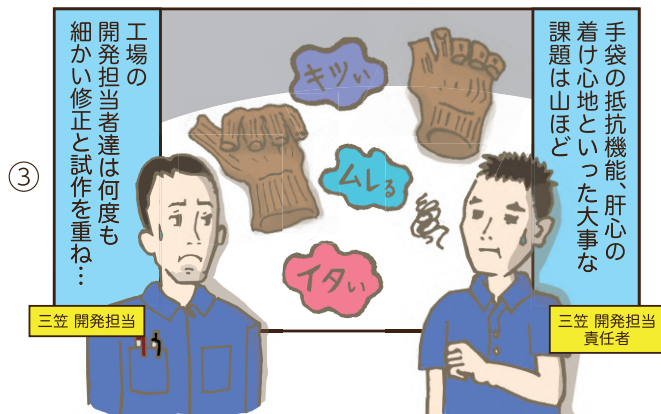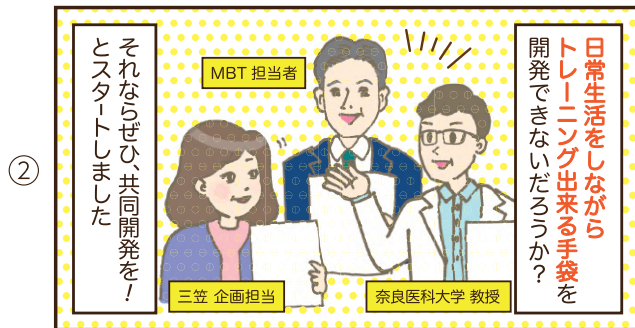

ガイド 01 手指の動作トレーニング 手袋とは??

MBT

奈良県立医科大学・
MBTコンソーシアムと
株式会社 三笠の共同開発

本製品は、社会貢献が大いに期待できる製品として
MBTコンソーシアムに承認された
手指の動作トレーニングサポート手袋です。

日常生活での **困った** が気になる方に



奈良医科大学
公認キャラクター
しょうとくた医師君

世界初!

日常生活で手指の動作
トレーニングをサポート!

※当社調べ ※写真、イラストはイメージです。