

見守りシステム
CareBird

簡単設置の見守りセンサー



※(公社)かながわ福祉サービス振興会『介護・生活支援ロボット認証』取得商品



見守り状況をお知らせ

介護現場でご利用中のパソコン,スマホ,タブレット端末画面に、利用者の状態をアイコンの「色」と「体位」で表示します。異常の際は、アイコンの「ランプ表示」、右側の「アラート通知」への表示と同時に、パソコンからの「アラートメロディ」で異常をお知らせします。



入眠中

東101 東京ハナ子

脈拍 96
呼吸 9

継続時間 00時間18分

臥床中

東101 東京ハナ子

脈拍 90
呼吸 7

継続時間 00時間13分

上体起し

東101 東京ハナ子

脈拍 -
呼吸 -

継続時間 00時間00分

またあらかじめ設定されたスマホやタブレット端末,ナースコール,PHSヘリアルタイムにアラート通知を発信します。

離床・異常


東101 東京ハナ子

脈拍 -
呼吸 -

継続時間 00時間11分




バイタル急変!!

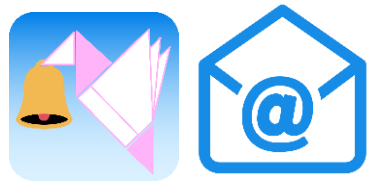


CareBirdでケアプラン

CareBirdを通じてセンサーデータがクラウドに保存されるため、入所者毎に時系列グラフによる「バイタル変化の把握」、「睡眠や生活リズムの傾向」を可視化します。スタッフまたはご家族への情報提供ツール、更には医師、看護師への情報伝達の参考資料としてもご利用いただけます。

入眠データ

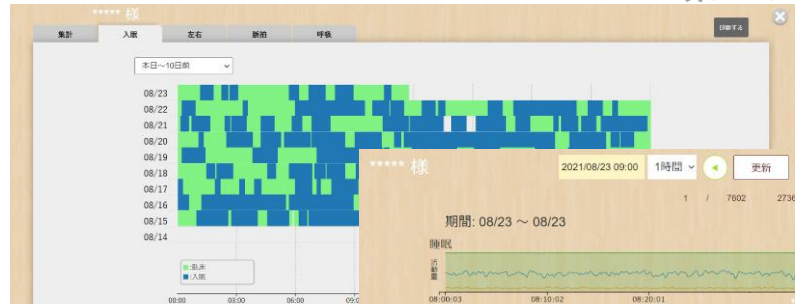

波形データ

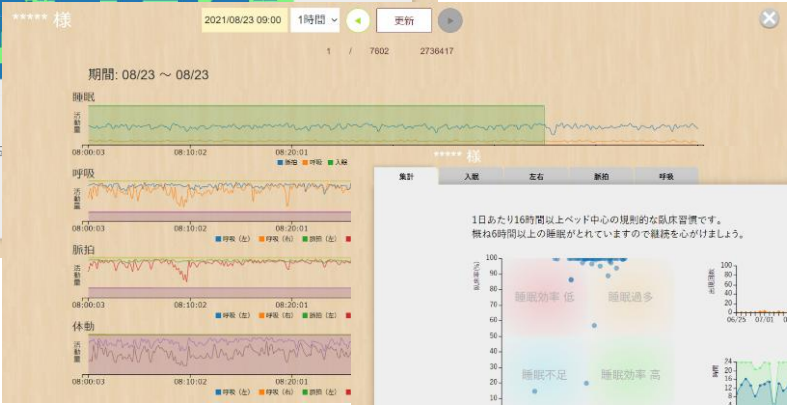

直近60日分の傾向データ



※ベッドセンサーおよびCareBirdは医療機器ではありません。検知する呼吸数・脈拍数は変化を把握するための目安です。

ベッドセンサー設置イメージと用途



オプションの中継器を繋げるとナースコールでも報知できます。

用途	利用イメージ	説明
----	--------	----

バイタル状態【把握・報知】
入眠・覚醒状態【把握】
体動(左右)【把握】



離床、バイタル(呼吸・脈拍)の低下をはじめ、就寝中の覚醒、睡眠、呼吸数・脈拍数などの状態を把握することができます。

転倒予防【把握・報知】



上半身の起き上がり動作の段階で報知することができます。



CareBirdの導入時には、設置・初期設定まで当社が責任を持って対応いたします。導入後の設定変更もリモート対応が可能です。わずらわしい操作はすべて当社にお任せいただけますので、介護スタッフの皆さまは本来のケア業務に専念していただけます。

CareBird製品仕様,通信環境 ※TAISコード:02202-000002

センサー	24GHz帯 マイクロ波ドップラー方式センサー 2個使用
最大検出距離	2.5m
外形,重量	ベッドセンサー:320×64×14mm,146g 制御端末:93×62×31mm,60g (ACアダプター含まず)
設置場所	ベッドセンサー:ベッドとマットレスの間 制御端末:居室、事務所等の振動の少ない平坦な場所
電源,消費電流	5V ±10% (DCジャック接続ケーブル),typ.180(mA)
定格出力電流	ベッドセンサー:ACアダプタ 1,000mA 制御端末:ACアダプタ 2,400mA
検出機能	呼吸数、脈拍数、臥床、離床、睡眠、起き上がり、バイタル低下
アラート機能	情報端末デバイスへのアラート通知,音通知,PUSH通知(起き上り、バイタル低下、離床時)
無線LAN規格	Wi-Fi 2.4GHz帯 (IEEE 802 b, g, n) ※IPv4 over IPv6であれば利用可
インターネットプロトコル	IPv4 (IPv6非対応) ※IPv4 over IPv6であれば利用可
推奨電波強 (RSSI)	-60dBm以上
セキュリティプロトコル	WPA2(AES) ※WPA2/WPA3混在モードのWPA3も利用可

介護保険レンタル対象のCareBird

CareBirdは認知症徘徊検知器として、介護保険レンタルに対応したモデルを取り扱っています。

※TAISコード:02202-000001

詳しくは、販売店・福祉用具貸与事業所へお問合せください。



CareBirdで在宅介護

CareBirdは在宅介護でもご利用頂けます。
Wi-Fi環境の無いお部屋はSIM回線(オプション)で通信、
介護者・ご家族はご利用中のスマホでアラート通知を
受け取ります。
利用者の状態やバイタルも同様にスマホで確認できます。



介護記録ソフト連携

各社の介護記録システムとCareBirdの連携により、CareBirdの
バイタル情報やアラート通知が自動で各社の介護記録システムに
記録されます。

■記録データ:バイタル記録 / 睡眠情報 / アラート情報等



ルームセンサー

お部屋の天井にルームタイプのセンサーを設置すると、
居室から出たことを報知します。
また在室・不在をパソコン等の画面に表示します。

用途

利用イメージ

徘徊・離室検知【報知】



CareBirdカメラ

CareBirdアプリとの連携でワンクリックでお部屋の映像を表示します。
SDカードに常時録画を行い夜間でもはっきり見えます。
セキュリティに配慮した安心設計でパソコン以外のスマホや
タブレットでも視聴できます。

※カメラとCareBirdアプリが同一ネットワーク内で接続されている場合に利用が可能です。





CareBirdは介護現場での1か月間の無償デモ設置を行っております。
無償デモ設置ご希望の際は下記までお問い合わせください。



公式
HP

公式
Facebook

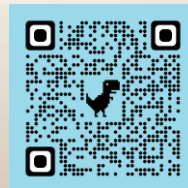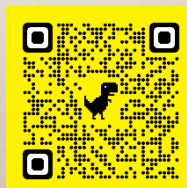

公式
X

公式
YouTube



販売に関するお問合せ

三昌商事株式会社
事業推進本部 アライアンス推進部

■東日本エリア: 葭本(よしもと) TEL(03) 6203-1888
■西日本エリア: 黒田 TEL(06) 6221-0888

HP: <https://carebird-portal.com/>
Mail: carebird_info@sansho-shoji.co.jp

SANSHO

【開発元】

三昌商事株式会社
〒222-0033

神奈川県横浜市港北区新横浜3-9-5 新横浜第3東昇ビル

HP: <https://carebird-portal.com/>

Mail: carebird_info@sansho-shoji.co.jp

SANSHO