

www.daihatsu.co.jp/e-sneaker/

GOOD DESIGN AWARD  
2025年度受賞

# e-SNEAKER

## ●介護保険レンタル・補装具費支給制度について

### 介護保険レンタル

自治体により、介護保険レンタルでのe-SNEAKERのご利用が可能な場合があります。利用可否の詳細は、お客様の要介護認定の要介護度や福祉用具貸与業者のお取り扱い状況により異なりますので、自治体や担当ケアマネージャーへご相談ください。

### 補装具費支給制度

お客様の状況（身体状況、年齢、職業、学校生活、生活環境等）により、日常生活や就学・就労のために電動車いす普通型（6.0km/h）利用の必要性が認められた場合、自治体によっては費用が支給される可能性があります。詳細は各自治体の窓口にご相談ください。

お問い合わせ、ご相談はお近くの販売会社または、  
下記お客様コールセンターまで。

ダイハツお客様コールセンター  
フリーコール ☎0800-500-0182

受付時間 9:00～17:00  
〒563-8651 大阪府池田市ダイハツ町1-1



弊社におけるお客様の個人情報の取扱いについては、  
ダイハツ工業株式会社ホームページにて掲載しております。  
(<https://www.daihatsu.com/jp/privacy.html>)

## 保証制度の充実

e-SNEAKERの保証はお買い上げ日から1年間、  
純正アクセサリーの保証は取付時から1年間です。

\*詳しい保証内容につきましては、保証書あるいは販売会社にてご確認ください。

●このカタログの仕様は改良のため予告なく変更することがあります。 ●写真は撮影条件、印刷インキの性質などから、実際の色とは異なって見えることがあります。  
●一部の写真は合成です。 ●写真の液晶画面はハメコミ合成です。 ●交通法規を守り安全運転に心がけましょう。 ●本カタログの内容は2026年1月現在のものです。

ダイハツ工業株式会社  
〒563-8651 大阪府池田市ダイハツ町1-1

10120①10A2601 SU





軽やかな暮らしを、すべての人に。



老若男女、津々浦々。どんな人にも場所でも、  
 素敵な毎日を送っていただくために、  
 ダイハツはモビリティの幅を広げています。  
 そして今、「歩行領域モビリティ」をラインナップ。  
 軽快に自由に、移動を楽しむあなたへ。



Photo:e-SNEAKER。フロント&リヤカバーはホワイト(RW16)。フロント&リヤカバーのオフビートカーキメタリック(G55)/トニコオレンジメタリック(R71)/スカイブルーメタリック(B83)、  
 バスケットはディーラーオプション。 ■駐車する場合には店舗・施設などに確認を取り、その指示に従ってください。 ■写真の小物は撮影のために用意したものです。

# いい大人には、 いいスニーカーが似合う。

そこで誕生したのが、e-SNEAKERです。  
ちょっとそこまでの近距離移動に最適な  
電動で軽快に走る、まさに乗るスニーカー。  
視線が高く背筋がピンと伸びる乗車姿勢は、  
まるで自転車やスクーターに乗るように、  
実にスタイリッシュでかっこいいです。  
行動をアクティブに、気持ちをポジティブに。  
暮らしをより便利にラクにしてくれる、  
新しいパートナーとしてぜひ、  
迎えてみてはいかがでしょうか。

**e-SNEAKER**

## 歩行領域モビリティ\*とは



最高時速6km



走るのは歩道



免許不要

\*道路交通法では歩行者として扱われます。詳しくはP.11をご覧ください。



# 心地よく乗る

デザインしたのは、  
スタイリッシュな乗車姿勢です。



歩行者や自転車と  
ほぼ同じ目線です。

アイポイントが高く、無理のない自然な前傾  
姿勢。乗り降りもラクで周辺視野も広がり、  
心地よく運転できます。



お出かけを楽しくする秘訣は、ここに 있습니다。



### フロント大径タイヤ

軽快な走りを実現する大径タイヤは、乗り心地を重視したエアータイヤを採用しています。



### 足まわり / 四輪の安定性

エアータイヤ+サスペンション構造で快適な乗り心地を実現。四輪と前方バッテリー配置により、走行安定性も高いです。



### シート

スタイリッシュなアームサポート一体型です。シートの高さは3段階で調整\*できます。

\*高さの調整は、必ず購入された販売会社で行ってください。



### ショッピングフック

ショッピングの際に、エコバッグや買い物袋を掛けられます。耐荷重は3kgです。

# 安心して走る

ちょっとした段差や溝なら、  
平気で乗り越えられます。



## 段差乗越高さ

大径タイヤで最大7.5cmの段差\*を乗り越えられます(助走ありの場合)。また、エアータイヤとサスペンションによって、身体への衝撃を抑え、ラクに走行できます。

\*段差には直角に進入してください。



## 溝乗越幅

最大10cmの溝を乗り越えられます。大径タイヤによってハンドルがとられにくく、安定した走行ができます。



降坂時

## 速度抑制機能

制御コントローラーにより、坂道や曲がり角では自動的に減速します。

⚠ 速度とハンドルの切れ角により、自動で減速する機能がございますが、機能に頼った運転は絶対に行わないでください。運転時は常に周囲の状況に注意して安全運転を心がけてください。



旋回時

安心して走れる工夫が、  
いろいろあります。

曲がり角や坂道\*、後退する時もお安心ください。スモールカーメーカーならではの技術が高い安全性を実現しています。  
\*坂道や傾斜地を無理に走行しようとする、転倒するおそれがあります。十分にご注意ください。



## 急斜面検知機能

傾斜センサーが登坂・降坂・左右の傾斜を検知。急な坂道や斜面を警告メッセージと警告ブザーでお知らせします。



## ブレーキ解除スイッチ

手で車両を動かせるようにシート後方にスイッチを搭載。スイッチを押しながら、車両を押すことで移動できます。



## 後退ブザー

後退操作時には周囲にブザーでお知らせ。状態表示パネルにはメッセージも表示されます。

# 簡単に操る

さあ、次はあなたの番です。


シンプルなインターフェイスと二輪車に近い操作性。  
誰にでも運転しやすく設計されています。



状態表示パネル



バッテリー残量表示(満充電時)

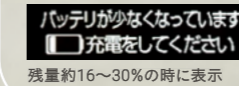

残量約16~30%の時に表示

ブレーキレバー

ヘッドライトスイッチ

速度切替スイッチ

後退スイッチ

警報音スイッチ

アクセルグリップ  
(回転式)

簡単3ステップで、お出かけできます。

※乗り降りの際は、必ず電源がOFFになっていることをご確認ください。



**電源を入れ、キーを回す**

電源スイッチをONにし、キーを差し込み、右に回す。



**ブレーキレバーを握る**

起動音および状態表示パネルのメッセージを確認したあと、  
ブレーキレバーを握る。



**前進する**

ブレーキレバーを離し、アクセルグリップを回す。  
※発進の際は、必ず両足をステップにのせていることをご確認ください。



**バッテリーの取り外し手順**

①電源をOFFにする。②キーをOFFの位置よりさらに手前に  
回しながらレバーを引き上げて、手前に倒して引き抜く。



**速度を調整する場合**

速度切替スイッチを押し、1~6km/hの6段階  
から調整する。



**止まる場合**

アクセルグリップを戻す。



**後退する場合**

後退スイッチを押す。  
※発進の際は、必ず両足をステップにのせていることを  
ご確認ください。



**電源を切る場合**

キーを左に回し、電源スイッチをOFFにする。



短い充電で  
ちょっと長め  
のお出かけも  
満充電  
約2.5時間  
連続走行距離  
約12km\*

\*JIS T 9208:2016で定められた条件(気温20℃、使用者最大体重、満充電のバッテリーで平坦路を最高速度6km/hで連続走行)のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、路面状況等)や運転方法(急発進、ランプ使用等)に応じて連続走行距離は異なります。

充電も簡単です。



脱着式軽量バッテリー(盗難防止ロック機能付)&充電器  
バッテリーは脱着できるため、屋内の家庭用コンセントに挿す  
だけで簡単に充電できます。

# 歩行領域モビリティとは

歩行領域モビリティ e-SNEAKER は、  
道路交通法\*では歩行者として扱われます。

\*道路交通法 第二条第三項第一号



最高時速6km



走るのは歩道



免許不要

## 歩行者としてのルールと標識



歩道を通行する  
車道と歩道の区別がある道路を通行する場合



横断歩道を通行する  
道路を横断する場合  
※信号機のある交差点では、歩行者用信号に従って通行してください。



右側を通行する  
歩道がない道路や路側帯を通行する場合



路側帯

### ■道路標識

#### 走行OK



#### 走行NG



## 注意事項



飲酒後や体調不良時の  
運転はしない



携帯電話などの  
ながら運転はしない



発進時から走行中、  
停車までは、足や身体を  
車体から乗り出さない

## よくある質問と回答

**Q** どのくらいの速度で走りますか？

**A** 最高速度6km/hで、1km/hごとに選択できます。  
※混雑した場所や狭い場所では十分に速度を落とし、周囲の状況に注意して走行してください。

**Q** 乗る人の身長や体重に制限はありますか？

**A** 身長が140cm未満の方、または185cmを超える方は使用をお控えください。乗員の体重制限は、着衣および荷物を含めて100kg以下です。

**Q** ヘルメットの着用は必要ですか？

**A** 歩行者扱いなので、ヘルメットの着用の義務はありません。

**Q** どれくらいの坂道を登れますか？また、登坂中に急斜面警告ブザーが鳴ったら、どうすればいいですか？

**A** 10度の坂道まで登れます。例えば、一般的なショッピングモールの立体駐車場の坂道が約10度です。ブザーが鳴った場合は、一番低い速度設定(1km/h)に変更して、安全に注意しながら平地へ移動してください。

**Q** 坂道ではどれくらい自動減速しますか？

**A** 坂の角度によって車速が変わります。

**Q** 雨の日は走れますか？

**A** 生活防水仕様になっていますが、スリップする危険がありますので雨の日の利用はお控えください。また、傘をさしながらの走行は危険ですのでお控えください。

**Q** スーパーやショッピングモール内は走れますか？

**A** ご利用になる店舗・施設に直接ご確認ください。

**Q** 電車、バス、飛行機などの交通機関で利用することはできますか？

**A** ご利用になる各社へお問い合わせください。

**Q** 坂道を走るとバッテリーの減りは早くなりますか？

**A** 減りが早くなる場合があります。

**Q** タイヤの空気補充は必要ですか？

**A** 必要です。空気圧が規定値を保つよう、定期的な点検を実施してください。

**Q** 外出先で駐車する場合、どこに駐車できますか？

**A** 駐車場所は各店舗・施設などでご確認ください。

**Q** 満充電にはどのくらい時間がかかりますか？

**A** 1回約2.5時間の充電で満充電になります。  
※バッテリーの温度などの条件により、充電完了までに必要な時間は変化します。

**Q** 1回の充電でどのくらい走れますか？

**A** 満充電での連続走行距離は約12km\*です。  
\*JIS T 9208:2016で定められた条件のもとでの値です。詳しくはP.13の主要諸元表も合わせてご確認ください。

**Q** 長期保管時、バッテリーはそのままでいいですか？

**A** 1か月以上使用しない場合は、バッテリーを取り外し、満充電まで充電してから室内で保管してください。  
※0~40°Cの環境で保管することを推奨します。

# 仕様と装備を確認する

コンパクトなスタイルに、技術が詰まっています。



Photo: e-SNEAKER。フロント&リアカバーはホワイト(RW16)。



**418,000 円**  
(消費税非課税)

## e-SNEAKER 主要装備一覧表

	標準装備	ディーラーオプション
フロント&リアカバー (ホワイト)		
フロント&リアカバー (カラー塗装)※		
LEDヘッドライト		
反射板 (前方・側方 [白色]/後方 [赤色])		
ショッピングフック		
持ち上げバー (フロント)		
バスケット		
杖ホルダー		
ボディカバー		
シート上下3段階調整		
アームサポート		
シートカバー		
アクセルグリップ (回転式・右側)		
ブレーキレバー (左側)		
状態表示パネル (ヘッドライト表示・最高設定速度・バッテリー残量表示)		
ヘッドライトスイッチ		
警報音スイッチ		
速度切替スイッチ		
後退スイッチ (右側)		

	標準装備	ディーラーオプション
後退ブザー		
安全装備		
急斜面検知機能		
速度抑制機能 (旋回・登坂・降坂)		
ブレーキ解除スイッチ		
脱着式軽量バッテリー		
盗難防止バッテリーロック		
充電状態表示LED		
電池残量表示LED		
充電器		
足まわり		
サスペンション (フロント・リア)		
フロント大径タイヤ		
フルホイールキャップ		

## e-SNEAKER 主要諸元表

車名・型式	T310P-DERM		
全長	mm	1,130	
全幅	mm	645	
全高	mm	985	
車両重量	kg	64	
モーター (30分定格出力)	DC24V 250W×2個		
バッテリー (5時間率)	リチウムイオン (25.2V 10.1Ah)		
前輪	8インチタイヤ		
後輪	6インチタイヤ		
駆動方式	後二輪直接駆動方式		
最高速度	前進	km/h	1.2.3.4.5.6 (切りかえ式)
	後進	km/h	1
実用登坂角度	10°		
連続走行距離※	km	12	
最小回転半径 (最外側)	mm	1,430	
段差乗越高さ	mm	75	
溝乗越幅	mm	100	
使用者最大体重 (積載物含む)	kg	100	

※連続走行距離は、JIS T 9208:2016で定められた条件 (気温20°C、使用者最大体重、満充電のバッテリーで平坦路を最高速度6km/hで連続走行)のもとでの値です。お客様の使用環境 (気象、路面状況等) や運転方法 (急発進、ランプ使用等) に応じて連続走行距離は異なります。  
 ■「e-SNEAKER」はダイハツ工業株式会社の登録商標です。  
 ■原動機を用いる身体障害者用の車の型式認定申請書数値  
 ■製造事業者:ダイハツ工業株式会社

e-SNEAKERを安全・安心にご利用いただくために

【保険・保証】  
自賠責保険のないモビリティのため、「任意保険」と「延長保証」のプランをご用意しています。詳しくはこちらから。



【メンテナンス】  
法定点検のないモビリティのため、「定期点検」と「使用前点検」についてご紹介しています。詳しくはこちらから。



■価格はメーカー希望小売価格で参考価格です。価格は販売会社が独自に定めていますので、詳しくは販売会社におたずねください。  
 ■オプションおよび取付費はe-SNEAKER本体のメーカー希望小売価格には含まれません。実際の販売価格および取付費等は販売会社によって異なりますので、詳しくは販売会社におたずねください。  
 ■標準取付費は新車への取付標準価格であり、車両の状態や販売会社により異なる場合があります。

# 好みをプラスする

気分と便利さを高めるアクセサリ (ディーラーオプション) です。



オフビートカーキメタリック (G55)



**バスケット**  
¥32,560 【消費税抜き¥29,600  
(本体価格¥26,000+標準取付費¥3,600)】  
荷物の収納に便利です。

材質:樹脂 (ポリプロピレン)  
※フロント&リアカバー (カラー塗装) と同時装着の場合は、フロントカバー (カラー塗装) を先に装着してください。 ※耐荷重3kg。



**ボディカバー**  
¥8,800  
【消費税抜き¥8,000 (本体価格)】

保管時に車両全体がしっかり収まります。すべてのアクセサリを装着した状態でもカバーをかけられます。材質は (財) 日本防災協会認定生地を使用しています。材質:ポリエステル



スカイブルーメタリック (B83)



**シートカバー**  
¥4,400  
【消費税抜き¥4,000 (本体価格)】

保管時にシート部を保護するカバーです。材質は (財) 日本防災協会認定生地を使用しています。材質:ポリエステル



トニコオレンジメタリック (R71)

**フロント&リアカバー (カラー塗装)**  
¥103,950

【消費税抜き¥94,500 (本体価格¥90,000+標準取付費¥4,500)】

お好みに合わせて着せ替えます。

フロントカバー (カラー塗装)、リアカバー (カラー塗装) の1台分2点セット。材質:樹脂 (ABS) ※標準装備のフロント&リアカバー (ホワイト) と交換となります。 ※バスケットと同時装着の場合は、フロントカバー (カラー塗装) を先に装着してください。注) リヤカバー (カラー塗装) にはDAIHATSUマークはありません。注) フロントカバー (カラー塗装) のオフビートカーキメタリック (G55) とトニコオレンジメタリック (R71) は標準装備のエンブレム (Dマーク) と色が異なります。



**杖ホルダー**  
¥8,360 【消費税抜き¥7,600  
(本体価格¥4,000+標準取付費¥3,600)】

杖や傘をしっかり収納するメッシュ筒状です。材質:ポリエステルメッシュ、他 ※杖や傘の形状によっては収納できない場合もあります。多脚タイプの杖には対応していません。 ※安全のために走行中の傘の使用はお控えください。 ※本製品に杖本体は含まれません。 ※最大2個取り付け可能。最大積載量1kg。



コードストッパー部



**予備脱着式軽量バッテリー**  
¥123,200

【消費税抜き¥112,000 (本体価格)】

※本体には標準装備。購入時は、満充電まで充電してください。 ※消耗品のため、メーカー保証対象外商品です (リコールによる回収・交換は除きます)。予めご了承ください。



**バックミラー (左側)**

¥11,880 【消費税抜き¥10,800  
(本体価格¥9,000+標準取付費¥1,800)】

後方視界を確保し、不安をやわらげます。ミラーとエクステンションナットのセット。

▲掲載商品は、ダイハツ純正アクセサリではございません。 ※お電話およびFAXをいただく際には番号をお確かめのうえお間違えのないようおかけください。通話料金、およびFAXをご利用の際の通話料は、お客様のご負担となります。

問い合わせ先: SPK株式会社  
TEL 03-3472-5015  
FAX 03-5460-7440  
\*受付時間 月~金 10:00~12:00 / 13:00~17:00 (土曜・日曜・祝祭日、夏季、年末年始、月~金 12:00~13:00を除く)  
〒140-0011 東京都品川区東大井1-4-20

アクセサリはe-SNEAKER本体と同時に購入の場合に限り、消費税がかかりません。追加購入の場合は課税対象になります。