



ベストダブルクッション 防水撥水・透湿カバー

この度は、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用前にこの「取扱説明書」を必ずお読みいただき、十分に理解をした上でお使いください。

- ご使用する方ばかりでなく、介護する方もこの「取扱説明書」をよくお読みください。
- この「取扱説明書」はいつでもご覧になれる所に大切に保管しておいてください。
- お手元に製品が届きましたら、キズ、ほころび、汚れ等がないことを必ずご確認ください。
万が一不備がありましたら、弊社までお問合せください。
- 開封時には、中材で使用しているウレタンフォームの臭いが気になる場合がありますが、
身体に害を与えるような有害物質は含んでおりません。臭いはしばらくすると自然に消えます。
- お買い上げの商品は、仕様変更などにより、本書の内容と一部異なる場合があります。
- ご不明な点がありましたら、お買い上げの販売店、または弊社までお問合せください。

安全にご使用いただくために

【注意記号について】

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止する為、下記の表示と内容をよく理解してから正しくお使いください。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を記載しています。

※本製品のご使用中に身体に異常を感じたり、不安を感じた場合は、すぐに使用を止め、専門家に相談してください。

1.正しい座り方（転落・落下の防止）

- 深く腰掛ける クッションの奥まで深く座ってください。前方にずれた状態で座ると、十分な効果が得られないばかりか、転落・落下の原因となります。
- 端に座らない 移乗の際など、やむを得ず端に座る場合は、身体をしっかり支えて滑り落ちないように注意してください。
- 介助者の同伴 ご自身で姿勢を維持できない方は、必ず介助者立ち会いのもとで使用してください。

2. 禁止事項（重大な事故を防ぐために）

- シート類の敷き込み禁止 汚れ防止目的でビニール袋や市販の防水シートを敷かないでください。表面が非常に滑りやすくなり、重大なケガにつながる恐れがあります。※本製品のカバーには、防水・撥水機能が備わっています。
- 補助用具の抜き取り スライディングシート等の移乗補助具を使用した場合は、移乗後すぐに抜き取ってください。
敷いたままだと身体が滑り、前方へ転落する危険があります。
- 火気厳禁 ストーブやタバコなどの火気に近づけないでください。火災や製品の変色・変形の原因となります。
- 改造・修理の禁止 ご自身での修理や改造は絶対に行わないでください。破損や思わぬケガの原因となります。

3. 衣類の素材と防水撥水機能の注意

- 衣類素材 滑りやすい素材の衣類を着用している場合は、姿勢が崩れやすいため十分注意してください。
- 外力カバーの防水・撥水機能について 本製品のカバーには防水・撥水加工を施しておりますが、完全防水ではありません。
水分の付着後、時間の経過とともに水分が浸入する場合があります。また、防水・撥水効果は、ご使用期間や摩擦、洗濯の繰り返しにより徐々に低下します。永久に持続するものではありませんので、あらかじめご了承ください。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性または、物的損害の発生が想定される内容を記載しています。


【製品の交換目安について】

ご使用状況や保管環境により劣化の進行は異なります。以下のいずれかの状態が見られる場合は、十分な体圧分散効果が得られなかったり、転倒や床ずれなどの事故につながる恐れがあるため、速やかに新しい製品への交換をご検討ください。

- 1.クッション（中材）の劣化：以前よりも「底付き感」を感じるようになった場合や、ウレタンが著しく変形して元に戻らない場合。
また、ウレタンが硬化・粉砕（ポロボロと崩れる）したり、ひび割れや変色が生じたりしている場合。
- 2.カバーの破損・機能低下：生地が破れやほころび、薄くなっている箇所がある場合。
ファスナーが破損して正しく閉まらない場合や、防水・撥水性能が著しく低下している場合。
底面の黒色生地（滑り止め加工）の効きが悪くなり、座面でクッションが動きやすくなっている場合。

使用方法

- ①商品ロゴをプリントしている面を正面の「脚側」にしてご使用ください。
- ファスナー及び品質表示タグ「後ろ側」が取付けられている面を「背中側」としてご使用ください。
- 天面が無地、底面は黒色生地のすべり止め加工が施してある側となります。

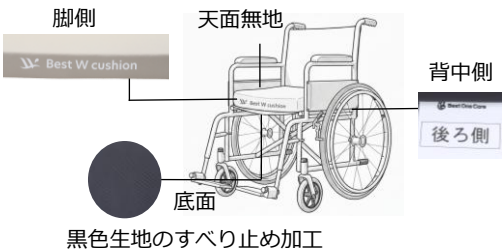

- ②ウレタンフォームの上下は、
- 天面：「緑色スリット加工」
- 底面：「黄色面」となります。
- 左右前後はありません。



- ③内カバーのファスナー面は、底面側で
- 外カバーのファスナー面と方向を合わせて挿入してください。
- ファスナーを閉めてご使用ください。ファスナー閉め終わりには、ファスナーカバーをご使用ください。

- 注意**
- ・ウレタンフォーム、外カバーともに上下前後をお確かめの上、ご使用ください。間違えますと効果的な体圧分散ができずに床ずれを発生させたり、悪化させたりする恐れがあります
 - ・外カバーは、ファスナーの閉め終わりには、ファスナーカバーをご使用ください。ファスナーがご使用者様へあたり、思わぬけがや破損の原因となります。

お手入れ方法

【カバー・ウレタンフォーム共通】

● 軽い汚れの場合

- 1.拭き取り：水で濡らした布で汚れを拭いた後、乾いた布で水分をしっかりと拭き取ってください。
- 2.乾燥：湿気が気になる場合は、直射日光を避け、風通しの良い日陰で十分に乾燥させてください。

● お洗濯する場合

<ご注意点>

- ・丸洗い不可：クッションを丸ごと（カバーをつけたまま）洗うことは避けてください。
- ・個別洗い：必ずカバーとウレタンフォームを分け、個別に洗濯してください。
- ・単独洗い：色移りを防ぐため、他の洗濯物とは分けて洗ってください。
- ・ネット使用：型崩れ防止のため、必ず洗濯ネットを使用してください。

- 1.洗剤：中性洗剤をご使用ください。漂白剤は使用不可です。
- 2.脱水：弱めに絞るか、洗濯機の脱水機能を使う場合は「単独・短時間」に設定してください。

● お洗濯後の乾燥について

<ご注意点>

- ・乾燥：乾燥機の使用はできません。（乾燥機能付き洗濯機にもご注意ください）

- ・水分を取る：乾いたタオルなどで包むようにして、水分をよく拭き取ります。
- ・干し方：直射日光を避け、日陰で十分に乾燥させてください。
- ・ウレタンのコツ：ウレタンフォームは「縦置き」にすると水分が抜けやすく、早く乾きます。
- ・仕上げ：完全に乾いた後は、平らに整えてから保管・ご使用ください。

↓洗濯時の注意点（品質表示タグの説明）

	洗濯機によるお洗濯が可能です。液温40℃を限度とし、洗濯用ネットにのせ、弱流水で洗ってください。
	漂白処理はできません。
	タンブル乾燥はできません。
	日陰で吊るして乾燥してください。
	アイロンは使わないでください。
	ドライクリーニングには対応しておりません。
	ウェットクリーニングには対応しておりません。

- 注意**
- ・乾燥機の使用はできません。（乾燥機能付き洗濯機にもご注意ください）
 - ・直射日光の当たる場所はさけてください。紫外線による変質の原因になります。
 - ・ウレタンフォームにアルコールや除菌消臭剤は、劣化を促進させる恐れがある為、使用しないでください。
 - ・オゾン殺菌は、使用する機材や濃度により変色する場合がある為、推奨しておりません。

保管方法

- 保管する際は、劣化を防ぐため汚れを落とし、平らに置くようにしてください。
- 変形防止のため、長時間の縦置きや、丸めたり、製品の上に物を載せないでください。
- 高温・多湿や直射日光の当たる場所はさけてください。

仕様

※本商品は、医療機器ではありません。

商品名	ベストダブルクッション 防水撥水・透湿カバー	
サイズ	幅40×長40×厚4.5(cm)	
質量	約370g	
カバー材質	○外カバー 天面・側面：ポリエステル100% 底面：ポリエステル100% 樹脂部分アクリル樹脂	○内カバー ポリエステル100%
中材	ウレタンフォーム	