

使用に際しては**医師の診察**が必要となります。  
ご希望の方は、**かかりつけ医**にご相談下さい。



まずはご相談を。

さらに詳しく!!

患者さま向けHPはこちら▶

トメレ

検索



ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。

# TOMERE

Penile Compression Device

【総販売店】株式会社 西山産業 医療企画部

〒920-2167 石川県白山市部入道町ト40

TEL 076-273-0808

FAX 076-273-5711・メール iryo@koshintk.com

### 【禁忌・禁止】

1. 陰茎を過度に圧迫しないこと。[組織障害のおそれがある]
2. 就寝時には、絶対に使用しないこと。
3. MRI 内で使用しないこと。[材質に金属バネあり]
4. 同一患者使用のため、他の患者に使用しないこと。
5. 使用目的以外に使用しないこと。

- ・販売名：PCD トメレ4
- ・一般的名称：失禁手術用クランプ
- ・届出番号：17B3X10009000005
- ・機器種類：一般医療機器
- ・特許番号：第6581744号

# 男性の尿もれ。

## こんなお悩み、お困りは ありませんか？

立ち上がるだけで  
尿がもれて1日に何枚も  
パッドを交換する…

出先では  
「どこにトイレがあるか」を  
確認してばかり…

W.C.

外出の時  
においが気になるし  
パッドの処分にも  
困っている…

尿もれによる  
皮膚トラブルが  
辛い…

尿もれ体操 やくすりを  
継続しているけど  
改善が見られない…

もう一年以上、  
尿もれが  
続いている…

その悩み…

新しい男性用尿もれケア製品

# トメレ

が、役立つかもしれません

詳しくは中面を  
ご覧ください

男性腹圧性尿失禁症状の  
一時的・姑息的ケア用品

## ■ 男性用尿もれ防止器具 ■

# トメレ4



トメレは陰茎の皮膚上から尿道を圧迫し、尿漏れを防ぐものです。前立腺がん全摘術後の重度の尿失禁に悩んだ設計者の実体験からの工夫、医療、学術機関の知見が注がれています。

### 共同開発

公立松任石川中央病院  
泌尿器科

北陸先端科学技術大学院大学  
創造社会デザイン研究領域

### ユーザー感想



“パッドの使用枚数が減り、楽になりました。”

“しっかりと膀胱に尿がたまるようになって、  
久しぶりに気持ちよく排尿できました。”

“外出時に装着。パッド交換を考える必要がなくなりました。”

“尿かぶれが改善されました。”



スタートセット

12,650円(税込)

・本体+専用交換シルクカバー  
(大小ペア) 1セット入り



専用交換シルクカバー

2,420円(税込)

・(大小ペア) 2セット入り

カバー1セットの耐用期間は、  
約5~6週間が目安です。  
カバーを交換しながら、  
良好な装着感を維持してください。



新しい尿もれケア、  
はじまっています。  
QOLの向上に、  
トメレとパッドの組み合わせ。




[実物大]

使い方は、  
「はめて」、「しめる」だけ




使用方法

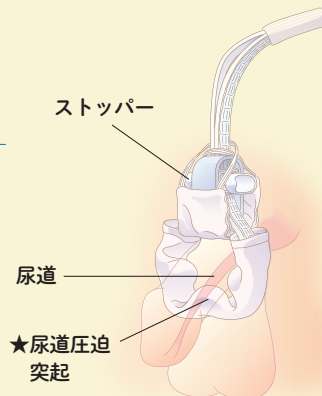

### 手順

- 1 陰茎をループ(輪)に挿入する。
- 2 ★部を尿道に当て、ストッパーを調節しながら陰茎を締める。

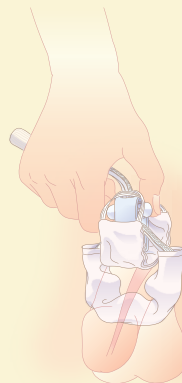

### ポイント

- くしゃみ等の腹圧がかかったとき、尿が少し漏れるぐらいの固定が目安です。過度の締め付けに注意し、痛ければ緩めましょう。
- パッド併用が基本です。