



ケイセイ シャワートローリー

**ReFont<sup>®</sup> up** リフォート アップ

**SRF2**





頭側：ブレーキ&ステア  
昇降ペダル



浴槽 (TPUマットレス)

ギヤッチアップ

頭側サイドレール

排水ホース  
(前後2か所)

ブレーキ&ステアペダル  
(4面4か所)

足側サイドレール

キャスター

昇降ペダル (油圧式)  
(左右2か所、頭部)

## 製品仕様

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| 製品名           | : リフォートアップ          |
| 品番            | : SRF2              |
| 全長            | : 1950 mm           |
| 幅 (サイドレール: 立) | : 810 mm            |
| 幅 (サイドレール: 倒) | : 670 mm            |
| 高さ (浴槽底部)     | : 540 - 850 mm      |
| 浴槽深さ          | : 220 mm (最大水深80mm) |
| 浴槽底部長         | : 1750 mm           |
| 浴槽底部幅         | : 540 mm            |
| 本体重量          | : 85 kg             |
| 最大耐荷重         | : 240 kg            |
| 浴槽許容水温        | : + 10℃ - + 60℃     |

## 付属品

|       |      |
|-------|------|
| 本体    | : 1台 |
| 耐水ピロー | : 1個 |
| 取扱説明書 | : 1冊 |

## ブレーキ&ステア 機能

ポジション：ブレーキ

: フリー

: ステア



耐水ピロー  
W:40cm D:20cm H:7-9cm

昇降機能 (油圧式) アップ：「UP」側ペダルを繰り返し踏み込む ダウン：「DOWN」側ペダルを長押し



Low : 540mm



High : 850mm

## ギヤッチアップ機能

頭側フレームの下のレバーを引ながら持ち上げ、押し下げ



## サイドレール

足側サイドレール：赤色のレバーを引いて倒す

頭側サイドレール：つまみを引ながら引き出すように取り外す



## ご連絡先

## KEISEI ケイセイ医科工業株式会社

東京SC(東京) ☎(03)3816-2811 東京都文京区本郷3-19-6  
大阪SC(大阪) ☎(06)4801-8170 大阪市北区東天満1-9-10 大阪塗料ビル 5F  
九州SC(福岡) ☎(092)473-0395 福岡市博多区博多駅東3-11-14 アバンティ90 303  
仙台SC(仙台) ☎(022)724-7647 仙台市青葉区本町2-1-7 本町奥田ビル  
札幌SC(札幌) ☎(011)374-8901 札幌市豊平区平岸三条12-1-33 第一ビル2F

第2版

特約代理店