

マルチ介助ベッド

万床

BANSHO



万床（バンショウ）は多彩なケアバリエーションで介護負担を軽減するために開発されたマルチ介助ベッドです。


- ✓ ポジションチェンジが最小減の力でできるようになります。
- ✓ ターン（体位変換）が最小減の力でできるようになります。
- ✓ トランスファー（移乗）が最小減の力でできるようになります。
- ✓ 様々なポジションに体圧分散をすることが可能になります。
- ✓ ベッドから乗り降りする際の自立立位を可能にします。

マルチ介助ベッド

万床 BANSHO



上下2分割されたベッドボードが揺り籠式に傾く

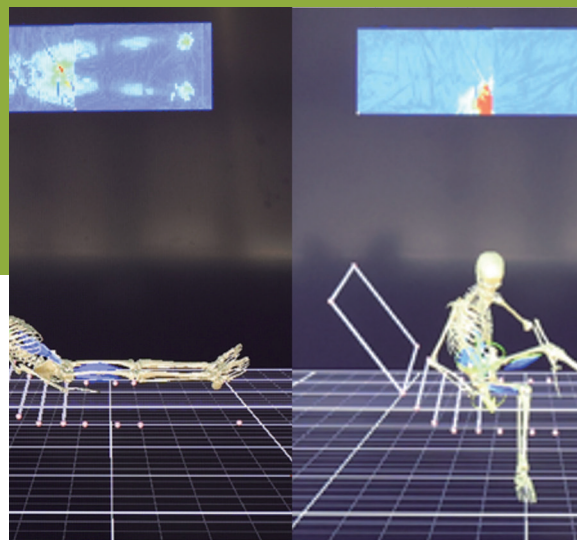

人間工学的な分析により人に優しい機構を発明

万床は上下2分割されたベッドボードが揺り籠式に傾くことにより、
移乗や体位変換、体圧分散などの介助負担を極限まで低減します。
人間工学的な分析により、「上下2分割ボード」と「揺り籠式傾き機構」は
人を無理なく安心して動かす為の役割を果たします。(特許取得：第 7523188 号)

使い方動画



使い方



① 昇降機構



② リクライニング機構



③ 膝山上げ機構



④ 脚上げ機構



⑤ 全体傾き機構



⑥ 分割式傾き機構



多彩なポジションで体圧分散を可能にする



介護者、被介護者に負担を掛けないスムーズな移乗を可能にする

多彩なケアバリエーションで介護負担軽減が可能になります。

介助方法



Body pressure distribution

体圧分散

被介護者の状況に応じて体圧を分散することが可能です。上半身と下半身をそれぞれ左右に傾けることができます。



Position change

ポジションチェンジ

被介護者の臥床位置がズれている際にはベッド全体を傾けることによって軽くズらすことが可能になります。



Turn

ターン（体位変換）


体位変換する際、ベッドを傾けて使用することで被介護者は自然にターンしやすくなり介護者は支えるだけの動作が可能になります。



Independent standing position

自立立位

在宅で福祉用具として使用する際、ベッドの乗り降り時、下ボードの傾きと昇降機構を利用することで簡単に自立立位が可能になります。

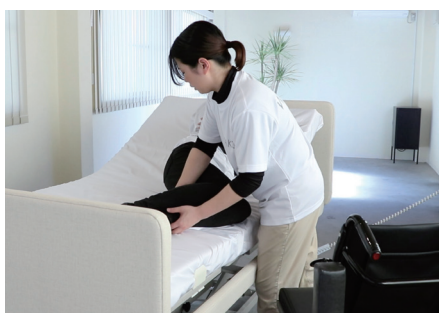

Transfer1

トランスファー（移乗）1

移乗の際、傾きを利用することで自然にターンしやすくなり、介護者は支えるだけの作業でベッドサイドまで被介護者の脚を展開できます。



Transfer2

トランスファー（移乗）2

車いすへトランスファーする際は、更に下部ベッドボードの傾きをつけることでスライディングボードとの相性がよくスムーズに委譲することが可能になります。

マルチ介助ベッド

万床 BANSHO

万床は移乗や体位変換などの介助をする際、
大幅に負担を軽減することが可能な電動ベッドです。



サイズ	全長：2,130mm（延長時 2,270mm） / 幅：1,070mm / 床面高さ：395mm ～（電動昇降） / 全高：最大 880mm（床からヘッドボード最上部まで）
素 材	ベッド本体：スチール / ボード：ファブリックカバー付きスチール
電動機能	無段階自在式：昇降（単独動作）、昇降高さ（395 ～ 710）、背上げ（背・膝連動）、背上げ角度（0° ～ 70°）、膝上げ（単独動作）、膝上げ角度（0° ～ 30°）、上半身振り子（上・下振り子連動 / 単独動作）、上半身振り子角度（0° ～ 14°）、下半身振り子（背・下振り子連動 / 単独動作）、下半身振り子角度（0° ～ 14°）
重 量	148kg
定格電圧	AC100V(50/60Hz)
定格消費電力	180W
最大利用者体重	120kg
生 産 国	ベッド本体、ボード：日本 / 電装品：デンマーク

WAKON®

〒471-0334 愛知県豊田市花本町井前 1-14
TEL: 0565-43-2252 FAX: 0565-43-2258
ホームページ: www.wakon-japan.jp
E-mail: info@wakon-japan.jp

