

WAKON®

自立式体位変換器

転助

TENSUKE

介護する人にも、介護される人にも、
やさしい体位変換を。

途中で止まる。手を離せる。
次の介助動作へ、両手で移れる。

MECHANISM

自立する、という発明。



独自の形状が
中間姿勢を安定保持

01

途中で倒れにくい

体位変換の途中でも
クッションが自立。

02

両手を自由に

姿勢を保持したまま
次の動作へ。

03

一人介助を支援

安定したポジショニングを
サポート。

面で支え、姿勢の「ズレ」「崩れ」を抑える

両サイドの曲面に安定する“面”を設けたWAKON独自設計。身体を預けた瞬間から
ポジションを保持し、介護者の腰や腕にかかる負担と、利用者の不安感を軽減します。

COLOR



ピンク



イエロー



グリーン



ブルー

USAGE

6ステップで、やさしく体位変換。




1 両膝の下に転助を
セットします。




2 転助を膝の下で
立てます。




3 背中を軽く支えながら
転助を回転させます。

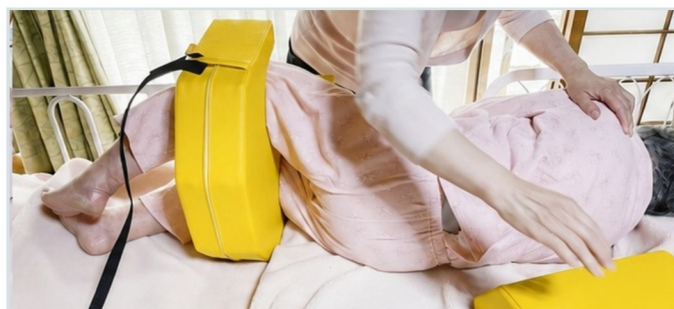

4 必要な位置で補助
クッションを入れます。

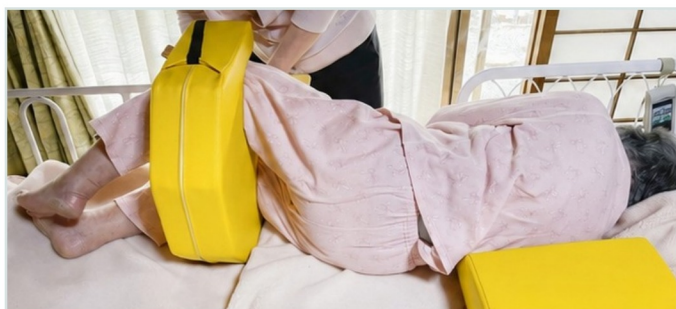

5 さらに回転。留め紐を
ベッドサイドへ固定可能。

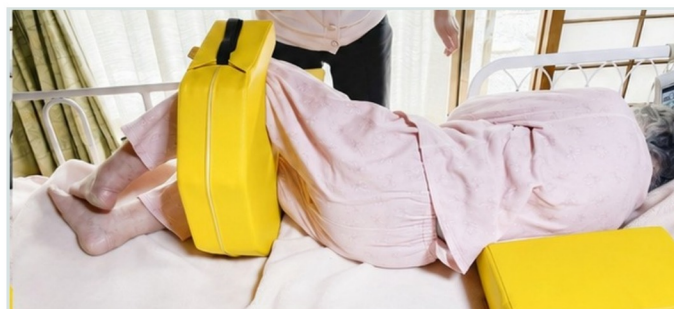

6 両手を離しても、回転した
姿勢を保持できます。

ポイント 利用者の表情と姿勢を確認しながら操作し、使用前には製品とベッド周辺の安全を確認してください。

SPECIFICATION

製品仕様

本体サイズ（レッグサポート）	W36 cm × L46 cm × H10 cm
本体サイズ（バックサポート）	W29 cm × L29.5 cm × H13 cm
表面素材	PVC・ポリエステル
内部素材（レッグサポート）	ポリエチレン・ウレタンフォーム
内部素材（バックサポート）	チップウレタン
重量	レッグサポート600g／バックサポート1100g
カラー	ピンク・イエロー・グリーン・ブルー

CARE SUPPORT

病院・施設・在宅介護へ

床ずれ（褥瘡）予防を目的とした
定期的な体位変換と、介助動作の負担軽減を
ひとつの形で支えます。

福祉用具貸与でご利用いただけます。



製品詳細・お問い合わせ

現場から生まれた知恵を、確かな形に。

WAKON[®]

〒470-0334 愛知県豊田市花本町井前1-14

TEL：0565-43-2252 FAX：0565-43-2258

ホームページ：www.wakon-japan.jp

E-mail：info@wakon-japan.jp